
排尿方法

排尿口のレバーを下まで 下げると排尿できます。 排尿後はレバーを上ま で戻してください。

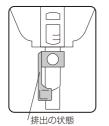

洗浄方法

毎日水洗いし、直射日光や 強い熱を避け、陰干しにて 乾燥してください。

規格

| 種類 | 商品コードNo. | 規格 | | - 1函入数 |
|----|----------|-------|------|--------|
| | | 容量 | 本体素材 | 四八奴 |
| 7号 | 12717 | 500mL | 塩ビ | 1⊐ |



蓄尿袋 Legbag

レッグバッグ Legbag

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、 商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、 必要に応じてお読みください。

お客様相談室 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)

www.alcare.co.jp



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013 TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 www.alcare.co.jp

はじめに

《蓄尿袋 7号》は、装着尿器用の蓄尿袋です。

安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせずこの取扱説明書に従いご使 用ください。

使用上のご注意

- ●付属のベルトには天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、 蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのア レルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こし た場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ●《蓄尿袋 7号》には容量の目盛りが表示されていますが、あくまでも目安です。正確な量を測定する際には、《蓄尿袋 7号》の目盛りは使用せず、別途計量器を使用してください。
- ●ご使用の際は、下部の排尿口が閉じていることを確認してください。排尿口が閉じていないと尿モレが起こります。
- ●ベルトはきつく締めすぎないでください(うっ血を起こさない程度)。
- ●コネクターチューブの長さを調整する場合は座った状態で行ってください。立った状態で長さを調整すると座った際に短くなり、チューブ外れなどによる尿モレの原因となります。
- ●付属のコネクターチューブは当社の装着尿器専用です。当社以外の装着尿器には接続できません。無理に接続した場合、尿モレの原因となります。

保管上のご注意

室温で保管し、高温多湿や直射日光があたる場所は避けてください。品質劣化の原因となります。


廃棄上のご注意

蓄尿袋は通常「燃えないゴミ」の扱いですが、地域により異なる場合もありますので、詳しくは各自治体へご確認ください。


装着方法


①ベルトの緑色の面が表になるように蓄尿袋に通します。

(ベルトの裏地がゴム状で、ずり落ちを防止します。 蓄尿袋 ト下の管が押さえられ、密着されます。)

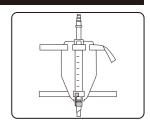


②下部の排尿口が閉じていることを 確認し、蓄尿袋の不織布面と肌が 接するように、ベルトの面ファス ナーで脚に装着します。

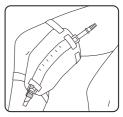

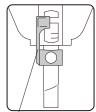


/閉じている状態

③座った状態で、装着尿器と接続するコネクターチューブの長さをハサミを用いて調整します。※コネクターチューブについている青色の口具は使用しません。

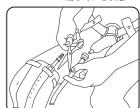

④蓄尿袋上部のタケノコ型コネクターに接続します。なるべくチューブの奥まで差し込んでください。

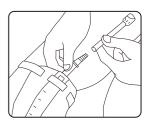

⑤装着尿器の先端に白い口具がついている場合は 取り外し、装着尿器先端の排尿口(青い口具)を コネクターチューブの白い口具に差し込んで回 して、しっかり固定します。

