

ミニクローズ

Mini Close

ミニパッド

Mini Pad

入浴用パウチ
Bathing Pouch

入浴用パッド
Bathing Pad


取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175
(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)
www.alcare.co.jp


種類と特徴

ミニクローズ

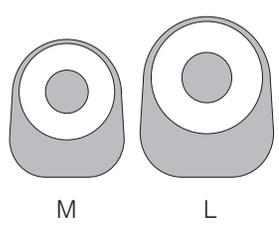

- 四面密封型で下ぶくれの構造ですから少量の排便(排尿)があっても安心です。
- あらかじめ40mmの穴が開いており、カットする手間が省けます。

ミニパッド

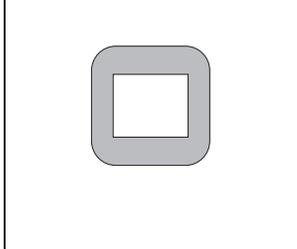

- 表面はしなやかな繊維の風合でありながら、防水タイプで入浴しても水分の浸入がありません。
- 吸水性の高いパッド付で、腸液などを吸収すると共にパッドがストーマを保護します。

使用上のご注意

- 《ミニクローズ》の粘着部には天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ストーマ周囲には軟膏など、粘着力の低下の原因となるものは塗らないでください。粘着力低下によるモレの原因となります。
- 剥離紙を剥がした面板の表面には、指などが触れないようにご注意ください。粘着力低下によるモレの原因となります。
- 一度剥がした装具をもう一度貼るのはお止めください。粘着力低下によるモレの原因となります。
- 皮膚の過敏な方は、慎重にお使いください。
- カブレている皮膚面には使用しないでください。
- 万一、お肌に合わない時は使用を中止し、医師または看護師にご相談ください。

保管上のご注意

粘着力不足など品質劣化の原因となりますので、保管の際は次のことを避けてください。

- 高温・多湿の場所での保管
- 温度が低い場所(冷蔵庫など)での保管
- 直射日光が当たる場所での保管
- 圧迫がかかる場所での保管
- 長期間の保管
※箱に記載されている使用期限を必ずご確認ください。
- 面板の剥離紙を剥がした状態での保管

はじめに

ミニシリーズは社会復帰したオストメイトのために開発された洗腸排便後や入浴時における専用の装具です。
軽量でコンパクト、しかも目立たない肌色タイプですから、ストーマを意識せずに活動できます。
種類もクローズタイプとパッドタイプの2種類があり、状況に応じてお選びいただけます。
安全にお使いいただくために、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従ってご使用ください。

使用手順

- ①ストーマ周囲の皮膚を蒸しタオルなどで清潔にしてからよく乾かします。
*この時、皮膚表面の油分を十分に取り除くようにしてください。
- ②粘着面の剥離紙をとり、ミニクローズは開いている穴を、ミニパッドはパッド部をストーマに合わせ、下方からシワのできないように貼ります。
*万一、粘着面にシワができますとモレの原因になりますので注意してください。
- ③十分肌になじむよう手でストーマの周囲と粘着部周囲をよく押さえてください。
*粘着部が冷えていますと粘着力が低下しますので、この場合は手で温めるように押さえてください。
- ④尿や便が溜まったら取り替えます。
*剥がす時には片手で皮膚を押さえながら、もう一方の手で少しずつ剥がしてください。一度に剥がしますと皮膚障害を起こす原因となりますので注意してください。

廃棄上のご注意

使用済みのストーマ装具は、排泄物をトイレに流した後、新聞紙などに包み、ゴミ袋に入れてお捨てください。装具は通常「燃えないゴミ」の扱いですが、地域により異なる場合もありますので、詳しくは各自治体へご確認ください。

種類と規格

ミニクローズ

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		ストーマ有効径	袋サイズ	
M	12641	39mmまで	120mm×110mm	30枚
L	12642	39mmまで	140mm×130mm	30枚

ミニパッド

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		粘着部	吸収部	
—	12651	100mm×100mm	65mm×50mm	30枚