



オルボン[®] Olbon

男性用装着尿器
Male Incontinence Appliance

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ **0120-770-175**
(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)
www.alcare.co.jp


アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸 1-2-1 アルカセントラル 19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800 (代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp


はじめに

《オルボン》は、主に尿失禁でお困りの方のために開発された男性用装着尿器です。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。

構成と各部の名称

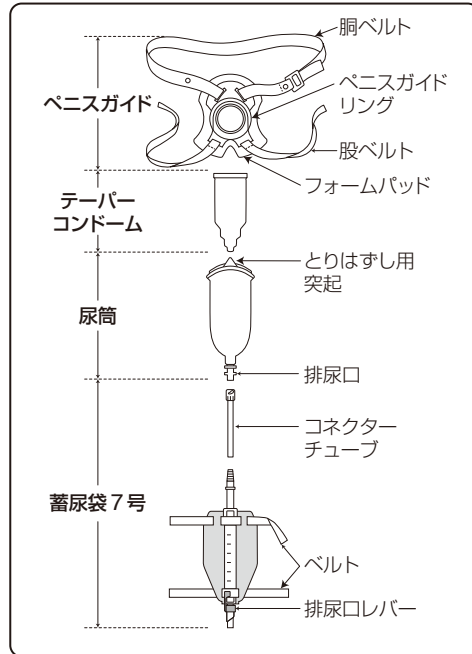

オルボンの装着図

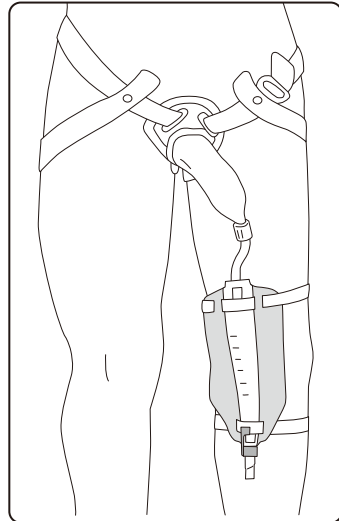


使用上のご注意


- 本品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師にご相談してください。
- ゴム製のため爪や硬いものに引っかけて傷つけないようにしてください。
- フォームパッドが汚れたら新しいものに取り替えてください。
- 煮沸消毒はしないでください。

装着方法


- ①ペニスガイドの胸ベルトを装着し、ペニスガイドリングからペニスを通します。股ベルトを装着し、胸、股ベルトの長さを調節します。

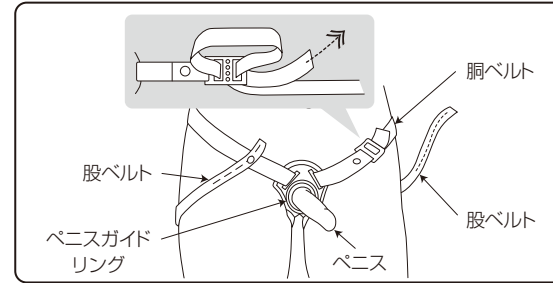

- ②テーパードームの先端を各自の適切なサイズにハサミで切り、ペニスにかぶせペニス先端部を出します。テーパードームの巻口をペニスガイドリング先端の第1溝に取り付けます。

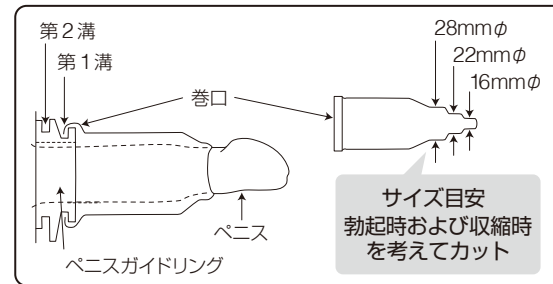


- ③尿管のとりはずし用突起が上にくるようにして、下側からペニスガイドリングの第2溝に合わせます。とりはずし用突起の両側をパチンと音がするまで完全に押し込みます。押し込みにくい場合は、溝周辺にクリームなどをぬってください。

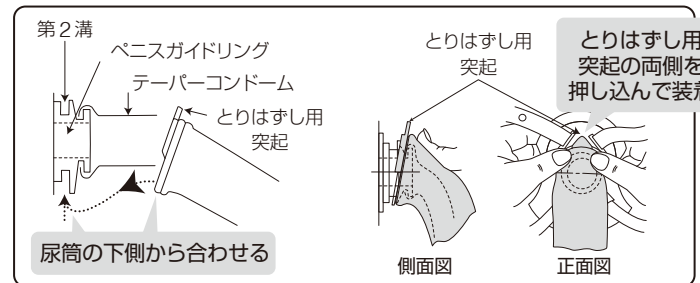


- ④【レッグバッグに接続する場合】

尿管の先端の白い口具を取り外し、蓄尿袋7号のコネクターチューブに接続します（蓄尿袋7号の取扱説明書をご確認ください）。

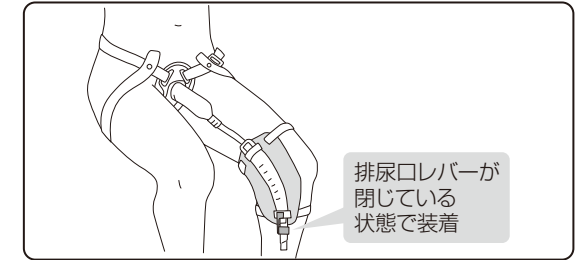


- 【シビンなどに流す場合】

尿管の先端の白い口具を取り外し、別売のゴム管を接続します。ゴム管の先端は、寝ている位置よりも低い位置に置いたシビンなどに入れます（ゴム管の取扱説明書をご確認ください）。

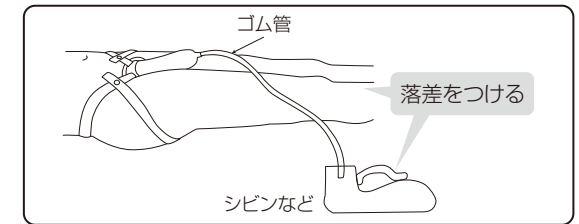

尿管の取り外し方法

ペニスガイドリングの前方を軽く押さえ、とりはずし用突起部を引っ張ると取り外すことができます。

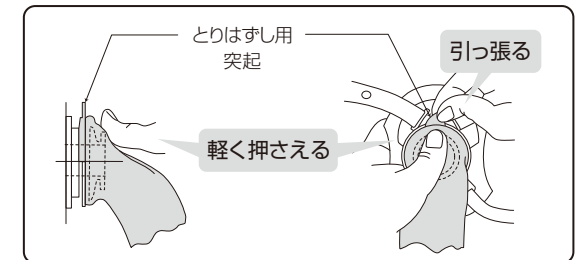

洗浄方法

中性洗剤を用いて毎日水洗いしてください。

洗剤が残らないようにゆすぎ、直射日光や強い熱を避け、陰干しにて乾燥してください。
完全に乾いたら、パウダーをぬって保管してください。

保管上のご注意

- 室温で保管し、高温多湿や直射日光があたる場所は避けてください。
- 溶剤、油剤、薬剤に触れないように保管してください。

規格

種類	商品コードNo.	セット内容	ウエスト回	1函入数	
大人用	13581	ペニスガイド	1コ	60~90cm	1セット
		フォームパッド	2コ		
		尿筒	1コ		
		テーパーコンドーム	2枚		
		蓄尿袋7号	1コ		

別売部品

品名	商品コードNo.	規格	1函入数
ペニスガイド	12711	フォームパッド2コ付	1組
フォームパッド	12712	—	10コ
尿筒	12713	テーパーコンドーム2枚付	1組
テーパーコンドーム	12714	—	10枚
蓄尿袋7号	12717	容量500mL	1コ
ゴム管	12751	長さ1.5m (コネクター付)	1本