

# 小児用ウーリンコレクター

## Pediatric Urine Collector


小児用採尿袋  
Pediatric Urine Collector

### 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

#### 使用方法

- ① 外陰部および会陰部をきれいに拭き、よく乾かします。
- ② 接着部の剥離紙を剥がしてください。
- ③ 接着面の下部を会陰部にあて、上方へと貼り上げていきます。このとき下部が肛門にかからないようにご注意ください。
- ④ 採尿終了後はバッグをはずし、接着面を2つ折りにして貼り合わせると、持ち運びに便利です。
- ⑤ 尿を取り出すときはバッグ下方中央部をカットし、排液口をつくって、他の容器に移してください。

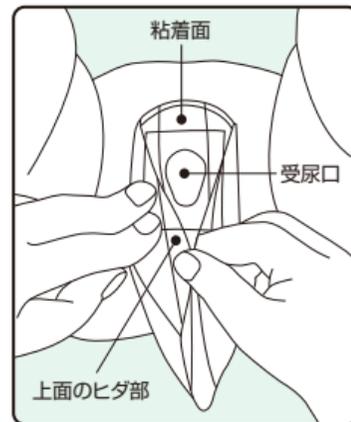

#### 使用上のご注意

- 患者名を記入するときは油性インクをご使用ください。尚、バッグに記入してある目盛はあくまでも目安としてご利用ください。
- 万一、皮膚に過敏な症状が現れた場合は、使用を中止してください。

# ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)

1511-2