

# ペニック 採尿器

## Penic

コンドーム式男性用尿器

Cone-Dome Type of Urine-Taking Equipment


### 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

### はじめに

《ペニック 採尿器》は特に失禁患者を対象とし、長期安静療養患者用、寝たきり患者用に開発された尿器です。常時着用しても不快感が少なく、寝たきりで動きの少ない人に適しています。また、ゴム管を接続してベッドの外に導尿することも可能です。

### 装着図

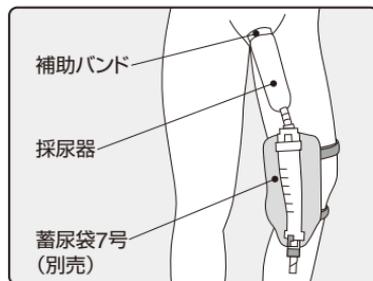

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

www.alcare.co.jp

## 使用上のご注意

### 警告

●この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー様症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

### 注意

- 採尿器は、適切なサイズをお使いください。サイズが合っていない場合、うっ血もしくは尿モレのおそれがありますのでご注意ください。
- 採尿器固定用の補助バンドは、締めすぎないでください。初めて補助バンドを締める方は、約15分後に一度はずし、皮膚の状態を観察してください。ペニスがうっ血しているようであれば、少しゆるめてください。
- 採尿器を爪などでキズをつけないようにしてください。
- 1日1回必ず採尿器をはずし、装着部全体を清拭してください。装着により発疹、発赤、かぶれ、かゆみ等の症状があらわれた場合、またはキズが生じた場合は、装着を中止し、医師に相談してください。

## 使用方法

- ①ペニックス採尿器を蓄尿袋(別売:蓄尿袋7号)に接続します。
- ②蓄尿袋を脚部に固定し、採尿器をペニスにかぶせます。
- ③ペニスの根元に補助バンドを巻き、バンドを包み込むように採尿器の端部を折り返して固定します。



## 保管上のご注意

- 高熱や直射日光にあてないようにしてください。
- 溶剤や薬液にふれないように注意してください。

## 取扱上のご注意

### 洗浄方法

- 中性洗剤を溶かしたぬるま湯でキズをつけないように洗い、十分に水ですすいでください。
- 乾燥は陰干しとし、乾いたらベビーパウダーを全体に塗布してください。

## 規格

種類	商品コードNo.	規格	1箱入数
C-25	12731	内径25mmφ	5コ
C-30	12732	内径30mmφ	5コ
C-35	12733	内径35mmφ	5コ

# ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
www.alcare.co.jp