

取扱上のご注意

保管方法

- 本品を保管する際は、車中など高温になる場所や低温になる場所、暖房器具の熱などが直接あたる場所などには置かないでください。
- 水濡れに注意し、直射日光を避けて、室温で保管してください。

お手入れ方法

- 本品はオーバーカパーのみ洗うことができます。
- オーバーカパー以外が汚れた場合は必要に応じ新しいものと交換してください。

洗濯方法

(オーバーカパー)

- オーバーカパーは手洗いをすると縮みや風合いの変化はありますが、繰り返し使用することができます。
- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 柔軟剤、塩素系漂白剤、洗濯機、乾燥機、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 手洗いは陰干ししてください。
- 完全に乾いてから、本品の元の位置にかぶせて使用してください。

廃棄方法

本品を廃棄する場合は、各自治体の廃棄区分に従ってください。

品質表示


本体(カパー) : 綿
本体(芯材) : ポリエチレン、ポリウレタン、ポリエステル
金属ファスナー : ポリエステル、亜鉛合金
ポリエチレン板 : ポリエチレン、ポリエステル
三日月状芯材 : ポリエチレン、ポリウレタン
オーバーカパー : 綿、ナイロン、天然ゴム
面ファスナー : ポリエステル

種類と規格

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		頸囲	高さ	
LL	10421	40～46cm	8.0～9.0cm	1コ
L	10422	35～41cm	8.5～9.5cm	1コ
M	10423	30～36cm	8.5～9.5cm	1コ
S	10424	26～31cm	7.5～8.5cm	1コ

採寸方法

頸囲を測ってください。
頸囲や高さを参考に適切なサイズをお選びください。

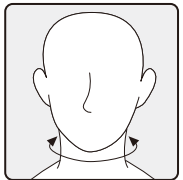

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

2209-2

for Best Care

ALCARE

ポリネックソフト Polyneck Soft

頸椎固定用シーネ
Cervical Collar

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)

www.alcare.co.jp

はじめに

《ポリネックソフト》は、頸部の固定・支持の目的に開発された商品です。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

使用上のご注意

*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。



警告 人身事故につながるおそれのある注意事項


- この製品のオーバーカパーには天然ゴムを使用しています。
- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 本品の使用に際しては、取扱説明書をよくお読みになったうえ、必ず医師などの医療従事者は使用される方へ適正使用のための説明、指導をしてください。また使用される方は、医療従事者の指示、指導に従って本品を使用してください。
- 本品を使用中に、痛み、しびれ、皮膚障害などの異常が生じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 本品は1症例1使用となります。本人以外の方へ使用することはおやめください。
- 使用者に適したサイズを選定し、使用者の体型に合わせた調整を行ってください。適したサイズを選定しない場合は、適切な支持が得られないおそれがあります。
- 医師の指示に従って高さ調整を行ってください。
- 本品が正しく装着されているか十分確認してください。本品使用中に、過度な締め付けや、ずれやゆるみが生じた場合は、正しく装着し直してください。装着状態の調整を行っても、状態の改善がみられない場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 面ファスナーが肌にあたると、皮膚を傷つけるおそれがありますのでご注意ください。

注意

物損事故につながるおそれのある注意事項

- 本品を修正・加工して使用しないでください。
- 本品に変形などの不具合がある場合は使用しないでください。
- 面ファスナーが衣服にあたると、衣服を傷つけるおそれがありますのでご注意ください。



構造および各部の名称

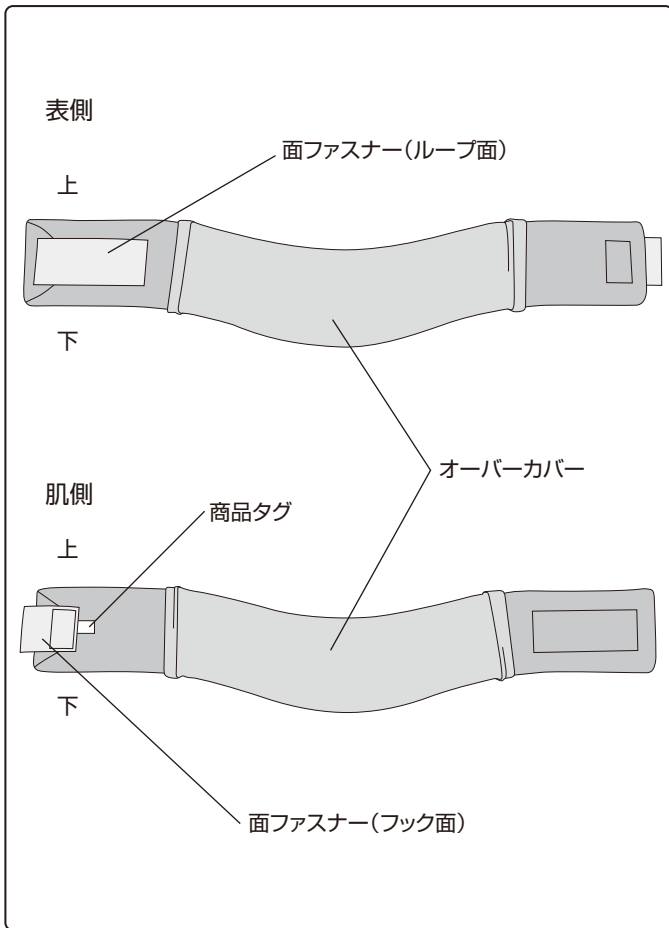


製品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それにより、イラストと実際の製品とで若干の違いが生じる場合がございますことをご了承ください。

使用方法

- ①商品タグの付いている位置から、本品の上下、表側・肌側を確認します。
- ②商品タグが肌側の左後方にくるようにし、あごの位置を本品中央の凹みに合わせます。

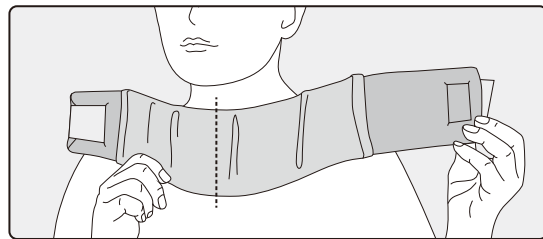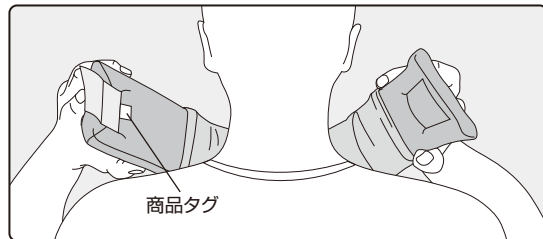


- ③頸部に巻くようにして、頸部の後面で面ファスナーのフック面とループ面をとめます。

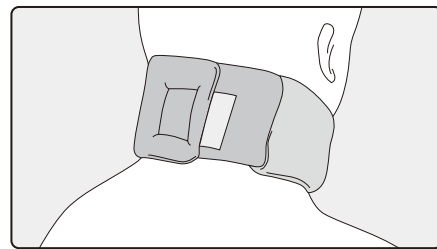


注意：頸部への圧迫や締め付けすぎなどに注意し、ずれやゆるみがない程度に調整します。

装着図

正面

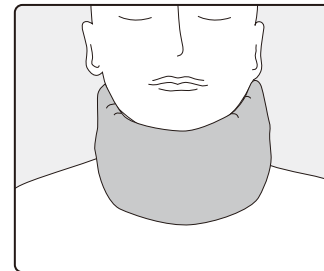


背面


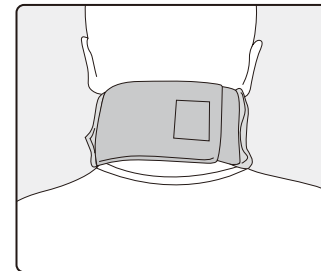


高さを調整する場合（※調整は医師の指示に従ってください）


- ①オーバーカバーをはずし、金属ファスナーを開いてポリエチレン板をはずします。

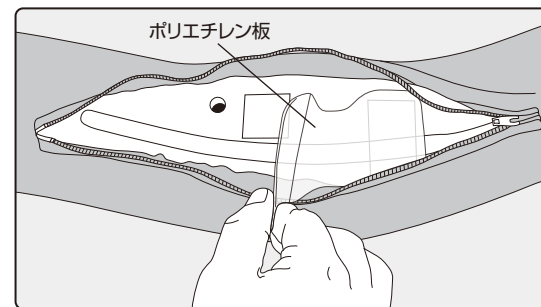

- ②芯材の三日月状部分を抜き取り、隙間を狭めるように高さを低くし、頸部に沿うように丸みをつけ、再度ポリエチレン板で固定します。（芯材の三日月状部分は廃棄せず保管してください。）

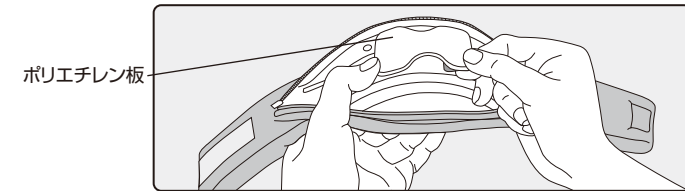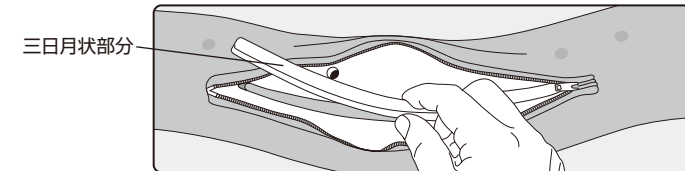

- ③金属ファスナーを閉じ、ファスナーのスライダーをロック位置にします。

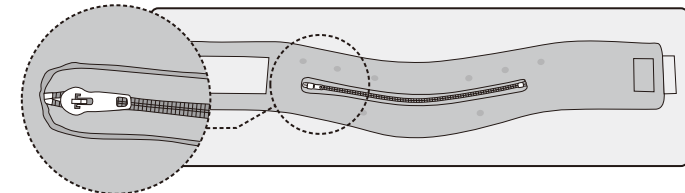

- ④金属ファスナーを覆うようにオーバーカバーをかぶせます。

