

ポスパック

Pospack

コロ/イレオストミー用オープンエンドパウチ
Colo/Ileo Open-End Pouch

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。





お客様相談室 ☎ 0120-770-175
(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)

www.alcare.co.jp

はじめに

《ポスパック》は、ストーマ袋と面板が一体となったワンピース(単品系)装具です。ストーマ袋は容量が大きく、排泄物の出しやすいオープンエンド型で、面板は用途に応じて短期(1日)交換用と長期(3～5日)交換用を用意しています。


種類と特徴

交換 時期	交換 日数	1日	3～5日
術後		 ポスパック-K 肌にやさしい面板(カラヤプラスト)を使用しています。	
退院後		 ポスパック-ライト 適度な粘着力を持ちながら、1日交換が可能な超薄型面板を使用。穴あけ不要のフレカットタイプもあります。	 ポスパック-B しっかりとした粘着力で、長時間の連続使用が可能です。
		 ポスパック-シンプル 適度な粘着力を持ちながら、1日交換が可能な超薄型面板を使用。経済性にすぐれたエコノミータイプです。	


ポスパックの貼り方(イラストは、ポスパック・Bです)




① ストーマ周囲を清拭します。
使用する前に、まずストーマ周囲を微温湯に浸したガーゼなどで清潔にし、よく乾かします。この時、浴用石鹸などを用いて、粘着を悪くする皮膚表面の油分を十分に取除くようにしてください。

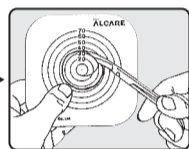


② カuttingゲージに穴を開けます。
ストーマサイズを測り、付属のカuttingゲージにストーマと同じサイズの穴を開けます。穴は中央に開けてください。

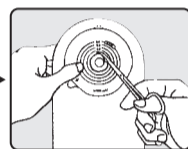


③ 面板に穴を開けます。
カuttingゲージを面板の剥離フィルムの上に重ねて、鉛筆などでその穴の大きさを記します。次に記した線に沿ってハサミで穴を開けます。

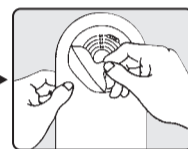

④ 剥離フィルムを剥がします。

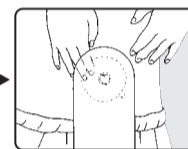

⑤ ストーマに合わせて貼付します。
ストーマの位置を確認しながら、ずれないように合わせて正しく貼ってください。

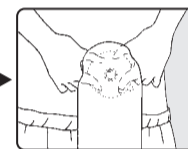

⑥ 粘着部をよく押さえます。
ストーマ袋がきちんと皮膚につくように、ストーマ周囲を手でよく押さえてください。

使用上のご注意

交換の際は以下の点にご注意ください


- 入浴後の交換は、お避けください。面板の温度が上がっているため、粘着強度が高まり、剥がしにくいことがあります。入浴後交換の場合は、30分以上たって面板の温度が下がったのを確認のうえ、行ってください。

ポスパック-ライト/シンプルをお使いの方


- これらの面板は通常、24時間後の交換が標準となっておりますので、それより早く交換する場合、粘着力が強く、剥がしにくいことがありますのでご注意ください。

※個人差はありますが、商品の特性上、貼付8時間後が最も強い粘着力となりますので、特にその前後での交換はお避けください。


下部開口部の止め方

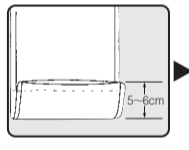


① ストーマ袋の下部開口部を下から約5～6cmのところまで、上に折り返します。

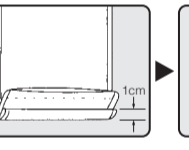

② 次に、その折り目から1cm位の幅で、図のようにストーマ袋を巻き上げます。

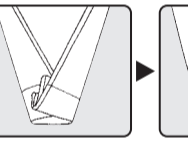


③ 巻いた下部を図のように両端から3つ折りにします。

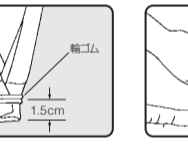


④ さらに、③と同様に両端から3つ折りにし、下部から1.5cm位上を付属の輪ゴムで止めます。


このような場合には

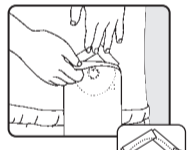


●入浴時には面板外側の溶けや剥がれ防止のため、入浴時には防水テープ(デルマポア3号)の併用をおすすめします。(シンプルを除く)

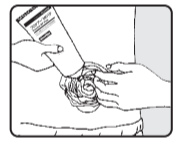

●ストーマ周囲にすき間がある時はプロケア-MFパテ(練状皮膚保護剤)などを使用し、すき間をうめてください。

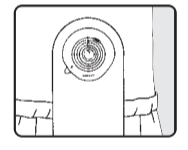

●ストーマが突出していない方はストーマが陥没していたり、スキンベルの方は、ストーマの径より2～3mm大きめに粘着面の穴を開け、プロケア-MFパテなどですき間をうめてください。

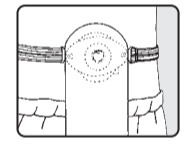

●より確実な固定にはベルト(ユークア固定ベルト)の併用がおすすめです。(B、ライトをお使いの方)。ただし固定ベルトの圧迫が強すぎると皮膚が赤くなったりしますので、ベルトで締めつけないようにしてください。圧迫の度合は、指が縦に2本入る程度が目安です。

使用上のご注意

- 付属の輪ゴムには天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ストーマ周囲には何も塗らないでください。粘着力低下によるモレの原因となります。
- 剥離フィルムを剥がした面板の表面には、指などが触れないようご注意ください。粘着力低下によるモレの原因となります。
- 一度剥がした装具をもう一度貼るのはお止めください。粘着力低下によるモレの原因となります。
- 装具を装着状態で折りまげないでください。袋の穴あきによるモレの原因となります。
- 粘着面に開ける穴は、定められた有効径を越えて切らないでください。袋の穴あきによるモレの原因となります。
- 粘着面が冷たくなっている場合は、暖かい部屋に移し、装具全体が温まってからご使用ください。
- 万一、肌に合わない時は使用を中止してください。

保管上のご注意

粘着力不足によるモレの原因となりますので、保管の際には次のことを避けてください。

- 高温(40℃以上)、多湿の場所での保管
- 温度の低い場所(冷蔵庫など)での保管
- 直射日光が当たる場所での保管
- 圧迫がかかる場所での保管
- 長期保管
*箱に記載されている使用期限を必ずご確認ください。
- 剥離紙を剥がしての保管

廃棄上のご注意

使用済みのストーマ装具は、排泄物をトイレに流した後、新聞紙などに包み、ゴミ袋に入れてお捨ててください。装具は通常「燃えないゴミ」の扱いですが、地域により異なる場合がありますので、詳しくは各自自治体へご確認ください。

種類と規格

ポスパック・K

種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)	
70	15011	14～69mm(フリーカット)	400mm×150mm	10枚
110	15012	109mmまで(フリーカット)	400mm×170mm	10枚

ポスパック・B

種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)	
—	15021	14～59mm(フリーカット)	400mm×150mm	10枚

ポスパック・ライト

種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)	
20	15031	14～59mm(フリーカット)	400mm×150mm	30枚
25	15032	19～24mm	400mm×150mm	30枚
30	15033	24～29mm	400mm×150mm	30枚
35	15034	29～34mm	400mm×150mm	30枚
40	15035	34～39mm	400mm×150mm	30枚
45	15036	39～44mm	400mm×150mm	30枚
50	15037	44～49mm	400mm×150mm	30枚

ポスパック・シンプル

種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)	
—	15041	14～49mm(フリーカット)	400mm×110mm	30枚

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp