

# プロケア® MFパテ

## Procare MF Pate

カラヤ・柑橘ペクチン系パテ状皮膚保護剤  
Paste Skin Barrier (Karaya Gum+Citrus Pectin)

### 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175  
(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)  
www.alcare.co.jp

### はじめに

《プロケア-MFパテ》は、カラヤガム、柑橘ペクチンにマイクロファイバーを加えた練状皮膚保護剤です。平坦なストーマや陥没ストーマ、瘻孔周囲の皮膚などを排泄物から守ります。また、プロケア-ウエハーやプロケア-1、プロケア-2と組み合わせてお使いになれます。ノンアルコールですので皮膚に刺激がありません。安全にお使いいただくため、用途以外の使用は必ずこの取扱説明書に従いご使用ください。

### 使用上のご注意


- 皮膚が敏感な方は、慎重にお使いください。
- 万一肌に合わない場合は使用を中止してください。
- 健康な皮膚以外へは使用しないでください。
- 高温のお風呂に長時間はいることは避けてください。

### 保管上のご注意



- 室温で保管してください。
- 高温、多湿の所や、冷凍室には入れないでください。
- 幼児の手のとどかない所へ保管してください。
- 食べ物と間違わないようにしてください。

### ご使用の前に

ストーマ周囲や貼付周囲を清潔にしてください。ぬるま湯や浴用石鹸でストーマ周囲の油分や排出物を取り除き、乾燥させてください。強い消毒液やベンジンなどは皮膚障害の原因となりますので注意してください。

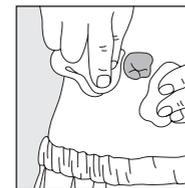

### ご使用方法

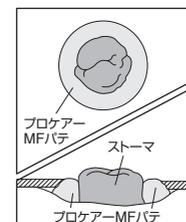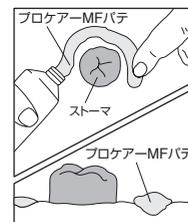


#### ①ストーマ周囲のしわや、くぼみに…

ストーマ周囲のしわや、くぼみをプロケア-MFパテで埋め、皮膚表面を平滑にしてください。


#### ②ストーマ装具の密着力を高めます。

ストーマとストーマ装具のすき間を埋めて、プロケア-1、プロケア-2の各種面板(F、FA、Fc)やプロケア-ウエハーの密着力を高めます。

### How to use (1):

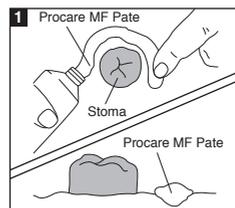


Apply the pate on the area with a wrinkle or dip.

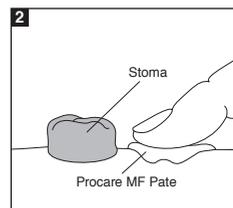


Flatten the skin surface. Apply the ostomy appliance as usual.

### How to use (2):

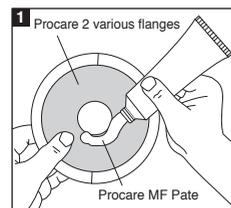

Apply a proper amount of pate around the hole made in the faceplate to fit to the stoma on the attachment side, and apply the faceplate to the skin.

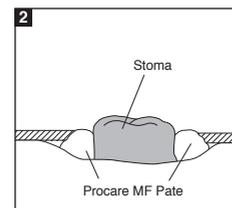


There is no need to wipe off any pate extruding from spaces.

### MFパテの塗り方



①指で塗る時は、指で塗る時は、指に水をつけてからプロケア-MFパテを塗ると手のべたつきがありません。

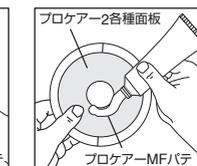

②予めフランジや、ウエハーに塗ることができます。瘻孔やストーマに合わせて、面板やウエハーに開けた穴の皮膚保護剤(貼付側)の周りに適量のプロケア-MFパテを塗り、皮膚に貼付してください。面板のすき間から浮き上がってきたプロケア-MFパテを拭き取る必要はありません。

# ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp

1901-2

### Precautions for Use and Storage

To avoid peeling off or leakage due to decreased adhesive strength, observe the following:

- Use for the healthy skin only.
- Do not take a high-temperature bath too long time.
- Do not store in an area of high-temperature or high-humidity, or in a freezer.
- Keep out of reach of small children.
- Discontinue use if skin becomes irritated.

# Procure MF Pate

Paste Skin Barrier (Karaya Gum+Citrus Pectin)

### Instruction Manual

- Prior to use, carefully read the instruction manual so that you understand the product's features.
- Keep the instruction manual close at hand and read it again when needed.

You can contact us at  
E-mail: inquiry@alcare.co.jp  
Fax: +81-3-5611-7827  
www.alcare.co.jp/e

# ALCARE

ALCARE Co., Ltd.

19F, Arcacentral Bldg., 1-2-1 Kinshi,  
Sumida-ku, Tokyo, 130-0013, Japan  
www.alcare.co.jp/e