

プロケア®リムーバー Procure Remover

ストーマ用器具除去用剥離剤
Ostomy Appliance Remover


取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。


お客様相談室 ☎0120-770-175
(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)
www.alcare.co.jp

使用手順

- ①アルミパックの切り込み部より開封し、プロケアリムーバーを手で取り出します。

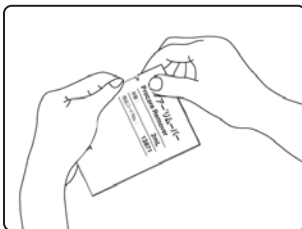

- ②ストーマ用器具粘着部上部の端を持ち上げ、皮膚とのすき間をプロケアリムーバーで拭きながらゆっくり剥がします。

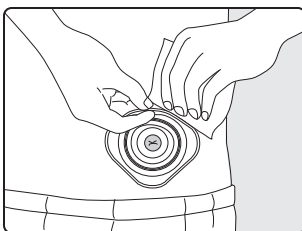

- ③ストーマ用器具を剥がした後は皮膚を石鹸でよく洗い、すすいだ後、乾いたガーゼ等で十分に拭きとり乾燥させます。



はじめに

“プロケアリムーバー”は、ストーマ用器具の除去用剥離剤です。D-リモネン(オレンジの抽出液より水分等を除いたオイル)が、ストーマ用器具の皮膚保護剤や粘着剤を剥がす際の痛みを軽減します。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従ってご使用ください。

使用上のご注意

*【使用上のご注意】では、その危険度に応じて次の区分をしております。
△警告……誤った取り扱いをすると、中等度以上の人身事故が想定される内容を示します。
注意……誤った取り扱いをすると、人が軽度の障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

ご使用前には、医師または看護師の指導を受けた上、注意事項を熟読し、本品の特性を十分理解してください。

警告

- 傷や腫れ物・湿疹等のある部位にはご使用にならないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。火がつくことがあります。
- アルミパックを開封した後は、24時間以内にご使用ください。剥離液が酸化してカプレの原因となることがあります。
- ご使用後は石鹸でよく洗い、すすいだ後、乾いたガーゼ等で十分に拭きとり乾燥させてください。液の拭きとりが不十分ですと油分が残る、皮膚カプレやストーマ用器具の貼りつきを悪くさせる原因となります。
- オレンジの臭いかいたしますのでお子様が誤って飲み込まないようにご使用後はすみやかに廃棄してください。万が一、飲み込んだ場合には無理に吐かせずに、直ちに医師の手当てを受けてください。
- 目に入った場合は、直ちに流水でよく洗った後、専門医の手当てを受けてください。
- ご使用により、肌に異常があらわれた場合には、使用を中止し専門医にご相談ください。
- 本品は柑橘系香料成分を使用しております。体質や体調により気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止してください。また妊産婦、乳幼児はとくに香りの影響を受けやすいためご使用の際には医師にご相談ください。

注意

- 衣服に液をしみこませてしまった場合には直ちに水につけた後、通常の洗濯を行ってください。

保管上のご注意

- 火気のない場所に保管してください。オイルですので着火源があると火がつく恐れがあります。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 室温で保管してください。40℃以上になる場所では、アルミパックが破損することがあります。

規格

商品コードNo.	入数	成分
13871	50袋/箱	D-リモネン (20%) 流動パラフィン (80%)

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp