

## 取扱上のご注意

### 洗濯方法

洗濯の際はステーを抜いてから洗濯してください。30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。漂白剤、洗濯機、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。洗濯後は陰干しし、十分乾燥させてください。

### 保管方法

水濡れに注意し、直射日光および高温・多湿を避けて、室温保管してください。

### 組成・成分


ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・アルミニウム

### 廃棄方法

本品を廃棄する場合は、上記組成・成分に関する各自自治体の廃棄区分に従ってください。

## 種類と規格

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		腰回	ウエスト回	
3L	13445	105~120cm	95~115cm	1コ
LL	13441	95~110cm	85~105cm	1コ
L	13442	85~100cm	75~95cm	1コ
M	13443	75~90cm	65~80cm	1コ
S	13444	65~80cm	55~70cm	1コ

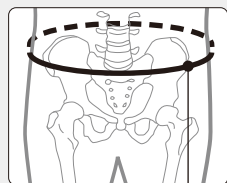

### 採寸の仕方

- 腰回(腸骨の周囲)を計測してください。
  - サイズの選定は腰回を基準とし、ウエスト回は目安としてください。
- ※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

# ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
www.alcare.co.jp

1806-1

for Best Care **ALCARE**

# サクロアクティブ・DX

## Sacro Active-DX

補助ベルト付腰部固定帯  
Lumbar Support

## 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)

www.alcare.co.jp

## はじめに

ご使用にあたっては、必ず医師にご相談のうえ正しくお使いください。また、安全にお使いいただくため用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。なお、商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

## 使用上のご注意

\* [使用上のご注意] では、その危険度に応じて次の区分をしております。


### 警告 人身事故につながるおそれのある注意事項

- 本品の使用に際しては、必ず使用手順および医師の指示に従ってください。
- 本品は1症例1使用となります。本人以外の方へ使用することはおやめください。
- 使用手順を参考に、必ず正しい位置に装着してください。
- 本品の使用により、しびれ、痛みなどの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師に相談のうえ指示に従ってください。
- 本品は化繊を使用しておりますので、本品のご使用によりかぶれなどの何らかの異常が生じた場合には、使用を中止してください。
- 本品はステーにアルミニウムを使用しております。曲げ加工の際に無理に力を加えますと破損するおそれがあります。
- ステーが飛び出していないか確認してください。背部のステーが本体より飛び出している場合、肌や衣服を傷つけるおそれがあります。万が一ステーが飛び出しているときは、十分中に押し込んで再度飛び出さないように処置してから装着してください。また、本品が破損してステーが飛び出した場合は使用しないでください。
- 面ファスナーは表面が鋭利なため、手や指などを傷つけるおそれがあります。
- 本品をご使用の際は必ず下着などの上から装着してください。
- 長期の使用や使用状況によっては破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。
- 本品で体を過度に圧迫しないようにしてください。強く締めすぎると血行障害やしびれ、ムレなどを生じる場合があります（本品は多種の部品を縫製して作られており、長時間の使用や使用状況によっては、ムレや圧迫感、かゆみなどを感じる場合があります）。
- ズレやゆるみ、過度の圧迫などが無いよう装着してください。使用中、ズレやゆるみ、過度の圧迫などが発生したら直ちに正しく装着し直してください。ズレやゆるみ、過度の圧迫などがあると確実な保持性が得られず、症状を悪化させる危険性がありますので十分ご注意ください。
- 装着部に傷、腫れ、湿疹などがある場合には使用しないでください。
- 夜間就寝時の使用は、医師の指示に従って装着してください。
- 本品は改造しないでください。

## 注意 物損事故につながるおそれのある注意事項

- 面ファスナーやステーを着衣に引っ掛けないようご注意ください。

## 各部の名称

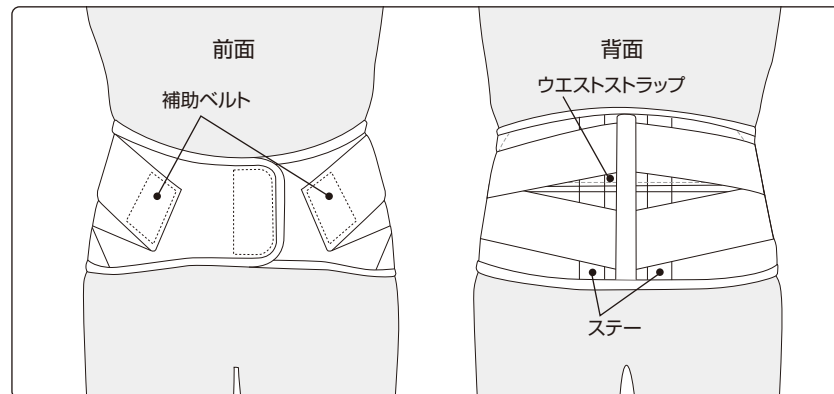

## 使用手順

- ① 腰部を支持するステーは装着前に腰のラインにフィットするように曲げておきます。
  - ② 補助ベルトはあらかじめ外しておき、商品タグがついている方が肌側上方になるように腰部にあてます。
  - ③ 背骨を挟んで両側にステーがくるよう、また腰部を十分に覆える位置に合わせた後、下腹部を持ち上げるように装着します。
  - ④ 2本の補助ベルトは十分に引っ張り、下腹部を持ち上げるように装着します。
- ※ 面ファスナーはそれぞれしっかりと押しとめてください。きちんととめていない場合は外れるおそれがあります。