

取扱上のご注意

洗濯方法

30°C以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。漂白剤、洗濯機、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。洗濯後は陰干しし、十分乾燥させてください。

保管方法

水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。

組成・成分


ポリエステル、ナイロン、レーヨン、ポリウレタン、ステンレス

廃棄方法

本品を廃棄する場合は、上記組成・成分に関する各自治体の廃棄区分に従ってください。

種類と規格

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		腰回	ウエスト回	
LL	10681	97~106cm	93~102cm	1コ
L	10682	88~ 97cm	84~ 93cm	1コ
M	10683	79~ 88cm	75~ 84cm	1コ
S	10684	70~ 79cm	66~ 75cm	1コ

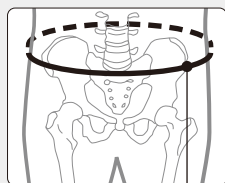

採寸の仕方

- 腰回(腸骨の周囲)を計測してください。
 - サイズの選定は腰回を基準とし、ウエスト回は目安としてください。
- ※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

for Best Care **ALCARE**

サクロサポート® Sacro Support

腰部固定帯

Elastic Lumbar Belt

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)

www.alcare.co.jp

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸 1-2-1 アルカセントラル 19階 〒130-0013

TEL.03-5611-7800 (代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp

はじめに

ご使用にあたっては、必ず医師にご相談のうえ正しくお使いください。また、安全にお使いいただくため用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。なお、商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

使用上のご注意

* [使用上のご注意] では、その危険度に応じて区分しております。


警告 人身事故につながるおそれのある注意事項

- 本品の使用に際しては、必ず使用手順および医師の指示に従ってください。
- 本品は1症例1使用となります。本人以外の方へ使用することはおやめください。
- 使用手順を参考に、必ず正しい位置に装着してください。
- 本品の使用により、しびれ、痛みなどの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師に相談のうえ指示に従ってください。
- 本品は化繊を使用しておりますので、本品のご使用によりかぶれなどの何らかの異常が生じた場合には、使用を中止してください。
- 使用中、本体からステーが飛び出す場合があります。その際は直ちに使用を中止してください。
- 面ファスナーは表面が鋭利なため、手や指などを傷つけるおそれがあります。
- 本品をご使用の際は必ず下着などの上から装着してください。
- 長期の使用や使用状況によっては破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。
- 本品で体を過度に圧迫しないようにしてください。強く締めすぎると血行障害やしびれ、ムレなどを生じる場合があります(本品は多種の部品を縫製して作られており、長時間の使用や使用状況によっては、ムレや圧迫感、かゆみなどを感じる場合があります)。
- ズレやゆるみ、過度の圧迫などが無いよう装着してください。使用中、ズレやゆるみ、過度の圧迫などが発生したら直ちに正しく装着し直してください。ズレやゆるみ、過度の圧迫などがあると確実な保持性が得られず、症状を悪化させる危険性がありますので十分ご注意ください。
- 装着部に傷、腫れ、湿疹などがある場合には使用しないでください。
- 夜間就寝時の使用は、医師の指示に従って装着してください。
- 本品は改造しないでください。

注意 物損事故につながるおそれのある注意事項

- 面ファスナーやステーを着衣に引っかけないようにご注意ください。
- 硬質のステーを使用しておりますので、洗濯機や乾燥機などを使用せず、手洗いしてください(洗濯機や乾燥機の使用によって本品が破損したり、洗濯機や乾燥機が故障する場合があります)。

各部の名称

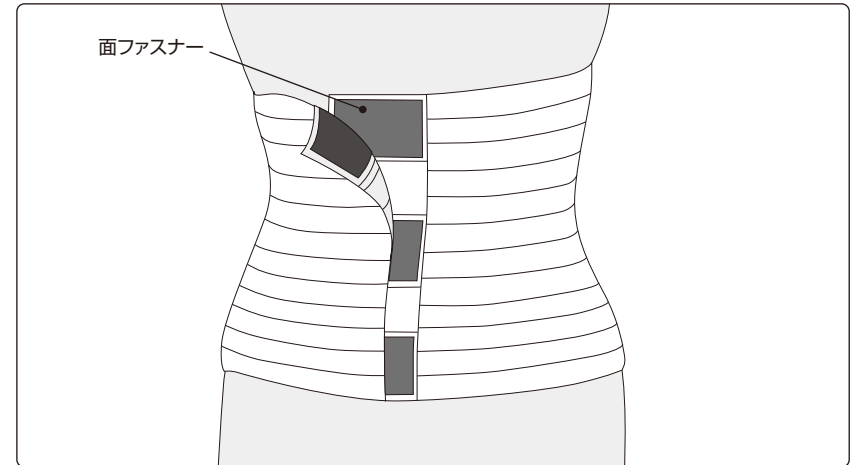

使用手順

- ① 商品タグがついている方が肌側上方になるように腰部にあてます。
- ② 腰部を十分に覆える位置に合わせて、下腹部を持ち上げるように装着します。

※面ファスナーはそれぞれしっかりと押しとめてください。きちんととめていない場合は外れるおそれがあります。