

## 「SAFE ボード」取扱説明書

このたびは、「SAFE ボード（セーフボード）」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。またこの説明書は必要なときに取り出しやすい場所に保管しておいてください。使用環境や身体状況が変化した際には再度お読みください。

### ●特徴

「SAFE ボード」の芯材は2つのセクションから成り立ち、折りたたみが可能です。

別売りの「SGE カバーL」をご利用いただき、ご使用ください。

SEG カバーL と組み合わせて使用することで、ご利用者を持ち上げることなく寝たまの姿勢で、ベッド⇄ストレッチャーまたはベッドへの移乗ができます。



### ●使用方法

- SAFE ボードに SGE カバーL を装着し、準備をしてください。
- ベッド⇄ストレッチャーまたはベッドの移乗間の橋渡しになるように、ご利用者が移乗する方向の身体の半分ほどがボードに乗るようにセットしてください。
- 介助者がご利用者を移乗方向へ傾けながらボード上をスライドし、目的の位置まで移乗を行ってください。
- 取り外す際はご利用者の身体を支えながら、介助者がボードのグリップを持ってボードをゆっくり引き抜いてください。



### 使用上の注意

ご使用にあたり看護師、理学療法士、作業療法士などの専門家にご相談いただき、正しく使用してください。

- 持ち手の部分の保護シールをはがしてからお使いください。
- 使用する前に必ず各部のほつれや破損が無いことを確認してからご使用ください。
- 移乗の際には、ベッドやストレッチャーなどのブレーキがかかっていることを必ず確認してから行ってください。
- 移乗間の距離は 20cm 以内としてください。

### ●お手入れ方法

- 洗濯及び乾燥機の使用はできません。
- 汚れは、水を含ませてよく絞った布で拭き取ってください。ひどい汚れは、薄めた中性洗剤を含んだ布で拭いた後水を含ませてよく絞った布で数回拭き取ってください。
- 0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能です。
- アイロンのご使用はできません。

### ●商品規格

サイズ： 1950mm×500mm×15mm

素 材：本体 高密度 PVC フォーム、ナイロン

最大耐荷重：160kg

MADE IN DENMARK



商品に関するお問い合わせは

**ラックヘルスケア株式会社**

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-10-2 TEL06-6244-0636