

「SGE シート」取扱説明書

このたびは、「SGE シート(スーパーグライドエコシート)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。またこの説明書は必要なときに取り出しやすい場所に保管してください。使用環境や身体状況が変化した際には再度お読みください。

●特徴

「SGE シート」は個人利用 (Single Patient Use) で衛生的にご利用いただけます。
ディスプレイタイプでありながら、なめらかで滑りやすい製品です。
環境に優しいリサイクル可能な素材を使用しており、焼却しても有害ガスは発生しません。



●使用方法

- 通常のスライディングシートと同様にお使いください。
- 1枚状のシートのため、二つ折り、あるいは広げたものを2枚重ねて使用することで摩擦を軽減し、上下・左右・回転などベッド上の位置修正を容易に行うことができます。
- 取り外す際はご利用者の身体を支えながら、無理に引っ張らず、重なったシートの下側を折り返すようにゆっくり引き抜いてください。



使用上の注意

ご使用にあたり看護師、理学療法士、作業療法士などの専門家にご相談いただき、正しく使用してください。

- 使用後は床の上やベッドサイドなどに放置しないでください。滑ってケガをする恐れがあります。
- シートを敷きこんだまま放置しないでください。転落、転倒の危険があります。
- 介助者がいない側にはサイドレールを設置してください。
- 汚れたり滑りが悪くなった時には速やかに交換してください。
- シートの敷き込みや抜き取り、ご利用者を移動させる際はシートを無理に引っ張って使用しないでください。破損の原因となります。
- ベッドで上方移動を行なう際は頭部を守るために枕のご使用をお勧めします。
- 火気や鋭利なものは近づけないでください。破損の原因となります。
- 直射日光が当たる場所、高温、多湿な場所での保管は避けてください。
- 用途以外の使い方はしないでください。

●お手入れ方法

- 0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能です。
- 洗濯及び乾燥機の使用はできません。
- アイロンのご利用はできません。

●商品規格

サイズ：620mm×1000mm/枚(50枚ロール)

素材：MDPE (中密度ポリエチレン)

MADE IN DENMARK



商品に関するお問い合わせは

ラックヘルスケア株式会社

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-10-2 TEL06-6244-0636