

医療用品 4 整形用品  
一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 11751000（熱傷被覆・保護材 11322101）

## エスアイエイド・フィット

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】


#### 1. 種類・規格

種 類	製品寸法
3号	75mm×75mm
5号	100mm×100mm
7号	100mm×200mm
10号	200mm×300mm

#### 2. 形状・構造

本品は創傷、熱傷等の被覆保護及び滲出液の吸収を目的とした創傷被覆保護材である。ゲル層は粘着性を有し、本品の操作性及び貼付中の患部密着性を向上させる。

<模式図>

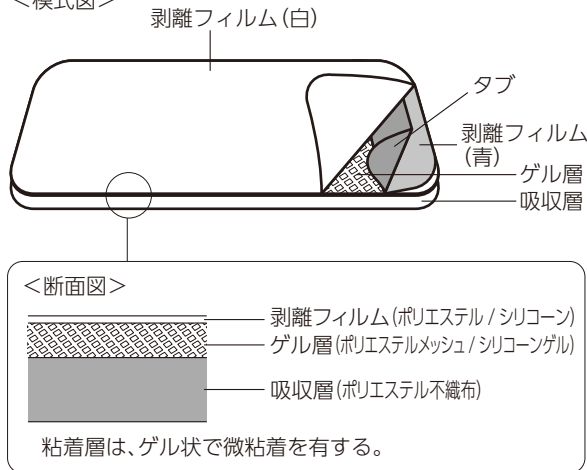

#### 3. 原理

本品は、吸収層とゲル層で構成されており、創傷、熱傷等に貼付することにより被覆保護する。又滲出液、血液等は網目状のゲル層を通過し吸収される。過度に粘着せず、柔軟性があり、身体のどの部位にも用いることができる。

### 【使用目的又は効果】

創傷、熱傷等の被覆保護及び滲出液の吸収

### 【使用方法等】

#### 1. 貼付前

- 1) 本品貼付部を清拭、洗浄し、必要に応じて消毒を行います。
- 2) 創周囲を十分乾燥させます。
- 3) 創を十分に覆うことができる、適切なサイズを選択します。創傷の形状に合わせて本品をカットして使用することもできます。

#### 2. 貼付

- 1) 本品の剥離フィルム（白）、剥離フィルム（青）のタブを持ち、貼付面に手が触れないように剥離フィルムを剥がし、伸ばさないように創部に貼付します。
- 2) 滲出液が多い場合は、本品又は滅菌済みの吸収用ガーゼを重ねても使用できます。
- 3) 粘着テープ、包帯等の適当な手段で本品を固定します。

### —注意—

本品は防水機能を有さない。シャワー、入浴をする場合には防水テープ等で本品を固定する。

#### 3. 交換

- 1) 滲出液の量と創の状態を考慮し、必要に応じて交換します。
- 2) 皮膚を押さえながら本品をゆっくりと剥がします。
- 3) 本品が創傷面に固着しているときは、蒸留水又は生理食塩水で固着した部分を湿らせ柔らかくしてから剥がします。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 1) 本品使用中に発赤、びらん、そう痒等の皮膚障害と思われる症状が現れた場合は、本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) 創面に臨床的感染、又はそのおそれがある場合は、頻繁に観察し、適切な処置を行うこと。又、全身状態が悪い場合は特に注意して使用すること。[症状を悪化させるおそれがあるため。]

#### 2. 不具合・有害事象

一般的な創傷被覆・保護材の使用における「不具合・有害事象」

- ・創の感染症状
- ・創傷及び周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎）
- ・固着
- ・壊死組織の増加
- ・疼痛

#### 3. その他の注意

- 1) 滅菌包装が汚損又は破損している場合には使用しないこと。
- 2) 滅菌包装を開封したら直ちに使用すること。
- 3) 植皮部に使用する場合は、注意深く愛護的に除去すること。[本品除去時に移植皮膚が剥がれるおそれがあるため。]

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水濡れ、直射日光、及び高温多湿を避け、室温で保管すること。

#### 2. 有効期間

パッケージに表示（自己認証データによる）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 1. 製造販売業者

アルケア株式会社

#### 2. 連絡先

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階  
お客様相談室：☎0120-770-175