

# ソフトナースシリーズ取扱説明書

このたびは、ソフトナースシリーズをお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。  
本製品のご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全に使用してください。  
また「取扱説明書」は必要なときに取り出しやすい場所に保管してください。

## ソフトナースシリーズ 製品一覧

製品名	製品サイズ
オーバーレイタイプ	
ソフトナース ピンク	幅 83cm×長さ 191cm×厚み 3cm
ソフトナース グレーピンク	幅 83cm×長さ 191cm×厚み 4cm
ソフトナース イエローピンク	幅 83cm×長さ 191cm×厚み 6cm
オペ台用	
ソフトナース オペ台 全身用	幅 50cm×長さ 190cm×厚み 6cm
ソフトナース オペ台 半身用	幅 50cm×長さ 95cm×厚み 6cm
車いす、座位用	
ソフトナース モデラートクッション	幅 40cm×奥行 40cm×厚み 6cm

## ご使用上の注意について



注意

万一ご使用中に少しでもご使用者の身体に発赤がみられるようであれば、  
医師または専門家にご相談ください。



注意

湿疹などのアレルギー症状が見られる場合には、直ちにご使用を中止してください。



注意

ソフトナースシリーズは、難燃性素材を使用しておりますが、日本で特別に難燃性  
試験を受けておりません。200℃以上で発火する可能性があります。

- 血液、体液、失禁などにより汚染された場合には、アルデヒド基（別名グルタール）、ホルマリン系で消毒し、さらに95℃までの温水で洗浄してください。  
また必要に応じてオートクレーブ（105℃）で滅菌してください。
- ソフトナースシリーズをご使用の際は、1～3ヶ月毎の洗浄をお勧めいたします。  
また汚染した場合には、その都度洗浄するようにしてください。
- 一般的にウレタンフォームは人体に無害であると考えられておりますが、幼児や子供が口に入れないように十分注意を払ってください。
- ウレタンフォーム上に気泡状の穴が見られる場合がありますが、これは製造上生じるものでソフトナースシリーズの特性を損なうものではありません。
- ソフトナースオペ台用は手術台の上敷きとしてご利用いただけますが、ベースマットレス 及びパッドの表面素材により、マットレス間のズレが生じることがございます。  
手術台での角度調整や体位変換時には、十分ご注意ください。

## 洗浄・消毒方法について

### 【オーバーレイタイプ、オペ台用本体、モデラートクッション本体】

- 洗濯機を使用される場合は、ぬるま湯に浸すことをお勧めします。柔らかくなりますので適度に絞った後、洗濯機へ入れてください。
- 95℃までの温水をご使用いただくことが可能です。
- 家庭用洗剤（中性洗剤）をご使用ください。
- 家庭用洗剤と一緒に柔軟剤のご使用もお勧めします。
- 洗濯ネットをご使用いただくことで本体への損傷を軽減します。
- 洗浄することによって変色していきますが、本来の機能を損なうものではありません。
- 塩素系漂白剤、塩素系洗剤を使用しますと変質しますので、ご使用は避けてください。
- オートクレーブ滅菌(105℃)が可能です。
- 消毒薬を使用する際は、随時弊社営業担当へご確認ください。

### 【オペ台用カバー】

- カバーを取り外す際には、ファスナーを破損しないようにご注意ください。
- ファスナーを閉じて洗浄してください。
- 家庭用洗剤（中性洗剤）をご使用ください。
- 95℃までの温水をご使用いただくことが可能です。
- アルコール溶液による清拭が可能です。（その他の消毒薬はお勧めしておりません）

### 【モデラートクッション用カバー】

- 40℃までの温水または水をご使用ください。
- 家庭用洗剤（中性洗剤）をご使用ください。
- 洗浄ネットをご使用になれば本体への損傷を軽減します。
- 手絞り不可。
- 乾燥機は使用できません。

## 使用方法について

### 【オーバーレイタイプ及びオペア台用】

- ピンクは凸凹のある面を上にして敷いてください。  
グレーピンクはピンク側、イエローピンクはイエロー側が上になります。  
(体圧分散を目的としない場合は、お好みの硬さの面を上にしても使用上問題はありません。)
- オーバーレイタイプはベッドマットレスの上に敷いてください。
- シーツをご使用の際は吸水性の高いものをお勧めいたします。
- 骨突出部位などの底付きのリスクのある方には、イエローピンクをお勧めいたします。

### 【モデラートクッション】

- ピンク側を上にしてご使用ください。
- カバーの表面、裏面を間違いないようにご使用ください。

販売元：

**アルケア株式会社**

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階  
〒130-0013 [www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お客様相談室

☎ 0120-770-175

輸入元：

**ラックヘルスケア株式会社**

〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-10-2 TEL:06-6244-0636

MADE IN DENMARK