

# トラックバンド

## Trac Band

スピードトラック用牽引バンド  
Traction Bandage

### 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

### はじめに

《トラックバンド》は牽引包帯《スピードトラック》専用の牽引バンドですので、《スピードトラック》以外の商品に使用しないでください。  
取り扱いについては必ず《スピードトラック》の添付文書を参照の上ご使用ください。

### 組成・成分表示

- 天然ゴム・綿

### 使用上のご注意

#### 警告

- 本品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。
- 装着部位に皮膚障害等（発疹、感覚過敏、開放創、血管不全、神経障害、腫脹等）のある患者には症状を悪化させるおそれがありますので絶対に使用しないでください。
- 使用の際は本品のゴムフォーム面を四肢の両側面に当て使用してください。逆に装着すると牽引中本品が外れるおそれがあります。
- 本品に破損、変形、汚染等がある場合は使用しないでください。牽引中本品が外れるおそれがあります。

### 廃棄方法

- 左記組成・成分に関する各自治体の判別方法に従ってください。

### 保管上のご注意

- 水濡れに注意し、直射日光および高温・多湿を避けて、室温保管してください。

# ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 www.alcare.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-770-175  
(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)