

リモイス® コート ハンディー

Remois Coat Handy

ノンアルコール性保護膜形成剤
Non-Alcoholic Skin Barrier Liquid



ALCARE

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

肌を刺激や汚れから保護する
うるおいのコート

販売元

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 www.alcare.co.jp

製造販売元

明星産商株式会社

高知県南国市岡豊町八幡411-1

お客様相談室 ☎ 0120-770-175
www.alcare.co.jp

化粧液

はじめに

《リモイスコート ハンディー》は皮膚に塗布するとマイクロ粒子からなる均一な保護膜を形成し、刺激や汚れなどから皮膚を守ります。また、テープ等の粘着剤との間に保護膜をすることで、剥離時の機械的刺激も低減します。保湿成分配合で、皮膚にうるおいを与えてなめらかに保ち、肌荒れを防ぎます。

安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせずこの取扱説明書に従いご使用ください。

使用上のご注意

⚠ 警告 人身事故につながるおそれのある注意事項


●皮膚に異常が生じていないかよく注意して使用してください。●傷や腫れ物、湿疹等、異常のある部位には使用しないでください。●使用中または使用後に日光にあたって発赤・はれ・かゆみ・刺激・色抜け（白斑等）・黒ずみ等の異常が生じた場合には、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。使い続けると悪化することがあります。●本品は可燃性の液体を含みます。ご使用の際は、通気の良い場所で使用し、火気、熱源に近づけないでください。静電気、火花にもご注意ください（引火のおそれがあります）。●目などの粘膜にコート液が付着しないように注意し、万が一付着してしまった場合は直ちに水またはぬるま湯でよく洗い流してください。●鼻や口から吸入しないように注意してください。●直射日光を避け、室温で保管してください。●乳幼児、小児の手の届かない所に保管してください。

注意 使用方法に含む注意事項

●上からテープ、電極等の粘着剤を貼付する場合は、その用途に適した固定力あるいは通電性が得られていることをご確認のうえご使用ください（商品の特性上、テープ等の粘着剤の固定力や通電性に影響を与える場合があります）。●1カ所に多量に塗布した場合、テープ等の固定力が弱くなることがありますので、使用方法をよくご確認のうえ塗布してください。●上から貼付するテープ等の粘着剤を交換する場合は、保護膜の効果を維持するため交換のたびに本品を皮膚に再塗布してください。●他のスキンケア用品（軟膏、クリームなど）と併用すると、保護膜の効果が著しく低下することがありますのでご注意ください。●失禁周囲に使用する場合は、保護膜の効果を維持するため頻りに塗布してください（排泄物の付着や皮膚同士の擦れ等により、保護膜の効果が弱まる場合があります）。●シートは水に溶けませんので、トイレには流さないでください。

使用方法

- 皮膚を清潔にし、乾燥させてからお使いください。
- アルミ包装を開ける前に、指でつまんで4～5回揉むように押してください。

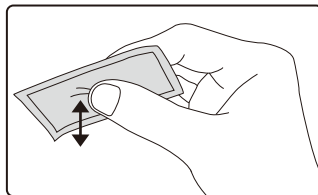

- アルミ包装を開け、シートを引き出し適応部位にむらなく塗布してください。

※10cm×10cm あたり1枚程度を目安にご使用ください。

※アルミ包装開封後、開封部を下に向けるとコート液が流れ出る場合がありますので、ご注意ください。

- 指やガーゼ等でこすらず、自然に乾燥させてください。

※テープ等の粘着剤を使用する場合は、本品が完全に乾いてからご使用ください。

販売名 リモイスコート ハンディーa

全成分 ジシロキサン、(アクリル酸アルキル/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチコン、(ジメチコン/PEG-10/15)クロスポリマー、香料

内容量 20枚入(1枚/1.7mL 6cm×9cm)