

スムーズリムーバー[®]

Smooth Remover

粘着剥離剤(非アルコール性)
Adhesive Remover (Alcohol Free)

はくり剤

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)

www.alcare.co.jp

はじめに

《スムーズリムーバー》は、粘着はくり剤です。ストーマ装具や粘着製品を皮膚から剥離しやすくし、剥離時の刺激を低減します。

安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従ってご使用ください。

なお、商品についてご不明な点は、お客様相談室までお問い合わせください。

使用上のご注意

*【使用上のご注意】では、その危険度に応じて次の区分をしております。

△警告……人身事故につながるおそれのある注意事項

注 意……物損事故につながるおそれのある注意事項

警告

- 本品は可燃性の液体を含みます。ご使用の際は、通気の良い場所で使用し、火気、熱源に近づけないでください。静電気、火花にもご注意ください。引火のおそれがあります。
- 傷や腫れ物、湿疹など、皮膚に異常のある部位には使用しないでください。
- 発赤やかゆみ、刺激などの異常が生じた場合には、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。使い続けると悪化することがあります。
- 目、鼻、口などに入らないように注意してください。万一入った場合は直ちに多量の水でよく洗い流し、医師にご相談ください。
- 廃棄の際は、中身を使い切ってから廃棄してください。


注意

- はくり液は揮発性が高いため、滴下ボトル使用後はキャップをしっかりと閉めてください。

使用方法

●滴下ボトル


- 1 ストーマ装具または粘着製品の端部にはくり液を滴下すると、端部を容易にめくり上げることができます。
- 2 皮膚と粘着剤の隙間にはくり液を滴下しながら剥離します。

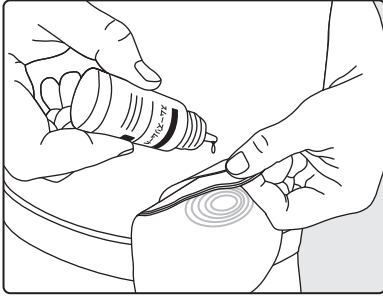

- 3 剥離後、皮膚表面に残ったはくり液はティッシュペーパーなどで除去してください。
- 4 ストーマ装具や粘着製品を貼付する場合は、はくり液が完全に乾いてからご使用ください。
- 5 使用後は、キャップをしっかり閉めて、箱に入れ、立てた状態で保管してください。

●ワイブシート

- 1 アルミパックの切り込み部より開封し、シートを手で取り出します。
※アルミパック開封後、開封部を下に向けてるとはくり液が流れ出る場合がありますので、ご注意ください。
- 2 ストーマ装具または粘着製品の端部からはくり液を染み込ませると、端部を容易にめくり上げることができます。
- 3 皮膚と粘着剤の隙間にはくり液を染み込ませながら剥離します。

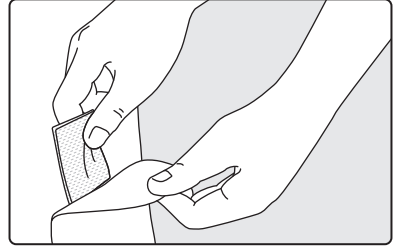

- 4 剥離後、皮膚表面に残ったはくり液はティッシュペーパーなどで除去してください。
- 5 ストーマ装具や粘着製品を貼付する場合は、はくり液が完全に乾いてからご使用ください。
※ワイブシートは1回使い切りタイプです。使用後は、捨ててください。
※ワイブシートは水に溶けませんので、トイレには流さないでください。

このような場合には

ストーマ装具や、粘着製品の一部分が皮膚に残った場合は、ティッシュペーパーなどにはくり液を含ませたもの、もしくは、新しいワイブシートで愛護的に拭き取ってください。

保管上のご注意

- 火気、直射日光を避け、室温で保管してください。
- 乳幼児、小児の手の届かない所に保管してください。

火気厳禁 第4類 第一石油類 危険等級II

成分：ヘキサメチルジシロキサン
脂肪酸エステル

規格

種類	商品コードNo.	内容量
滴下ボトル	19811	30mL×1本
ワイブシート (20枚入り)	19812	4mL×20枚
ワイブシート (50枚入り)	19813	4mL×50枚

※本品は未滅菌品です。

※ワイブシートは入数別でご用意しています。

ご購入の際は間違いないようお求めください。

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp