

組成・成分表示

- フェースプレート → ポリプロピレン
- ベルト本体 → ポリエステル・ポリウレタン・レーヨン
- 掛け具およびアジャスター → ナイロン

廃棄方法

- 上記組成・成分に関する各自治体の判別方法に従ってください。

保管上のご注意

- 水濡れに注意し、直射日光および高温・多湿を避けて、室温保管してください。

洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗い(押し洗い)をしてください。
- 漂白剤、アイロン、洗濯機の使用や、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後の乾燥は、陰干しにしてください。

種類と規格

固定ベルト

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		胴回(適応目安)	適応商品	
—	12671	60~110cm (穴径63mmφ)	セルケア1・TD(70を除く) セルケア1・C セルケア1・Dキャップ(70を除く) セルケア1・U プロケア1・D プロケア1・C プロケア1・U バイオクローズ バイオユーリンスーパー バイオユーリン	1セット

ユーケアー固定ベルト

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		胴回(適応目安)	適応商品	
—	15081	60~110cm (穴径73mmφ)	ユーケアー・TD ユーケアー・D ユーケアー・C ユーケアー・U イレファイン・TDフラット(60を除く) イレファイン・Dキャップフラット(60を除く) ポスパック・B ポスパック・ライト	1セット

ALCARE

つなぐ手あて、ひらくケア。

固定ベルト

Trunk Belt with Face Plate

ユーケアー®固定ベルト

Youcare Trunk Belt with Face Plate

ストーマ用装具固定具

Ostomy Appliance Stabilizer

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)

www.alcare.co.jp

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013

www.alcare.co.jp

2312-4

はじめに

《固定ベルト／ユーケアー固定ベルト》は、ストーマ用装具の密着性を高め、より安心してお使いいただくための補助固定具です。

安全にお使いいただくために、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。

使用上のご注意

*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。

△ 警告……人身事故につながるおそれのある注意事項

注 意……物損事故につながるおそれのある注意事項

警告


- 使用中、圧迫によって気分が悪くなったときは速やかに使用を中止し、医師または看護師にご相談ください。
- 使用中、または使用後に発疹、かゆみ、痛み、うっ血などの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師または看護師にご相談ください。

注意


- 適応商品以外には使用しないでください。思わぬ事故や破損につながる場合があります。
- 長期間の使用および使用状況によっては破損する場合がございます。破損した場合はただちに使用を中止してください。

種類と各部の名称


有効径50mmまでのワンピース装具をご使用の方

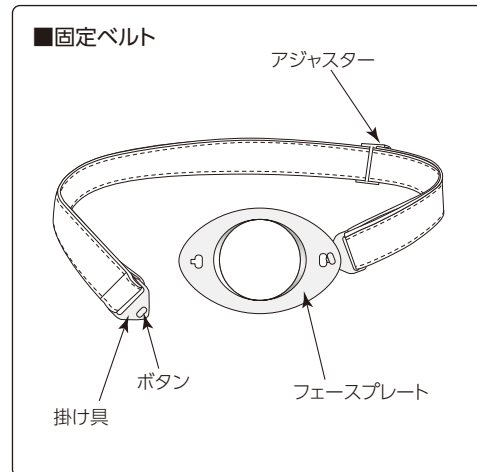


有効径60mmまでのワンピース装具をご使用の方

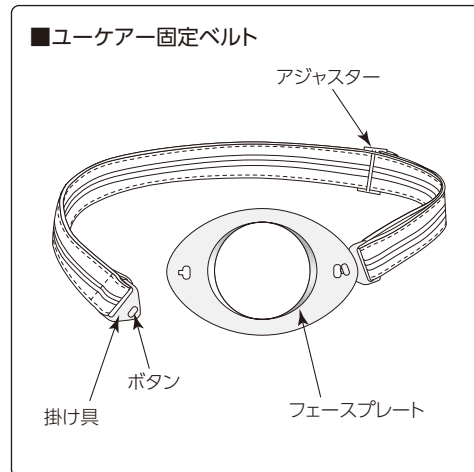


使用手順

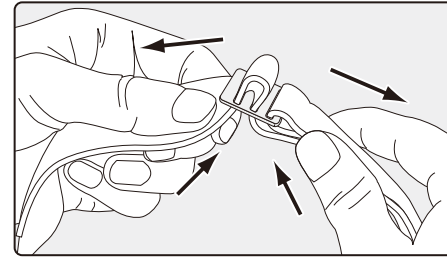


- ①ベルトのアジャスターを左右に移動させて、自分の胸回りに合うようベルトの長さを調整します。

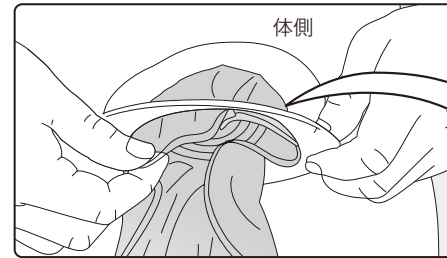


- ②最初にフェイスプレートの凸面を体側に向け、装着しているワンピース装具の袋部分を真ん中の穴から抜き出します。

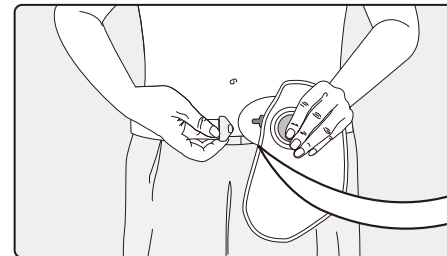

- ③フェイスプレートの穴の裏側から、掛け具のボタンを差し込み、外側にずらし固定します。

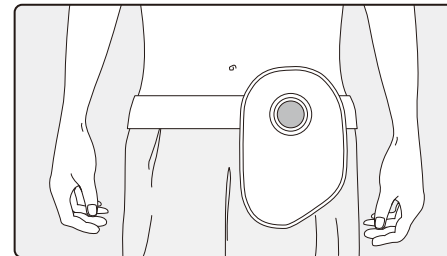

- ④ベルトが、なるべく水平になるように調整します。

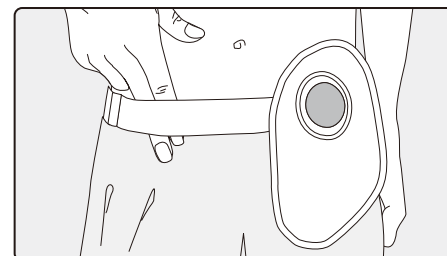

- ⑤きつすぎたり、ゆるすぎたりしないよう、長さを微調整します。(指が縦に2本入る程度が目安)