

消臭タイプ

やわらか ウエストチューブ・消臭



やわらかくフィットして
面板周囲の肌を保護

MediPro
Support
by
MediCure
メディキュア

オストメイト向け

男女兼用

日本製

GUNZE

消臭タイプ

やわらかウエストチューブ・消臭

MediPro Support by MediCure

GUNZE

消臭タイプ

- 繊維上の硫化水素・アンモニア臭の消臭効果を外部機関で確認しております。
- 消臭試験により効果は確認していますが、感じ方には個人差があります。
- 洗濯を重ねることにより、消臭効果は低減します。



サイズ	横幅	参考腹囲(着用目安)
S	26 (cm)	60~75 (cm)
M	28	70~85
L	30	80~95
LL	33	90~105
3L	35	100~115

※着用感は個人差があります。
※サイズは目安です。
※サイズ展開のないカラーもございます



ストーマ袋の装着例

アレンジできる

自分で
カットOK

快適な着ごこち

ふんわり
やさしい
肌ざわり

包み込むフィット感

ゴム
不使用

お取り扱いの注意

- 取扱い表示記号を参考に、お洗濯してください。
- 濃色物と白物との同時洗濯は、色移り、ケバ付着の原因となりますのでお避けください。
- 白物と色物との漬け置きは避け、洗濯後は速やかに形を整えて干してください。
- ポリウレタン繊維(腰ゴムなど)使用の場合は、塩素系漂白剤の使用はお避けください。劣化・変色をさせます。
- この製品は、生地端を裁ち切りで無縫製にしています。
- この無縫製の生地端は特殊加工でほつれにくい仕上げになっていますが、強く引っ張ったりしますと部分的にほつれた状態になることがあります。
- 着脱の際には生地端に強い力がかけられないようにご注意ください。

販売元 アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
〒130-0013 www.alcare.co.jp

お客様相談室

☎ 0120-770-175

製造元 グンゼ株式会社

このコードは当社管理用コードです。携帯サイトではありませんのでご注意ください。
NANP9108A

QR
コード



取扱説明書

ストーマ袋を 外側に出して 使う場合



① 位置決め

ストーマ袋を出す大きさに、上から下へ、マーカを使ってタテに線を引きます。これが生地をカットする線になります。



カット線

中央の
しるし



② 生地をカットする

脱いでから、カット線の中央に印を入れます。その印の上で生地を二つ折りにし、線に沿ってハサミでまっすぐに生地をカットします。



③ 着用する

着用すると、直線にカットしたところが自然に広がります(生地を丸くカットする必要はありません)。カットした穴からストーマ袋を出します。

ストーマ袋を 内側に入れて 使う場合



ストーマ袋を内側にしまう場合は、生地をカットする必要はありません。あらかじめストーマ袋に空気を少し入れておくとうれいでしょう。