


排尿方法

排尿口のレバーを下まで下げると排尿できます。排尿後はレバーを上まで戻してください。

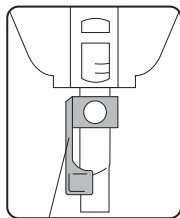

排出の状態

洗浄方法

毎日水洗いし、直射日光や強い熱を避け、陰干しにて乾燥してください。

規格

種類	商品コードNo.	規格 (容量)	1函入数
—	15371	500mL	5枚

for Best Care **ALCARE**

ユーケア[®]レッグバッグ Youcare Legbag

ウリナリーパウチ用レッグバッグ
Legbag for Urinary Pouch

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)

www.alcare.co.jp

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013

TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp

はじめに

《ユーケアーレッグバッグ》は、ウリナリーパウチ用のレッグバッグです。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせずこの取扱説明書に従いご使用ください。

使用上のご注意

- 本品は化学繊維を使用しています。化繊アレルギーの方はご使用にならないでください。
- 本品使用中に皮膚障害と思われる症状が認められた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置をしてください。
- 《ユーケアーレッグバッグ》には容量の目盛が表示されていますが、あくまでも目安です。正確な量を測定する際には、《ユーケアーレッグバッグ》の目盛は使用せず、別途計量器を使用してください。
- ご使用の際は、下部の排尿口が閉じていることを確認してください。排尿口が閉じていないと尿モレが起きます。
- ベルトはきつく締めすぎないでください(うっ血を起こさない程度)。
- コネクターチューブの長さを調整する場合は座った状態で行ってください。立った状態で長さを調整すると座った際に短くなり、チューブ外れなどによる尿モレの原因となります。
- 付属のコネクターチューブは当社のウリナリーパウチ専用です。当社以外のウリナリーパウチには接続できません。無理に接続した場合、尿モレの原因となります。
- ウリナリーパウチの接続は、パウチ内の尿がモレないようあらかじめ排尿し、空にしておくか排尿口を上に向け行ってください。

保管上のご注意


室温で保管し、高温多湿や直射日光があたる場所は避けてください。品質劣化の原因となります。

廃棄上のご注意



《ユーケアーレッグバッグ》は通常「燃えないゴミ」の扱いですが、地域により異なる場合がありますので、詳しくは各自自治体へご確認ください。

装着方法

- ①ベルトの緑色の面が表になるようにレッグバッグに通します。

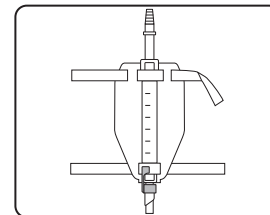


- ②下部の排尿口が閉じていることを確認し、レッグバッグの不織布面と肌が接するように、ベルトの面ファスナーで装着します。

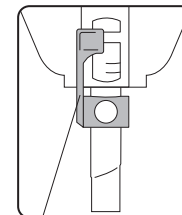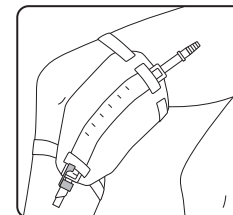


閉じている状態

- ③座った状態で、ウリナリーパウチと接続するコネクターチューブの長さをハサミを用いて調整します。

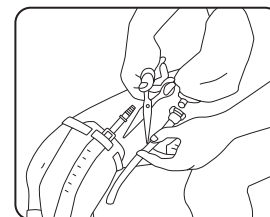

- ④レッグバッグの上部にコネクターチューブを接続します。なるべく奥まで差し込んでください。

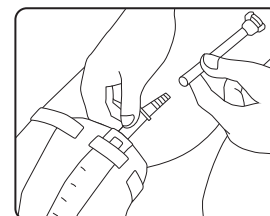

- ⑤ウリナリーパウチの排尿口を上に向けた状態で、コネクターチューブのコネクター部を排尿口へ“カチッ”と音がするまで強く押し込みます。

