

やわらかウエストショーツ・やわらかウエストチューブ活用法シート

1 面板の貼付位置に切れ目を入れ、
ストーマ袋を外に出す。



※写真はやわらかウエストチューブを半分にカットして使用

装具やベルトの 肌あたり軽減	装具の目隠し	装具の支え
○	—	—
チューブ	ショーツ	

2 面板の貼付位置に切れ目を入れて
ストーマ袋を外に出し、下側から折り返す。



※写真はやわらかウエストチューブを半分にカットして使用

装具やベルトの 肌あたり軽減	装具の目隠し	装具の支え
○	○	○
	チューブ	

3 面板の貼付位置に切れ目を入れて
ストーマ袋を出し、上側と下側から折り返す。



※やわらかウエストチューブ1枚使用

装具やベルトの 肌あたり軽減	装具の目隠し	装具の支え
○	◎	○
	チューブ	

4 傍ストーマ固定ベルトを着用する前に、
下巻きとして着用する。



※写真はやわらかウエストチューブ(半分カット)の上から傍ストーマ固定ベルト(ワラストーマベルト)を着用。傍ストーマ固定ベルト着用部にシワが出来ないようにご注意ください。

装具やベルトの 肌あたり軽減	装具の目隠し	装具の支え
○	○*1	○*1
	チューブ	ショーツ

*1 チューブを使用して下側から折り返した場合のみ

5 装具貼付位置に切れ目を入れてストーマ
袋を外に出し、上側から折り返す。



※写真はやわらかウエストショーツを使用

装具やベルトの 肌あたり軽減	装具の目隠し	装具の支え
○	○	—
チューブ	ショーツ	

6 ストーマ装具の口具の位置に切れ目を入れ、
口具だけ外に出す。



※写真はやわらかウエストショーツを使用

装具やベルトの 肌あたり軽減	装具の目隠し	装具の支え
○	○	○
チューブ	ショーツ	

7 やわらかウエストチューブを着用してストーマ袋を外に出し、
その上からやわらかウエストショーツを着用する。



装具やベルトの 肌あたり軽減	装具の目隠し	装具の支え
○	◎	○
	チューブ (ショーツと併用)	ショーツ (チューブと併用)

- 装具の目隠しをする際は、あらかじめストーマ袋に空気を入れておくとよいでしょう。
- チューブ ショーツ は適用する商品を示しています。
- 胴ベルトを併用する場合、胴ベルトを締め付けすぎないようにご注意ください。