


取扱上のご注意

- 廃棄方法** ●本品を廃棄する場合は、各自治体の廃棄区分に従ってください。
- 保管方法** ●本品を保管する際は、車中など高温になる場所や低温になる場所、暖房器具の熱などが直接あたる場所などには置かないでください。
●水濡れに注意し、直射日光を避けて、室温保管してください。
- 洗濯方法** ●洗濯する前に、本体からステータを取り出します。
●30℃以下で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
●他のものと一緒に洗濯することは避けてください。
●漂白剤、柔軟剤、洗濯機、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
●洗濯後は陰干ししてください。
●洗濯後は取り外したステータを正しく戻してください。
●本品が完全に乾いてから装着してください。面ファスナーは濡れた状態でとめると、外れるおそれがあります。
- 品質表示** ●本 体：ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリアセタール
●ステータ：アルミ

ステータの取り外し方・戻し方

① 抜け防止カバーをめくって、ステータポケットからステータを取り出します。
② ステータをステータポケットに戻す際にポケット内に完全に入れ込み、抜け防止カバーをかぶせてください。

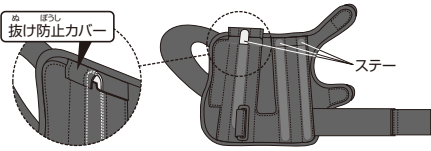

種類と規格

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数
		手首周囲	甲周囲	
右	20671	12~16cm	14~19cm	1コ
左	20681	12~16cm	14~19cm	1コ



図のように手首周囲と甲周囲の2ヶ所を測ってください。

ケアプラス・ジュニア手首 Care Plus-Junior Wrist

子ども向け手首サポーター
Wrist Support for Children

取扱説明書

- 保護者の方は、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからお子様へ説明してください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175
(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)
www.alcare.co.jp



アルケア株式会社
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

はじめに

《ケアプラス・ジュニア手首》は、小学校高学年以上を対象に、手首へ使用する商品です。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

使用上のご注意

*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分にしております。


⚠ 警告 人身事故につながるおそれのある注意事項

- 本品の使用に際しては、取扱説明書をよくお読みになつたうえ、必ず医師などの医療従事者は使用される方へ適正使用のための説明、指導をしてください。また使用される方は、医療従事者の指示、指導に従って本品を使用してください。
- 本品に使用している素材に対してアレルギー体質や過敏な方、皮膚に傷、腫れ、湿疹、炎症のある方は使用しないでください。
- 本品を使用中に、痛み、しびれ、皮膚障害などの異常が生じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 本品に破損や縫製のほつれなどの不具合がある場合は使用しないでください。
- 本品の使用中にスレやゆがみが生じた場合、正しく装着し直してください。スレやゆがみがあると本品の正しい機能が得られない可能性があります。
- 面ファスナーが汗や水で濡れた状態で使用しないでください。面ファスナーは濡れた状態だとめると外れるおそれがあります。
- ベルトやストラップなどを過度に締めつけて使用しないようご注意ください。
- 面ファスナー、ステーなどにより過度の圧迫やあたりがないことを確認してください。
- 入浴時や就寝時には装着しないでください。
- 本品を本人以外の方へ使用することはおやめください。
- 使用期限(パッケージに表示)を過ぎた商品は使用しないでください。

注意 物損事故につながるおそれのある注意事項

- 本品を修正・加工して使用しないでください。
- 面ファスナーのフックで傷つけるおそれがありますので衣服などにつかないように本品を装着してください。
- ステーがステーポケットから飛び出した場合、衣服などを傷つけるおそれがありますので、ステーがステーポケット内に入っている状態で本品を使用してください。
- 本品は汗などの水滴れや摩擦により色落ちが生じるおそれがあります。衣料品などと一緒使用する場合は、色移りにご注意ください。

かぶ めいしやう 各部の名称

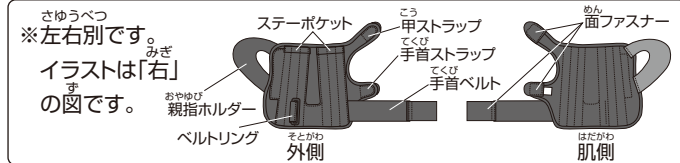


しょう てしゆん 使用手順

さゆうべつ
※左右別です。イラストは「右手首」への装着の図です。

- ① 本体から、面ファスナーを外します。親指ホルダーに通し、本体を適度に引っ張りながら、手首に巻きつけます。



- ② ①甲ストラップを手の甲に回して面ファスナーをとめます。
- ③ ②手首ストラップを親指の下から回して面ファスナーをとめます。
- ④ ③手首ベルトをベルトリングに通して折り返し、面ファスナーをとめます。

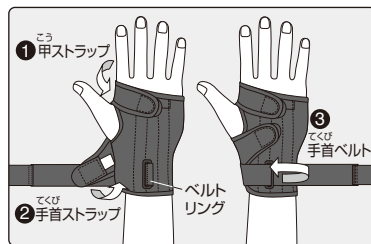

- ※装着できましたら、装着位置を確認してください。正しく装着されていない場合は、装着し直してください。
- ※締めつけすぎで痛みなどがある場合は、本品をスレ落ちない程度にゆるめてください。
- ※ステーの調整が必要な場合は、医療従事者に相談してください。

そうちゃくす 装着図

さゆうべつ
※左右別です。イラストは「右手首」への装着の図です。

