

はじめに

《フィットキュア・スパイン》は、脊椎の骨折等における支持、固定を目的に開発されています。ご使用に際しては、必ず医療従事者の指導に従ってください。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、本取扱説明書に従いご使用ください。商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

使用上のご注意

※[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。
△ 警告……人身事故につながるおそれのある注意事項
注 意……物損事故につながるおそれのある注意事項

警告

- 本品のキャストステーの入替、ベルトの締め加減、装着位置、装着時間、装着期間、取り外し等に関しては、医療従事者の指導に従ってください。
- 本品をご使用の際は、必ず肌着等の上から装着してください。(下着の金具等に過度な圧迫がかからないようにしてください。)
- キャストステーは専用のステーカバーにて使用し、単体では使用しないでください。
- 使用中にズレやゆるみが生じた場合は、正しく装着し直してください。
- 本品の使用中に下記のような現象が発生した場合は、必ず医療従事者の指導に従ってください。
 - 痛み、しびれ、かぶれ、ムシなどの異常や違和感が発生した場合
 - ゆるみもしくは過度の圧迫感がある場合(装着をやり直しても解決しない場合)
 - 長期間の使用や使用状況により、面ファスナーの接着力が低下したり、ステーカバー・キャストステーが破損した場合
- 本品は化繊素材を使用しています。アレルギー体質の方や、皮膚に傷、腫れ、湿疹、炎症のある方は使用しないでください。
- 面ファスナーは表面が鋭利なため、手や指、衣服など柔らかいものが傷つくおそれがあります。
- 本品を装着したまま、激しい運動をしないでください。キャストステーが破損することがあります。
- キャストステーを踏みつける等の強い衝撃を加えないでください。破損することがあります。
- キャストステーの被覆材を剥がさないでください。

注意

- 面ファスナーが衣服に付かないように本品を装着してください。
- 硬質のステーを使用しているため、洗濯機や乾燥機の使用を避けてください。本品が破損したり、洗濯機や乾燥機が故障する場合があります。(「洗濯方法」をご参照ください。)

取扱上のご注意

廃棄方法

- 本品を廃棄する場合は、各自治体の廃棄区分に従ってください。

保管方法

- 水濡れ、直射日光および高温多湿を避けて、室温で保管してください。

洗濯方法

(ステーカバー)

- 必ずキャストステーを取り出し、中性洗剤を使用し、30℃以下の水で手洗いしてください。
- 漂白剤、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は陰干しし、十分に乾燥させてからご使用ください。
- 洗濯乾燥後は、使用手順を参考に、キャストステーを挿入してご使用ください。

品質表示

- 素材

キャストステー：(芯材層)ガラス繊維編物、水硬化性ポリウレタン樹脂
(被覆層)ポリエステル不織布、ポリエチレン
(水 袋)アルミ、精製水、ブチレングリコール、パラオキシ安息香酸メチルナトリウム
ステーカバー：ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、ポリアセタール

種類	商品コードNo.	規格			セット内容	入数
		腰回	胸囲			
LL	19921	103～124cm	84～106cm			
L	19922	92～108cm	80～100cm	キャストステー：1枚	1セット/面	
M	19923	82～ 97cm	74～ 92cm	ステーカバー：1コ		
S	19924	71～ 84cm	66～ 83cm			

種類と規格

for Best Care

ALCARE

フィットキュア・スパイン Fit Cure-Spine

カバー付きキャストイングシステム Casting System With Cover

取扱説明書

使用者向け

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- この取扱説明書は、常にお手元に置き、必要に応じてお読みください。
- 本品を適切に装着できるように、必ず医療従事者の指導に従ってください。
- 本品の設定を変更する場合は、必ず医療従事者に実施してもらってください。

一般医療機器
ギプス包帯
医療機器届出番号：13B1X00207000065

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)


www.alcare.co.jp

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

各部の名称

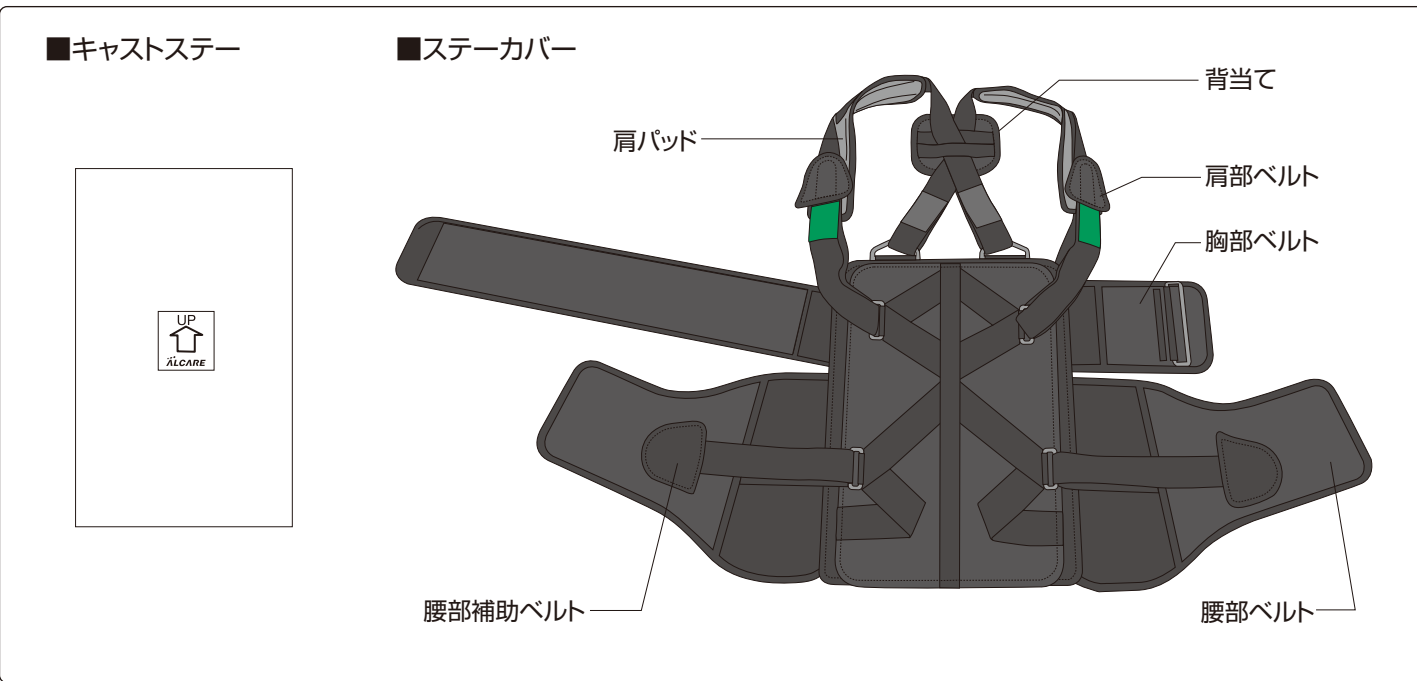


製品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それにより、イラストと実際の製品とで若干の違いが生じる場合がございますことをご了承ください。

設置手順

キャストステー設置方法 ※キャストステーを外した場合には設置してください。

- 1 右側の腰部補助ベルトを外し、ステーカー背部側面の面ファスナーを開けます。
- 2 キャストステーの印字してある面を外側に、「UP↑ALCARE」が上(肩部ベルト側)になるように挿入してください。
- 3 ステーカー背部側面の面ファスナーを閉じます。

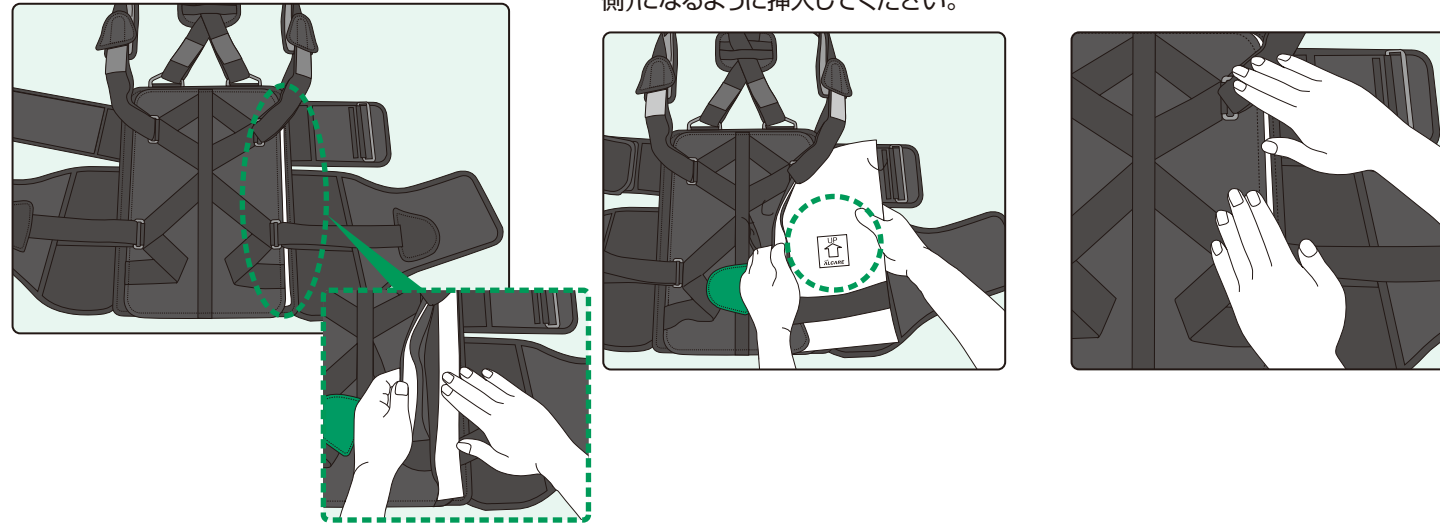


使用手順

ステーカー装着方法


※必ずキャストステーをステーカーに入れた状態で装着してください。

※肩部ベルトとステーカーの接合する面ファスナーは操作しないでください。(肩部ベルトの長さを調整したい場合や、誤って外してしまった場合は、医療従事者の指導に従ってください。)

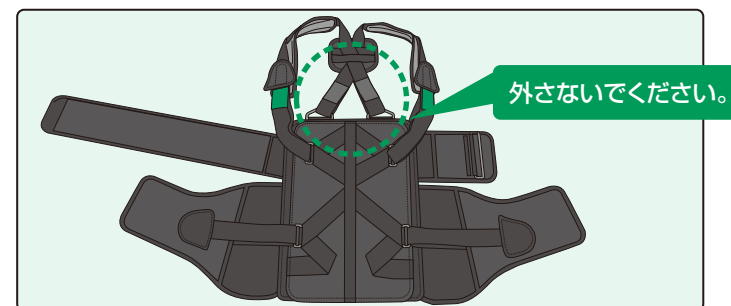


使用手順

- 1 肩部パッドのベルト側が外側になるように肩部ベルトをかけます。

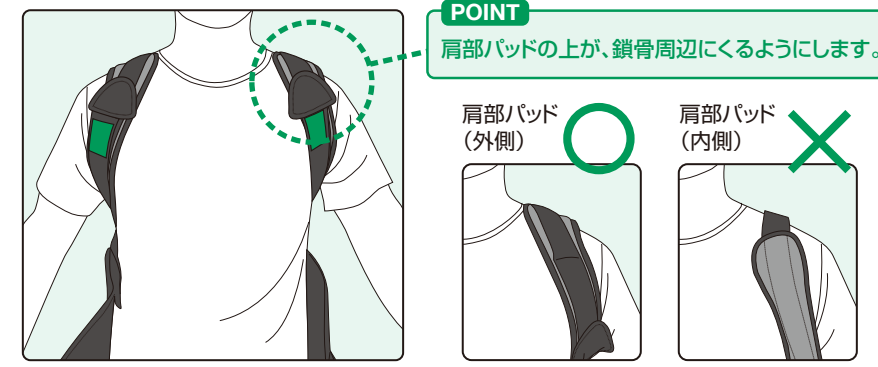

- 2 胸部ベルトを右側のコカンに通して折り返し、胸部前方で仮とめをします。(女性の場合、下着の金具等により圧迫がかからないようにしてください。)

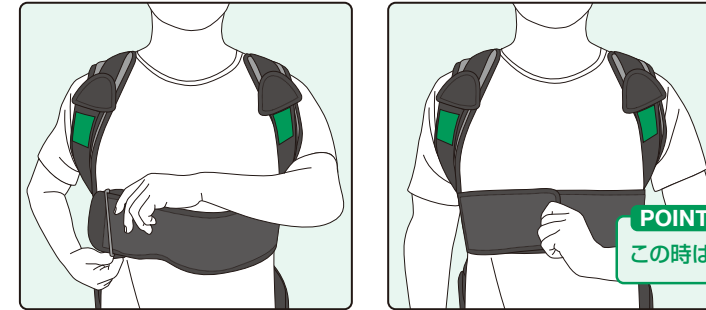


- 3 腰部ベルトの重なりの上端がへその少し上あたりにくるようにとめます。



POINT
腰部ベルトをとめる前に、腰部補助ベルトを外してください。


POINT
この時は仮とめになります。

- 4 腰部補助ベルトを腰部前方でとめます。

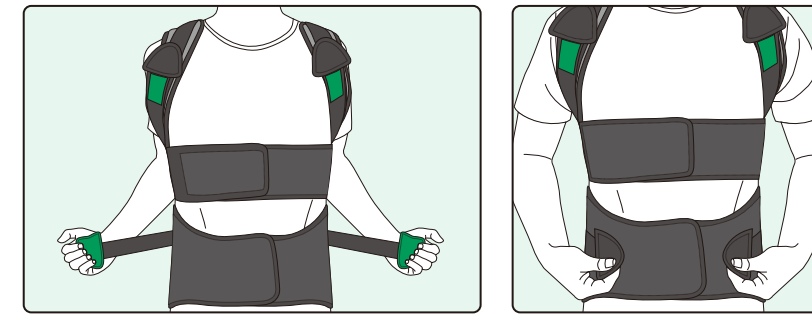


- 5 2で仮とめをした胸部ベルトをしっかりとめなおします。

POINT
胸部ベルトはここでしっかりとめます。

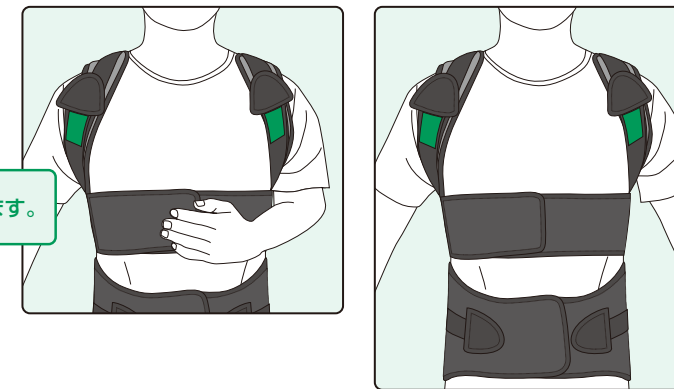


- 6 肩部ベルトの持ち手を外し、前方にひっぱり、胸部前方でとめます。

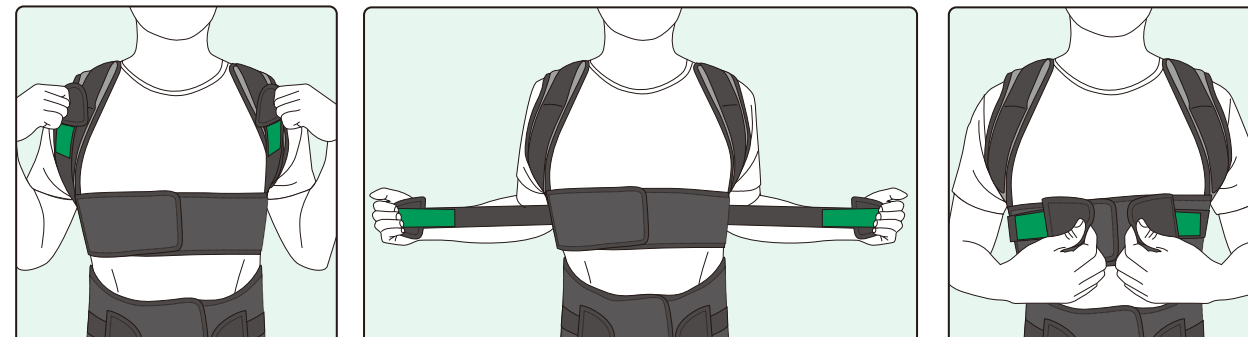

装着図


- ステーカーと肩パッドの距離が短い場合には背当てを外して使用します。(医療従事者の指導に従ってください。)

(前方)

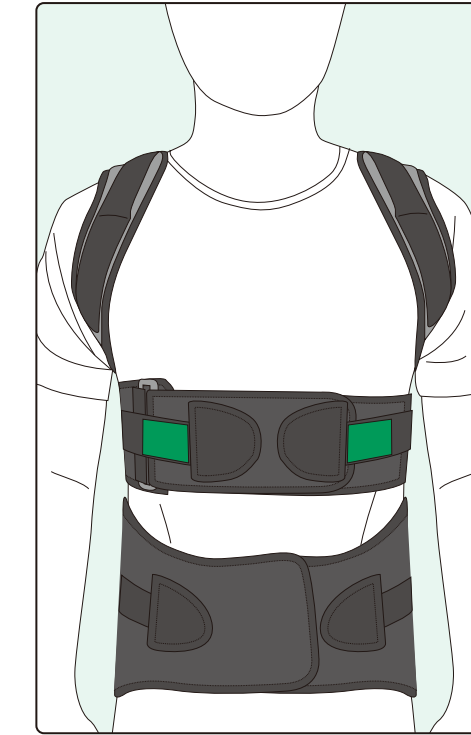


(後方)

背当てを付けた状態

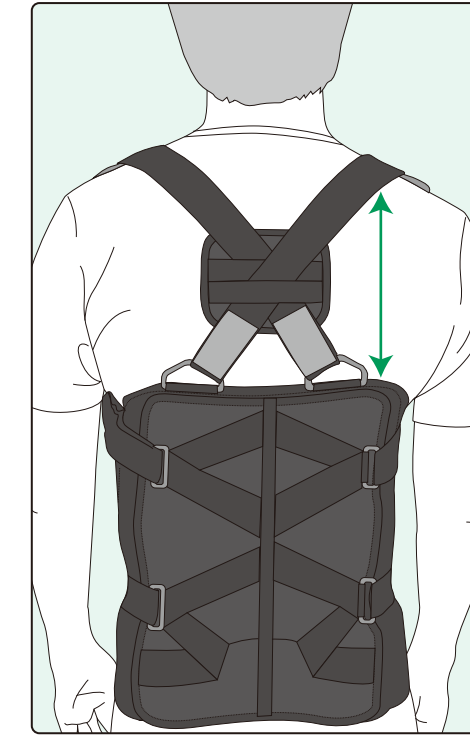

背当てを外した状態

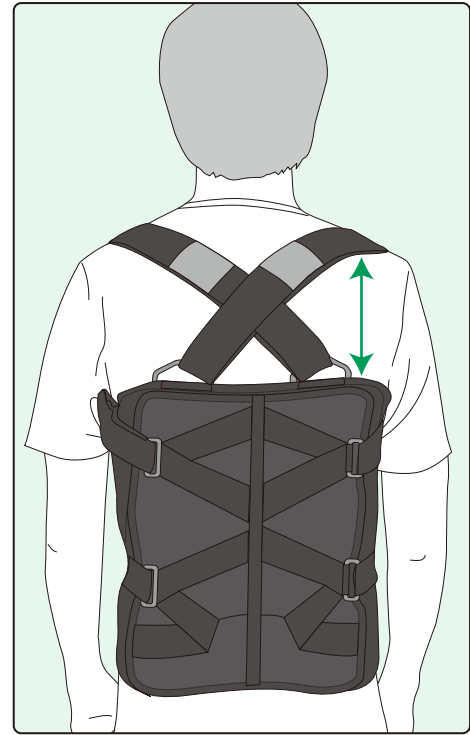

※必ずキャストステーを設置して装着してください。

外し方

まず肩部ベルトを外し肩パッドへつけてから、各ベルトを外してください。

