

使用手順


装着の前に

注意


- 医師の指示により着脱が許可された場合に、医師の指導および手順に従って正しく装着してください。

(装着準備)はじめに、腰部ベルト、胸部ベルトを外しておきます。

- ※ 本品を広げ、肩部ベルトがねじれていないことを確認します。
- ※ 装着しづらい場合は、鏡を見ながら行ってください。

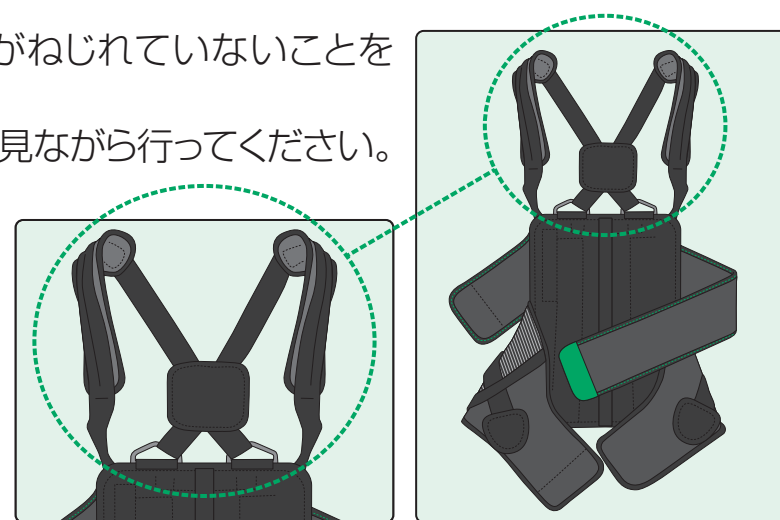


- 肩部ベルトに片腕ずつ腕を通します。

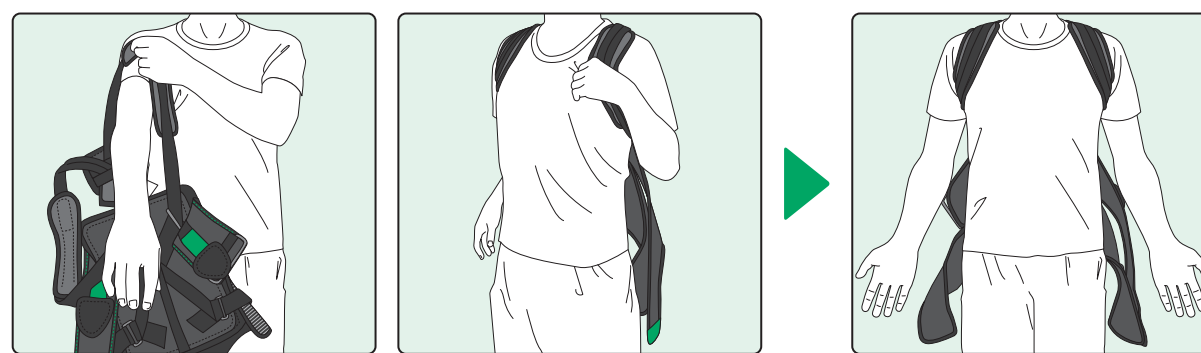

POINT

肩パッドの位置ずれ、めくれがないことを確認します。

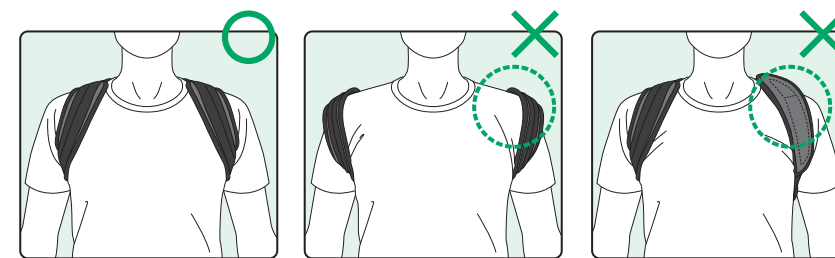


正しい状態

位置がずれている状態


パッドがめくれている状態

- ① 腰部ベルトをとめます。

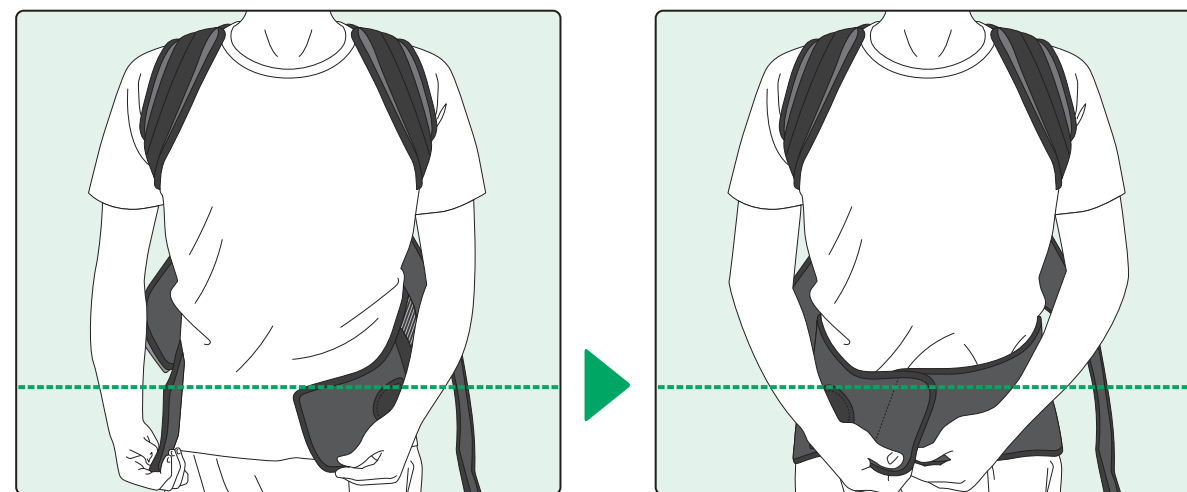


ベルトの上端は、へそ(点線)よりも少し上あたりでとめます。

- ② 腰部補助ベルトをとめます。

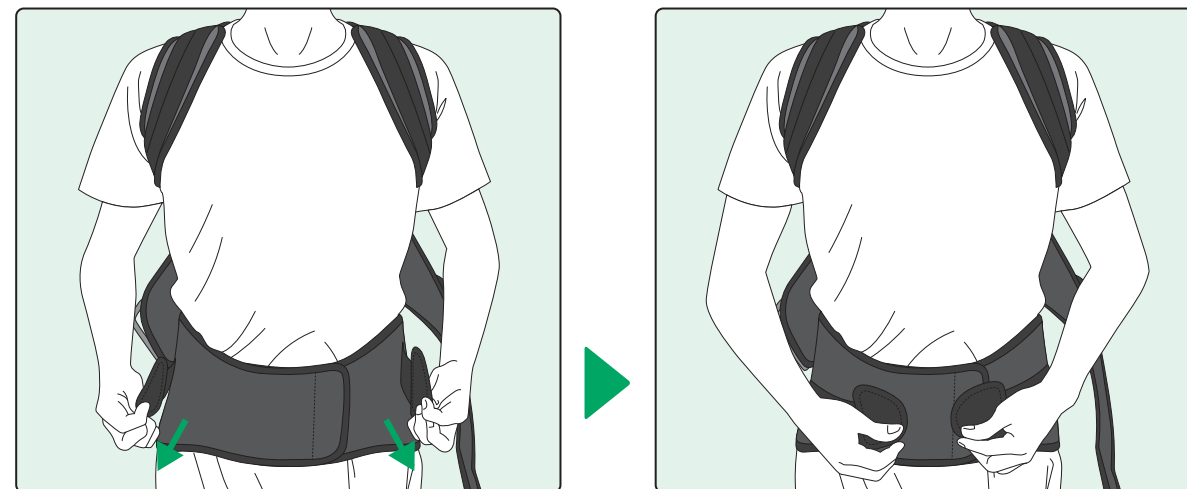

前方に引っ張るようにしてとめます。

- ③ 胸部ベルトをとめます。

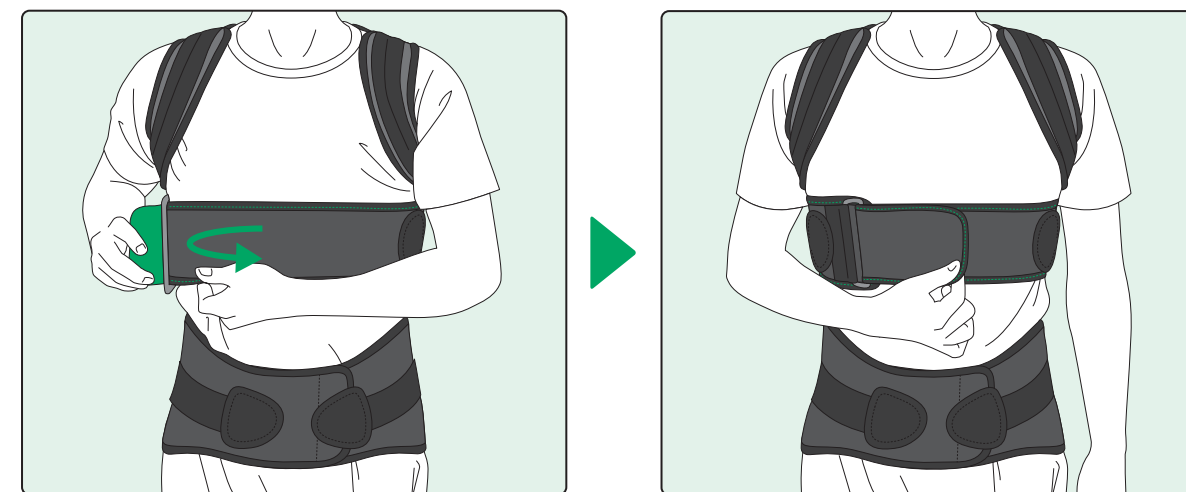


ベルトをコカンに通し、折り返してとめます。

注意

- 胸部ベルトの下端は、腹部まで下がらないようにしてください。
- 女性の場合、下着の金具などによる圧迫がかからないようにしてください。

- ④ 胸部補助ベルトをとめます。

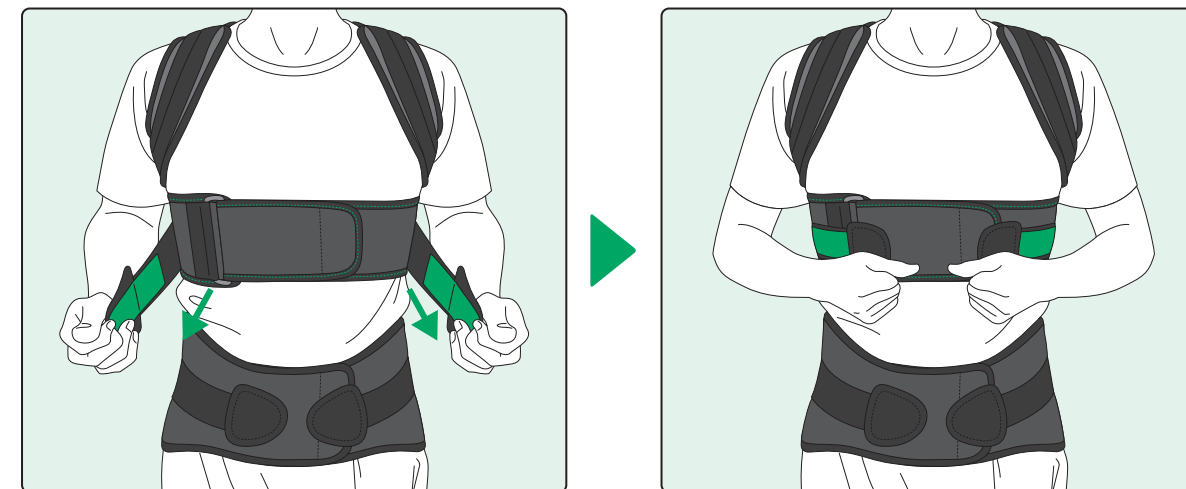

前方に引っ張るようにしてとめます。


※ 装着位置が正しいこと、局所的な過度の圧迫や食い込み、あたりなどが無いことを確認します。

※ ベルトの面ファスナーは締め付けすぎたり、ゆるすぎたりしないように調整した後、しっかりとめてください。

外し方

本品を外す際は、④→③→②→①の順にこの4カ所のみを外してください。

- ④ 胸部補助ベルト ③ 胸部ベルト ② 腰部補助ベルト ① 腰部ベルト

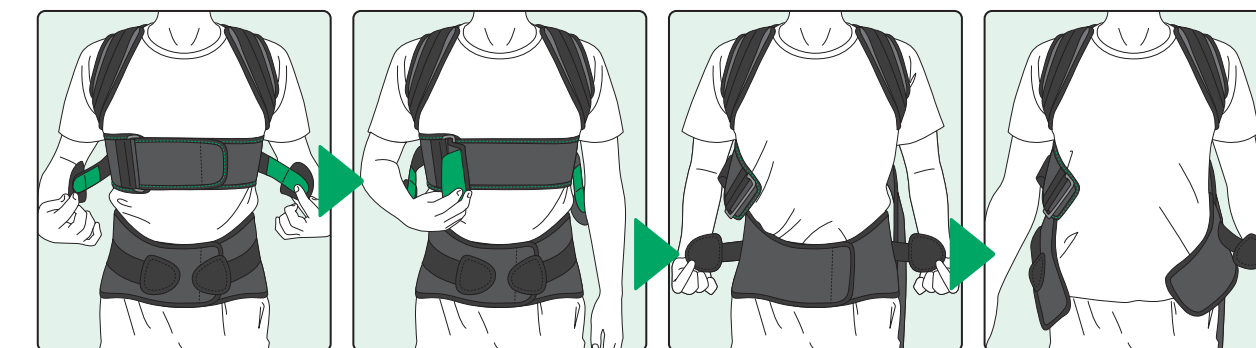


キャストステーの取り出し・挿入方法

- 本品のキャストステーポケットにはキャストステー(固定するギプス)が入っています。
 - 本品を洗濯する場合、洗濯前には必ずキャストステーを取り出し、洗濯後にはキャストステーをキャストステーポケットに挿入します。「洗濯方法」を参照してください。
 - キャストステーポケットの面ファスナーを外し、ポケットを開放します。
 - 洗濯後の再使用時には、必ずキャストステーをステーポケットの奥まで入れ、面ファスナーを閉め、装着を行ってください。
- ※ キャストステーには上下・表裏があります。必ず図に従って挿入してください。

POINT

ポケット側の胸部補助ベルトを上端まで、腰部補助ベルトを下端まで位置をずらしてポケットを開放します。

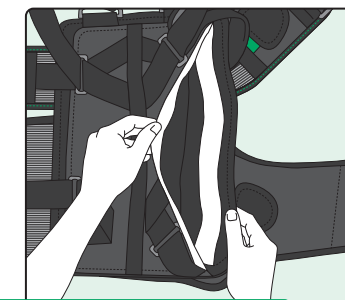

注意

「UP↑ALCARE」と印字されている面を上に向け、矢印の方向が肩部ベルト側になります。

