

# フィットキュア・スパイン Fit Cure-Spine

## クイックマニュアル 使用者向け

●必ず医療従事者の指示・指導のもとに、ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してから正しく装着してください。



使用手順動画 ▶  
<http://www.alcare.co.jp/s/fc3>

操作ベルト箇所を、色でご確認して装着してください。



※必ずキャストステーを設置して装着してください。

一般医療機器 / 単回使用医療機器  
ギブス包帯  
医療機器届出番号: 13B1X00207000065

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)

[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

0220

### 使用手順


1



肩部ベルトがねじれていない事を確認します。肩部ベルトに片腕ずつ腕を通します。

2

腰部ベルトをとめます。

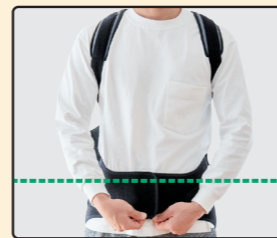

ベルトの上端は、へそ(点線)よりも少し上あたりでとめます。

3

腰部補助ベルトを前方に引っ張るようにしてとめます。



4

胸部ベルトをとめます。



胸部補助ベルトを外し、胸部ベルトをコカンに通し、折り返してとめます。

5

胸部補助ベルト前方に引っ張るようにしてとめます。



### 装着図

前方



後方



背当ては取らないでください

### 外し方

