

# フィットキュア・スパイン Fit Cure-Spine


## クイックマニュアル 使用者向け

●必ず医療従事者の指示・指導のもとに、ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してから正しく装着してください。



使用手順動画 ▶  
<http://www.alcare.co.jp/s/fc3>

操作ベルト箇所を、色でご確認して装着してください。

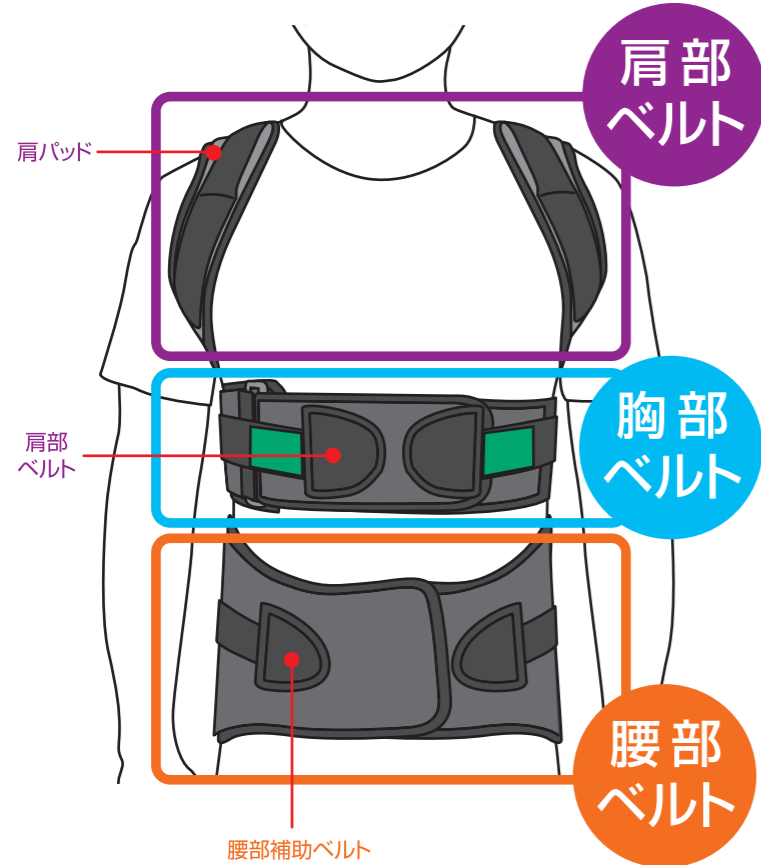

※必ずキャストステーを設置して装着してください。

一般医療機器 / 単回使用医療機器  
ギブス包帯  
医療機器届出番号: 13B1X00207000065


お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)


[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

### 使用手順

**1** 装着前に、肩部ベルトに持ち手が付いていることを確認してください。肩パッドのベルト側が外側になるように、肩パッドの上が鎖骨周辺になるように肩部ベルトをかけます。

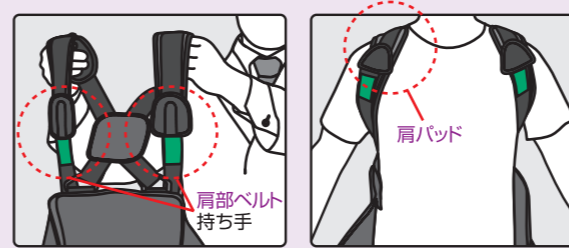


**2** 胸部ベルトを右側のコカンに通して折り返し、胸部前方で仮とめをします。(女性の場合、下着の金具等により圧迫がかからないようにしてください。)

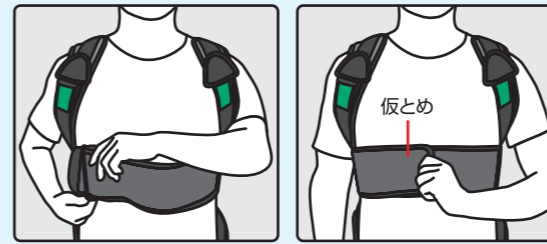


**3** 腰部補助ベルトを外し、腰部ベルトの重なりの上端がへその少し上あたりになるように腰部ベルトをとめます。




**4** 腰部補助ベルトを腰部前方でとめます。

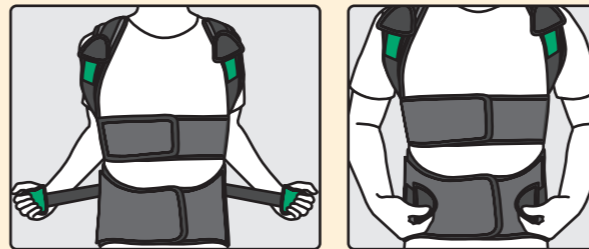

**5** **2**で仮とめをした胸部ベルトをしっかりとめなおします。

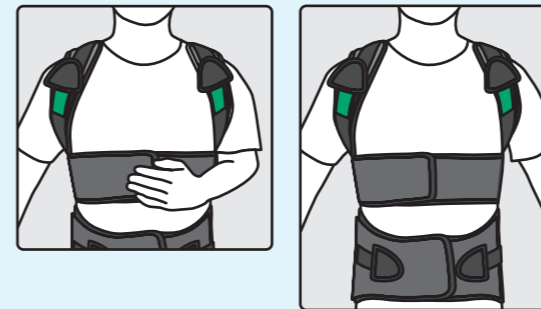


**6** 肩部ベルトの持ち手を外し、前方にひっぱり、胸部前方でとめます。

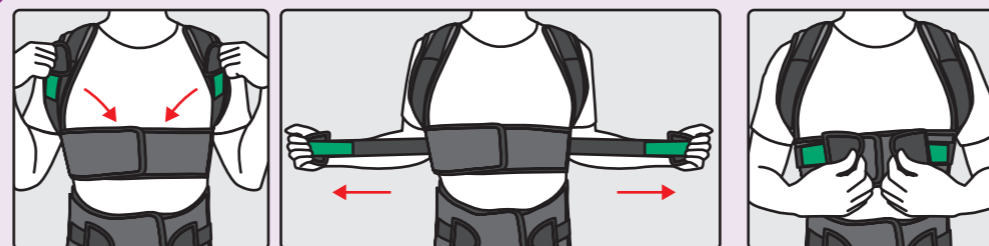


### 装着図

#### 前方

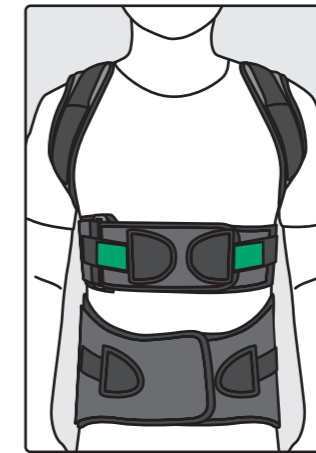

#### 後方

●ステーカバーと肩パッドの距離が短い場合には背当てを外して使用します。(医療従事者の指導に従ってください。)

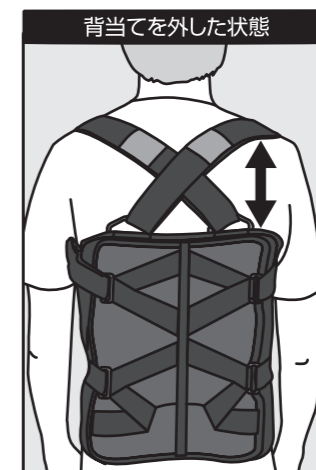

### 外し方

●まず肩部ベルトを外し肩パッドにつけてから、各ベルトを外してください。

