


「クイックフィックス®・N」 使用ガイド

クイックフィックス・Nは、経鼻カテーテルを固定する際に使用するカテーテル固定補助テープです。
この使用ガイドをご参照いただき正しくご使用ください。

クイックフィックス®・N

経鼻カテーテル専用

種類	商品コード No.	適応 カテーテルサイズ
N2号	20361	18Fr以下

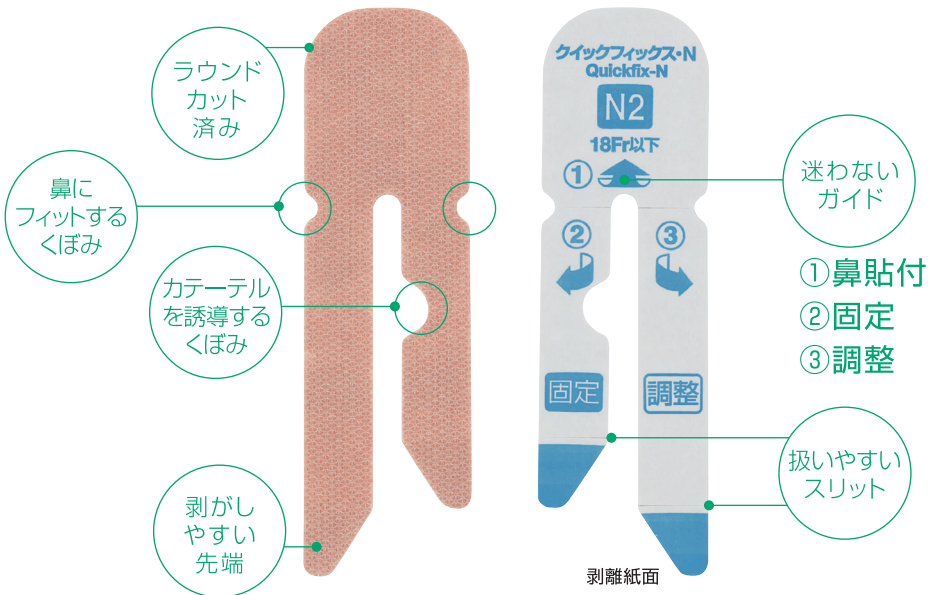

新しく追加になった 「調整」の役割



カテーテルを適切な位置に調整・維持させることが目的です。「調整」でカテーテルが鼻翼にあたらないように、適宜調整します。

固定例



Point

経鼻カテーテル固定時の注意点

患者さんの指などによる引っ掛けをしないように、自己抜去に配慮した固定にします。

- カテーテルが口の前を通らないようにします。
- 鼻～頬固定の間がゆるまないようにします。
- 患者さんの視界にカテーテルが入らないように注意します。



クイックフィックス®・N 使用手順



1



剥離紙①

鼻貼付

①の剥離紙を剥がし、鼻部に貼付します。

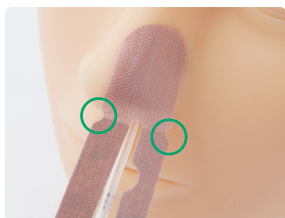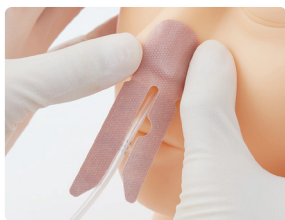



テープ両端のくぼみが皮膚に触れない位置で貼ります。

2



剥離紙②
固定

剥離紙②「固定」を剥がし、カテーテル下側からくぼみに沿わせ、巻きつけるように固定します。

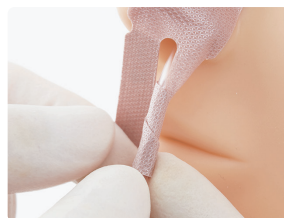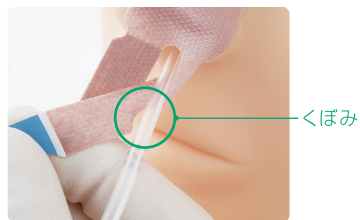


3



剥離紙③
調整


剥離紙③「調整」を剥がし、カテーテルの下側から通して、鼻部テープ上に固定します。

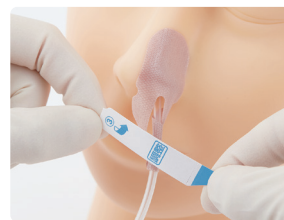

Point



カテーテルが鼻翼にあたらぬように、調整します。

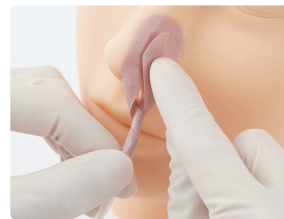


4

ルート部をクイックフィックスまたは粘着テープで固定してください。



完成

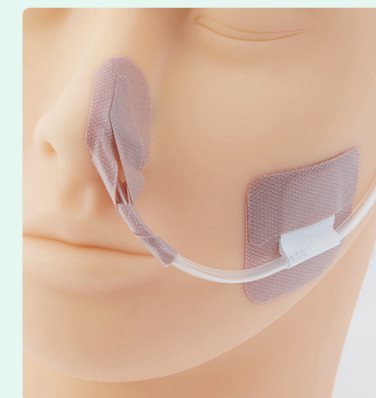

使用手順、動画もご参照ください。

クイックフィックス・N



<http://www.alcare.co.jp/s/qfn>