

# キャストシュー®

## Castshoe

歩行用キャストカバー  
Walking Cast Cover

### 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。


### はじめに

《キャストシュー》は、足関節などに巻いたキャスト材を保護し、屋内または屋外での歩行による汚れを防ぐ製品です。

強い衝撃を吸収するための製品ではありません。ご使用にあたっては、必ず医師にご相談のうえ正しくお使いください。

また、安全にご使用いただくため用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。

### 製品概観図

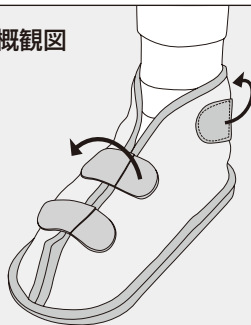

### 種類と規格

| 種類 | 商品コードNo. | 規格          |        | 1箱入数 |
|----|----------|-------------|--------|------|
|    |          | 足長(目安)      | 全長(内寸) |      |
| LL | 17551    | 26.5~29.5cm | 32.0cm | 1コ   |
| L  | 17552    | 24.5~26.5cm | 28.0cm | 1コ   |
| M  | 17553    | 22.5~24.5cm | 26.0cm | 1コ   |
| S  | 17554    | 20.5~22.5cm | 24.0cm | 1コ   |

※サイズは、規格の「足長」を目安とし、ご自分の足のサイズに合わせてお選びください。

※2つのサイズにまたがる場合には、大きいサイズをお選びください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)

www.alcare.co.jp

## 使用上のご注意

\* [使用上のご注意] では、その危険度に応じて次の区分をしております。

### 警告 人身事故につながるおそれのある注意事項

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は単回使用製品です。1名に使用した本品は、再使用しないでください。
- 使用中、または使用後に発疹、かゆみ、痛み、うっ血などの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 本体にたるみがないように装着してください。
- 本品が破損・変形したり、著しく汚れた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本体に面ファスナーがしっかりとまっていること、また本体が抜け落ちないことを確認してからご使用ください。
- 雨天時における屋外での使用や濡れた床での使用は、滑りやすく転倒するおそれがありますのでご注意ください。
- 適切なサイズをお選びのうえご使用ください。サイズが合っていない場合、転倒などのおそれがありますのでご注意ください。
- 固定材の種類、手技、足関節の肢位によっては本品を装着できない場合があります。医師に相談されるか、装着をお試しのうえでご購入ください。

### 注意 物損事故につながるおそれのある注意事項

- 本品が水に濡れた場合は、よく乾かしてからご使用ください。
- キャスト材が十分に硬化してからご使用ください。
- 面ファスナーを着衣にひっかけないようにご注意ください。

## 組成・成分表示

- ポリエステル、ポリウレタン、EVA、ナイロン、ポリプロピレン

## 保管上のご注意

- 水濡れに注意し、直射日光および高温・多湿を避けて、室温保管してください。

## 取扱方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を布などに染み込ませ汚れを拭き取ってください。
- 漂白剤、洗濯機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は陰干してください。

## 廃棄方法

- 上記組成・成分に関する各自治体の判別方法に従ってください。

# ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013

TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp