

はじめに

《フィットキュア・リスト》は、手関節の骨折などにおける支持、固定を目的に開発されています。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、医療機器添付文書および本書に従いご使用ください。商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

使用上のご注意

* [使用上のご注意] では、その危険度に応じて区分をしております。

警告 人身事故につながるおそれのある注意事項

- 本品は1症例につき1使用とし、他の症例や本人以外には使用しないでください。
- 患部に皮膚障害、感染創、潰瘍、発疹、腫脹などがある患者に適用する場合は、局所管理を十分行い、慎重に使用してください。(症状を悪化させるおそれがあります。)
- 本品使用中は、痛み、しびれ、知覚異常など(特に末梢の部位)や皮膚障害の観察に留意し、異常が認められる場合には、直ちに医師に連絡するよう使用者にご指導ください。
- 本品のキャストステータの替、ベルトの締め加減、装着位置、装着時間、装着期間、取り外しなどに関し、使用者へ十分にご指導ください。
- 本品は化学繊維を使用しています。化繊アレルギーの方はご使用にならないでください。
- 本品の材料に過敏性またはアレルギーの既往歴のある方には使用しないでください。
- キャストステータは、水硬化性ポリウレタン樹脂を使用しています。製品保管温度により、硬化反応および発熱に伴うバラつきが生じる可能性があります。本品の保管温度についての用法を守ってご使用ください。患者が熱さを訴えた場合は、直ちに使用を中止してください。(上からタオルなどを被せると、放熱が妨げられ、発熱温度が高くなる可能性があります。)
- キャストステータは、水に濡らすと直ぐに硬化が始まります。その後完全に硬化するまでの間に無理な力や荷重をかけないように注意してください。
- キャストステータに使用する水の温度が低すぎる場合、キャストステータが硬化するまでの時間が長くなる場合があります。モールドング後は、キャストステータが完全に硬化したことを確認してください。
- キャストステータの成形時は患部を動かさないように注意し、硬化後の状態を確認してください。(成形時に患部を動かすと、十分な強度が得られない場合があります。)
- キャストステータは専用のステータカバーにて使用し、単体では使用しないでください。
- 硬化前のキャストステータの芯材が直接皮膚や衣服に触れないようにしてください。(樹脂の付着並びに皮膚かぶれの可能性があるため。)樹脂が付着した場合は、樹脂が硬化(接着性が消失)する前にアルコールなどの有機溶剤で拭き取ってください。グローブを着用することを推奨します。
- 長期間の使用により、面ファスナーの接着力の低下やキャストステータの強度が低下、破損する場合があります。その際は使用を中止し、直ちに医師に連絡するよう使用者にご指導ください。
- 装着中に、本品に直接水がかからないようご注意ください。(皮膚の表面が長時間濡れた状態になると、皮膚かぶれなどを起こす可能性があります。)
- 使用中にずれや緩みが生じた際は、正しく装着し直してください。必要に応じて新しいものと交換のうえ、固定などの処置をし直してください。
- ステータカバーを装着する際は、過度な圧迫を加えないでください。
- ステータカバーの面ファスナーは、表面が棘状になっているため、手や指などが傷つくおそれがあります。
- キャストステータの包装が破損している場合や本品の内容物の一部が硬化している場合は使用しないでください。
- キャストステータのカットトリミングをしないでください。(適切な硬化が得られないだけでなく、破損の原因となるおそれがあります。)
- キャストステータの被覆材を剥がさないでください。
- キャストステータのアルミバックの角や周囲部分は鋭利になっておりますので、十分に注意してご使用ください。

注意 物損事故につながるおそれのある注意事項

- 面ファスナーが衣服に付かないように本品を装着してください。
- 硬質のステータを使用しているため、洗濯機や乾燥機の使用を避けてください。本品が破損したり、洗濯機や乾燥機が故障する場合があります。(「洗濯方法」をご参照ください。)
- 本品は滅菌できません。

取扱上のご注意

廃棄方法

- 本品を廃棄する場合は、各自自治体の廃棄区分に従ってください。

保管方法

- 水濡れ、直射日光および高温多湿を避けて、室温で保管してください。


洗濯方法

- 必ずキャストステータを取り出し、中性洗剤を使用し、30℃以下の水で手洗いしてください。
- 漂白剤、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は陰干しし、十分に乾燥させてからご使用ください。
- 洗濯乾燥後は、使用手順を参考に、キャストステータを挿入してご使用ください。

品質表示

キャストステータ：芯材層：ガラス繊維織物、水硬化性ポリウレタン樹脂
被覆層：ポリエステル不織布
ステータカバー：ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン

種類と規格

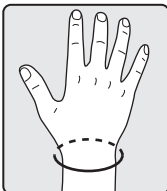

※図のように手首周囲を測ってください。
※規格が両方のサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		手首周囲	セット内容	
右	L 21021	16.0~19.0cm	キャストステータ：1枚 ステータカバー：1コ	1セット
	M 21022	13.0~16.0cm		1セット
	S 21023	11.0~13.0cm		1セット
左	L 21031	16.0~19.0cm	1セット	
	M 21032	13.0~16.0cm	1セット	
	S 21033	11.0~13.0cm	1セット	

別売

種類	商品コードNo.	規格(左右兼用)	1函入数
キャストステータ L	21041	ステータカバーL用	1枚
キャストステータ M	21042	ステータカバーM用	1枚
キャストステータ S	21043	ステータカバーS用	1枚

for Best Care **ALCARE**

フィットキュア®・リスト Fit Cure-Wrist

カバー付きキャストリングシステム Casting System with Cover

取扱説明書 医療従事者向け

- この取扱説明書は医療従事者向けとなっております。ご使用前に医療機器添付文書と併せてよく読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- この取扱説明書および医療機器添付文書に従い、必ず使用者へ適正使用のための説明、指導をしてください。
- 本品には「使用者向け」の取扱説明書が同封されております。必ず使用者にお渡しください。
- 本品は単回使用医療機器です。ご使用は1回限りとして再使用しないでください。

一般医療機器 / 単回使用医療機器
ギプス包帯
医療機器届出番号：13B1X00207000066


お客様相談室 ☎ 0120-770-175
www.alcare.co.jp

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp


各部の名称

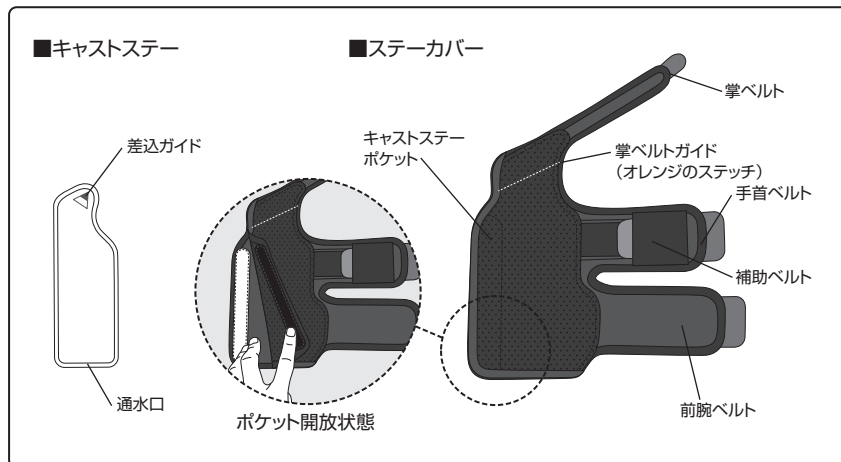


製品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それにより、イラストと実際の製品とで若干の違いが生じる場合がございますことをご了承ください。

使用手順


- 1 キャストステーをアルミパックから取り出します。
- 2 キャストステーの通水口より水を入れ、キャストステー全体をよく濡らします。
- 3 キャストステーをタオルで包みこみ、余分な水を除きます。

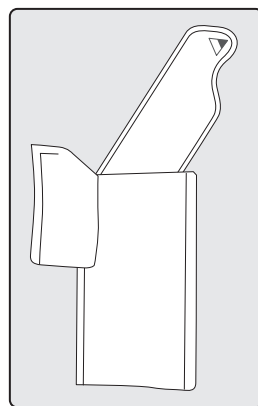

図のようにつまんで通水口を広げます。

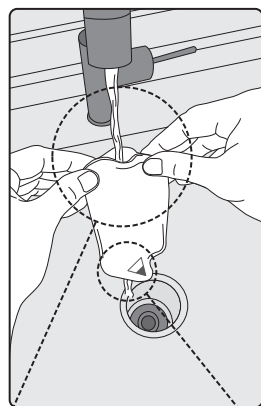


水はこちらより抜けていきます。

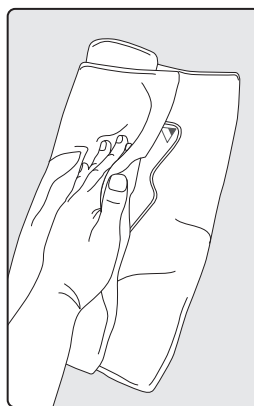


使用手順

- 4 キャストステーをキャストステーポケットに挿入します。




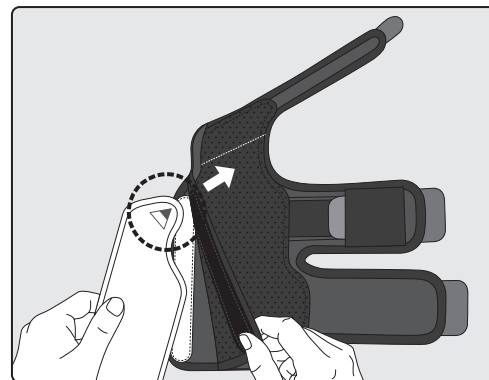


「▲」と印字してある部分が奥になるように挿入してください。

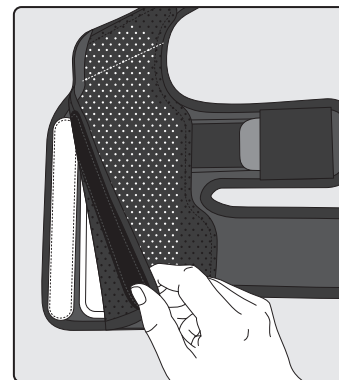


キャストステーが奥まで設置された状態。

- 5 ステーカバーを装着します。
手首ベルト、前腕ベルト、掌ベルトの順にとめます。

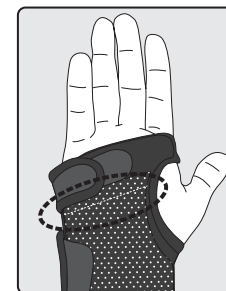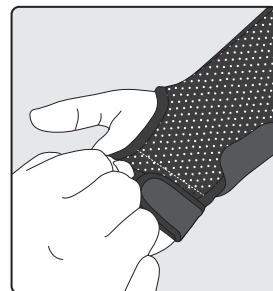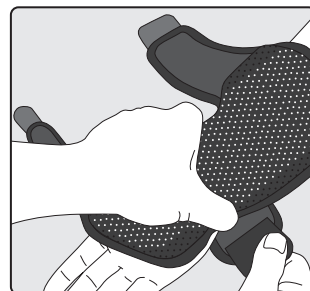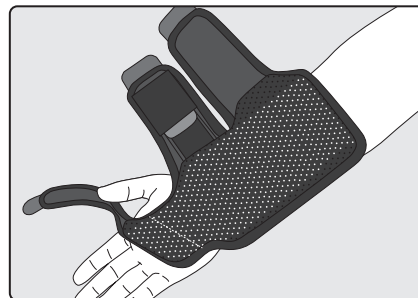


掌ベルトは掌ベルトガイドのステッチより上側を目安とめてください。手関節背側のフィット感が高まります。

- 6 固定する肢位を保持しながら、モールドリングをします。
硬化が完了するまで固定肢位は動かさないようにしてください。(可使用時間は約10分です。)


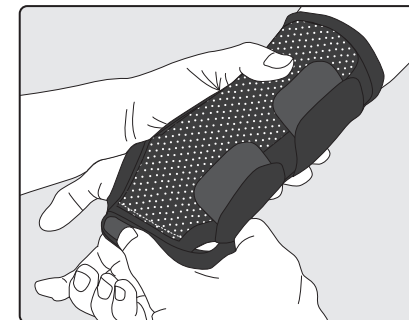


- 7 キャストステーが完全に硬化するまで、過度な負荷をかけないように指導してください。(完全に硬化するまで約1日です。)硬化したら、キャストステーがフィットするように各ベルトおよび補助ベルトを調整してください。

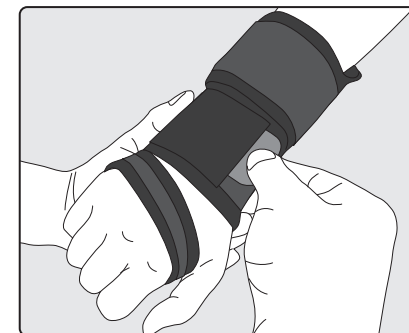

装着図

※必ずキャストステーを挿入して装着してください。

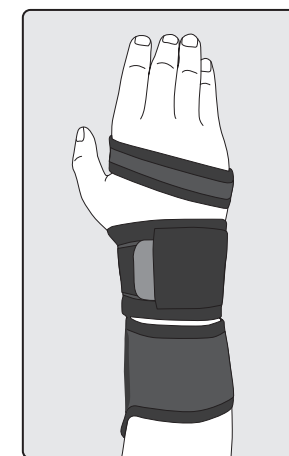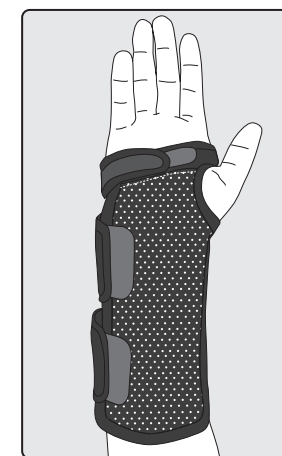

※イラストは右手装着の図です。

はじめに

《フィットキュア・リスト》は、手関節の骨折などにおける支持、固定を目的に開発されています。ご使用に際しては、必ず医療従事者の指導に従ってください。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、本取扱説明書に従いご使用ください。

使用上のご注意

*【使用上のご注意】では、その危険度に応じて次の区分をしております。

△ 警告……人身事故につながるおそれのある注意事項

注 意……物損事故につながるおそれのある注意事項

警告

- 本品のキャストステーの入替、ベルトの締め加減、装着位置、装着時間、装着期間、取り外しなどに関しては、医療従事者の指導に従ってください。
- キャストステーは専用のステーカバーにて使用し、単体では使用しないでください。
- 使用中にすれやゆるみが生じた場合は、正しく装着し直してください。
- 本品の使用中に下記のような現象が発生した場合は、必ず医療従事者の指導に従ってください。
 - 痛み、しびれ、かぶれ、ムレなどの異常や違和感が発生した場合
 - ゆるみもしくは過度の圧迫感がある場合（装着をやり直しても解決しない場合）
 - 長期間の使用や使用状況により、面ファスナーの接着力が低下したり、ステーカバー・キャストステーが破損した場合
- 本品は化繊素材を使用しています。アレルギー体質の方や、皮膚に傷、腫れ、湿疹、炎症のある方は使用しないでください。
- 面ファスナーは表面が鋭利なため、手や指、衣服など柔らかいものが傷つくおそれがあります。
- 本品を装着したまま、激しい運動をしないでください。キャストステーが破損することがあります。
- キャストステーを踏みつけるなどの強い衝撃を加えないでください。破損することがあります。
- キャストステーの被覆材を剥がさないでください。

注意

- 面ファスナーが衣服に付かないように本品を装着してください。
- 硬質のステーを使用しているため、洗濯機や乾燥機の使用を避けてください。本品が破損したり、洗濯機や乾燥機が故障する場合があります。（「洗濯方法」をご参照ください。）

取扱上のご注意

廃棄方法

- 本品を廃棄する場合は、各自自治体の廃棄区分に従ってください。

保管方法

- 水濡れ、直射日光および高温多湿を避けて、室温で保管してください。

洗濯方法

(ステーカバー)

- 必ずキャストステーを取り出し、中性洗剤を使用し、30℃以下の水で手洗いしてください。
- 漂白剤、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は陰干しし、十分に乾燥させてからご使用ください。
- 洗濯乾燥後は、使用手順を参考に、キャストステーを挿入してご使用ください。

品質表示

キャストステー：芯材層：ガラス繊維織物、水硬化性ポリウレタン樹脂
被覆層：ポリエステル不織布
ステーカバー：ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン

for Best Care **ALCARE**

フィットキュア®・リスト Fit Cure-Wrist

カバー付きキャストリングシステム
Casting System with Cover

取扱説明書

使用者向け

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- この取扱説明書は、常にお手元に置き、必要に応じてお読みください。
- 本品を適切に装着できるように、必ず医療従事者の指導に従ってください。
- 本品の設定を変更する場合は、必ず医療従事者に実施してもらってください。

一般医療機器
ギプス包帯
医療機器届出番号：13B1X00207000066

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)

www.alcare.co.jp

ALCARE


アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013

TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp

各部の名称

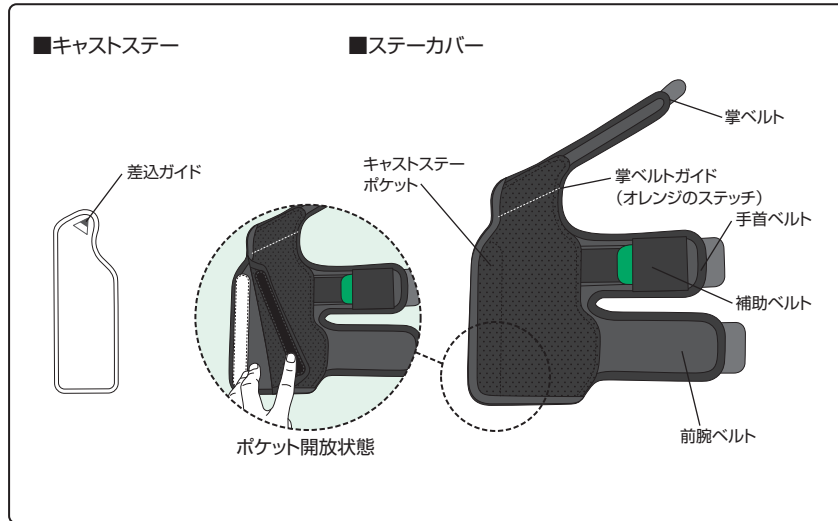


製品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それにより、イラストと実際の製品とで若干の違いが生じる場合がございますことをご承知ください。

使用手順

キャストステーを外した場合は設置してください。


(装着準備)キャストステーをステーカーカバーに挿入します。

- 1 ステーカーカバーのキャストステーポケットの面ファスナーをあけます。

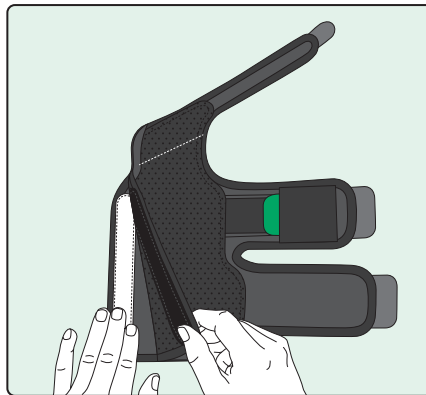


使用手順

- 2 キャストステーをキャストステーポケットに挿入します。

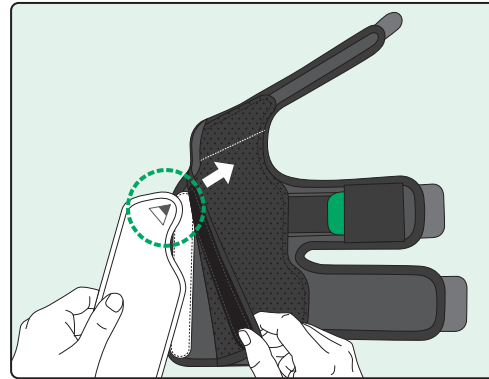

「▲」と印字してある部分が奥になるように挿入してください。

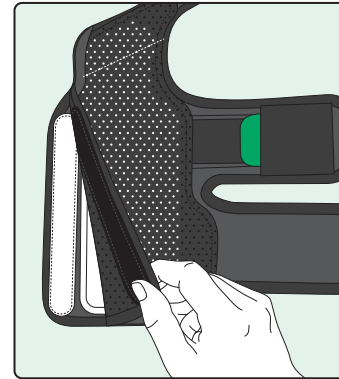


キャストステーが奥まで設置された状態。


(装着)ステーカーカバーを装着します。

- 1 下図のようにステーカーカバーを置き、手首ベルト、前腕ベルト、掌ベルトの順でとめます。



①手首ベルト

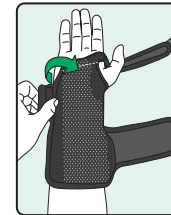

②前腕ベルト

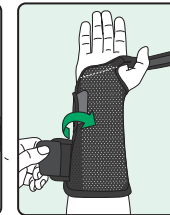

③掌ベルト

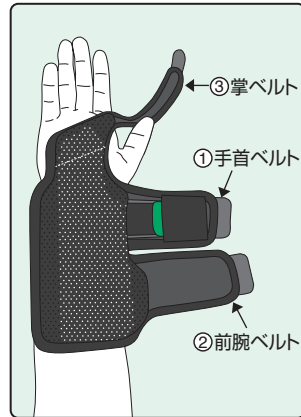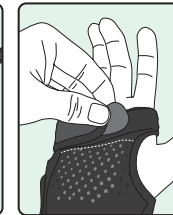

POINT

掌ベルトガイドのステッチ (オレンジ) は目安になります。装着は医師の指示に従ってください。




- 2 キャストステーがフィットするように各ベルトおよび補助ベルトを調整してください。なお、ベルトの締めつけの際に、過度な圧迫がかからないように注意してください。



装着図

※イラストは右手装着の図です。

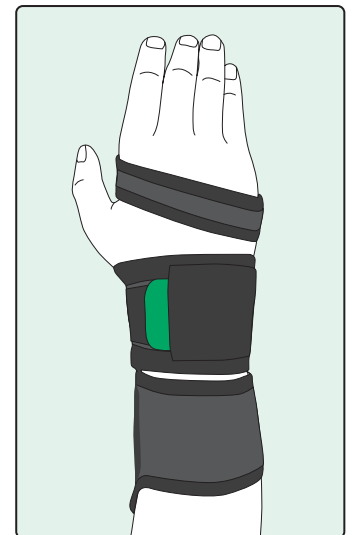

※必ずキャストステーを挿入して装着してください。