

廃棄上のご注意

- 本品は活性炭およびポリエステル、綿を使用しています。また包装にはポリエチレンを使用しています。
廃棄する場合、分別方法を各自治体にご確認ください。

保管上のご注意

- においの強いものと一緒に保管しないでください。

種類と規格

種類	商品コードNo.	規格(縦×横)	1 函入数
S	12081	15cm×15cm	5枚
M	12082	25cm×25cm	5枚
L	12083	25cm×40cm	5枚

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

1506-2

for Best Care **ALCARE**

オドレスシート®

Odoless Sheet

脱臭シート

Deodorant Dressing

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175


(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)

www.alcare.co.jp

はじめに

《オドレスシート》は、ドレッシング材やオムツ、
ストーマ装具等の上から覆うことで、
臭気の強い創や排泄物のおいを脱臭します。
しなやかで柔軟なため、違和感が少なくご使用いただけます。
安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、
この取扱説明書に従いご使用ください。

本品の構造

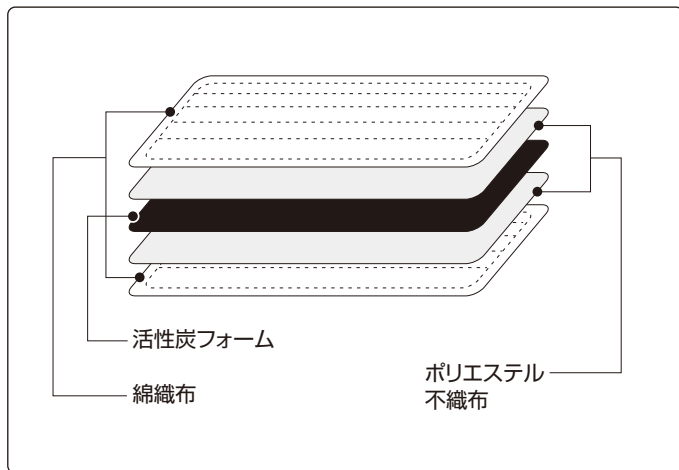

使用上のご注意


- 本品をハサミで切るなど、分解して使用しないでください。
- 本品を洗わないでください。破損および脱臭効果低下の原因になります。
- 破損や水濡れた場合、脱臭効果が低下した場合は、新しい商品に交換してください。
- 本品が直接患部に接触しないように、ドレッシング材やオムツ等の上、またストーマ装具の上に重ねてご使用ください。

使用方法

- 使用の直前に包装を破き、取り出してください。
- ドレッシング材およびオムツ、ストーマ装具の上から覆い、必要に応じてテープ等で固定してください。

※においの強さや使用状況により、脱臭効果の持続期間は変わります。脱臭効果が低下したと思われるときは、なるべく速やかに新しい商品と交換してください。

ドレッシング材の上へ貼付

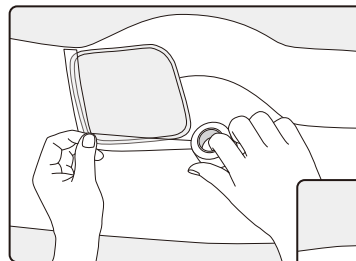

オムツの間にはさむ

