

**パラストーマベルト
サイズ選択**

ストーマ装具の面板と、ストーマ部位の胴回り*を測定し、下記の表に記入してください。

※ストーマ周囲の隆起がおさまった状態で測定してください。

医療従事者にご相談の上、本品を選択してください。

対応リングシール直径 cm

胴回り(サイズ S/M/L) cm

上記の数字を確認し、にチェックを入れてください。

	胴回り 75~85 cm	胴回り 85~95 cm	胴回り 95~115 cm
対応 リングシール 直径 5~6 cm	<input type="checkbox"/> 穴径6cm S No. 20891	<input type="checkbox"/> 穴径6cm M No. 20892	<input type="checkbox"/> 穴径6cm L No. 20893
対応 リングシール 直径 6~7 cm	<input type="checkbox"/> 穴径7cm S No. 20901	<input type="checkbox"/> 穴径7cm M No. 20902	<input type="checkbox"/> 穴径7cm L No. 20903
対応 リングシール 直径 7~8 cm	<input type="checkbox"/> 穴径8cm S No. 20911	<input type="checkbox"/> 穴径8cm M No. 20912	<input type="checkbox"/> 穴径8cm L No. 20913

※メーカー希望小売価格(税込)は全サイズ 10,780円です。

memo



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp

お問い合わせ：お客様相談室

フリーダイヤル **0120-770-175** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：30

パラストーマベルト 使い方

Parastomal Belt

傍ストーマ固定ベルト


Parastomal Fixation Belt




ストーマ周囲の状態を整え、
ストーマ装具(面板)の密着を
高めるための製品です。

《パラストーマベルト》

ストーマ周囲の固定用ベルト

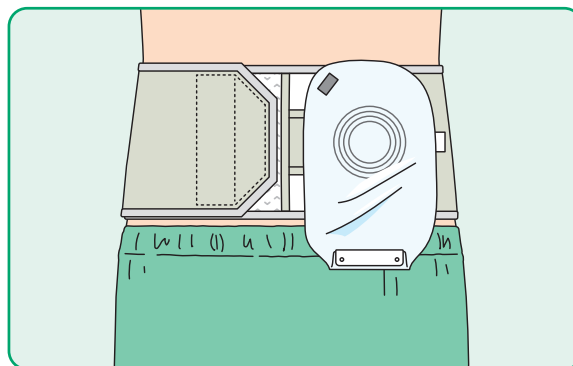

装着図<ストーマが「左側」にある場合>

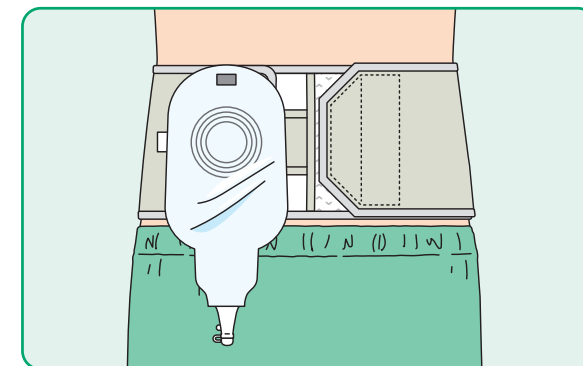


装着図<ストーマが「右側」にある場合>

使用手順※

※取扱説明書も併せてご確認ください。


1

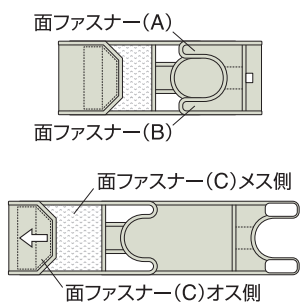


1 面ファスナー(A、B)を外し、面ファスナー(C)は、装着後、締め付けが調整しやすいよう端にずらしておきます。

2 ベルトをストーマ装具の位置に合わせて仰向けになり、**仰向けの状態でストーマ周囲の隆起がおさまるまで待ちます。**

2

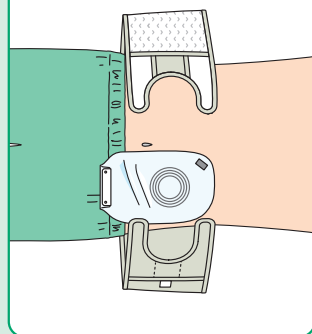


3

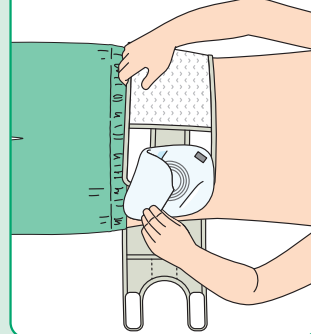

3 ストーマ周囲の隆起状態がおさまったら、メス側の面ファスナー(A、B)を面板とストーマ袋の間に差し込みます。

4 次にオス側の面ファスナー(A、B)を面板とストーマ袋の間に差し込み、面ファスナー(A、B)をとめます。

4

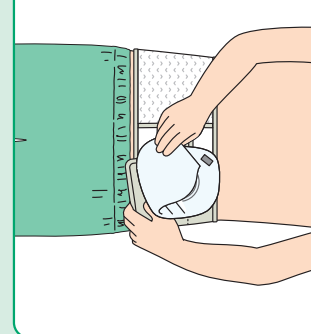

5



5 面板とストーマ袋の境界部分にベルトがぴったり合うように面ファスナー(A、B)を調整します。

6 お腹のサイズに合うように、面ファスナー(C)で調整します。
起き上がり、固定を確認・調整したら装着完了です。

6

