

保管上のご注意

使用後は、よくフタを閉めて室温で保管してください。保管の際は、次の点を避けてください。

- 高温(40℃以上)・多湿の場所での保管
- 直射日光の当たる場所での保管
- 圧迫がかかる場所での保管
- 縦積みによる保管

種類と規格

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		内径	外径	
—	16261	10mmφ	50mmφ	20枚



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

1511-2

for Best Care 

ペグ ケアー Peg Care

PEG後用皮膚保護剤
Skin Barrier for PEG

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)

www.alcare.co.jp

はじめに

《ペグ ケアー》はPEG（経皮内視鏡的胃瘻造設術）後の周囲皮膚の保護を目的とした、皮膚にやさしい皮膚保護剤です。安全にお使いいただくために、用途以外のご使用は避け、この取扱説明書に従ってご使用ください。

使用上のご注意

ご使用前には、専門医の指導を受けた上、注意事項を熟読し、本製品の特性を十分理解してください。誤った取扱いをすると体液のモレが発生し、モレによる皮膚炎の原因ともなります。それらをご注意の上でも、万一肌に合わないときは、直ちにご使用を中止してください。

注 意

- 取扱いの際には、手などに油が付いていない状態で行ってください。粘着力低下による剥がれの原因となります。
- 一度剥がしたペグ ケアーを、再使用することはお止めください。粘着力低下による剥がれの原因となります。
- 万一剥がれにくいときや皮膚に糊が残ったときは、微温湯で十分に湿らせてから、ゆっくり、やさしく取り除いてください。
- 万一肌に合わないときは、使用を中止してください。


ペグ ケアー交換の際は

万一剥がれにくいときや皮膚に糊が残ったときは、微温湯で十分に湿らせてから、ゆっくり、やさしく取り除いてください。

使用手順


1 必要な《ペグ ケアー》を取り出します。

乳白色のフタを開け、必要な《ペグ ケアー》を取り出します。

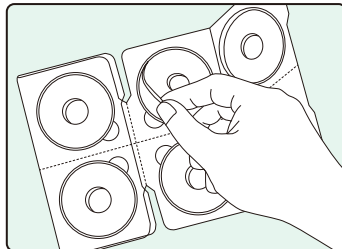

2 皮膚に貼る前に、必要に応じて《ペグ ケアー》にハサミで切れ目を入れてからご使用ください。

必要に応じて切れ目を入れた後、つまみのついた紙を剥がして貼ります。切れ目から体液が漏れるのを防ぐために、切れ目は体の上の方にくるように位置し、十分に押し当てて貼りつけてください。

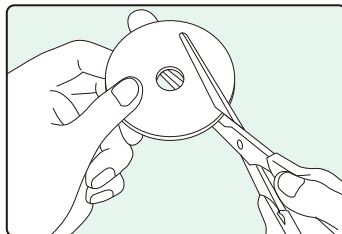

※取扱いの際は、手に油などが付いていない状態で行ってください。油分の付着は、粘着力低下によるモレの原因となります。
※製品の特性上、貼りつくまで時間がかかります。十分に押し当てて貼りつけてください。特に切れ目を入れたところはしっかりと押し当ててください。

