

ALCARE

販売元

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 www.alcare.co.jp

製造販売元

リョートーファイン株式会社 千葉県柏市高田1410番地

リモイス® コート

Remois Coat

ノンアルコール性保護膜形成剤
Non-Alcoholic Skin Barrier Liquid



取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

肌を刺激や汚れから保護する
うるおいのコート

| お客様相談室 ☎ 0120-770-175
www.alcare.co.jp

化粧液

はじめに

《リモイスコート》は皮膚に噴霧するとマイクロ粒子からなる均一な保護膜を形成し、刺激や汚れなどから皮膚を守ります。また、テープ等の粘着剤との間に保護膜を作ることによって、剥離時の機械的刺激も低減します。保湿成分配合で、皮膚にうるおいを与えてなめらかに保ち、肌荒れを防ぎます。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせずこの取扱説明書に従いご使用ください。

使用上のご注意

警告 人身事故につながるおそれのある注意事項

●皮膚に異常が生じていないかよく注意して使用してください。●傷や腫れ物、湿疹等、異常のある部位には使用しないでください。●使用中または使用後に日光にあたって発赤・はれ・かゆみ・刺激・色抜け（白斑等）・黒ずみ等の異常が生じた場合には、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。使い続けると悪化することがあります。●本品は可燃性の液体を含みます。ご使用の際は、通気の良い場所で使用し、火気、熱源に近づけないでください。静電気、火花にもご注意ください（引火のおそれがあります）。●目などの粘膜に噴霧しないように注意し、万が一噴霧してしまった場合は直ちに水またはぬるま湯でよく洗い流してください。●鼻や口から吸入しないように注意してください。●直射日光を避け、室温で保管してください。●乳幼児、小児の手の届かない所に保管してください。


注意 使用方法に含む注意事項

●上からテープ、電極等の粘着剤を貼付する場合は、その用途に適した固定力あるいは通電性が得られていることを確認のうえご使用ください（商品の特性上、テープ等の粘着剤の固定力や通電性に影響を与える場合があります）。●1カ所に多量に噴霧した場合、また皮膚から十分離さずに噴霧した場合に、テープ等の固定力が弱くなる場合がありますので、使用方法をよくご確認のうえ噴霧してください。●上から貼付するテープ等の粘着剤を交換する場合は、保護膜の効果を維持するため交換のたびに本品を皮膚に再噴霧してください。●他のスキンケア用品（軟膏、クリームなど）と併用すると、保護膜の効果が著しく低下することがありますのでご注意ください。●失禁周囲に使用する場合は、保護膜の効果を維持するため頻りに噴霧してください（排泄物の付着や皮膚同士の擦れ等により、保護膜の効果が弱まる場合があります）。●使用後は、目詰まりを防ぐためスプレー口を乾いた布で拭き取ってください。また、霧状にならなくなった場合は、人や物などを避けて数回噴霧し霧状になったことを確認してからご使用ください。

使用方法

- 使用前にストッパーを回して開けてください。
- 皮膚を清潔にし、乾燥させてからお使いください。
- 白い沈殿層がなくなるまで容器を上下によく振り、適応部位にむらなく直接スプレーしてください。皮膚から約10cm離して1～2回噴霧したときの量が適量の目安です。
- 指やガーゼ等でこすらず、自然に乾燥させてください。
- 使用後はストッパーを回して閉じてください。

※テープ等の粘着剤を使用する場合は、本品が完全に乾いてからご使用ください。

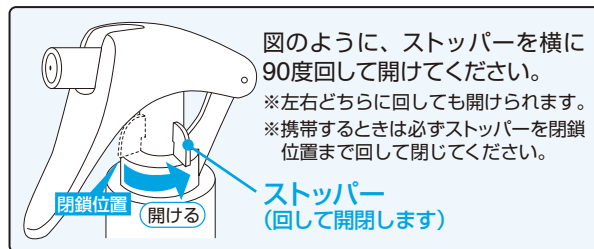

販売名 リモイスコート a

全成分 ジシロキサン、(アクリレート/アクリル酸エチルヘキシル/メタクリル酸ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチコン、(ジメチコン/(PEG-10/15))クロスポリマー、香料

内容量 30mL