

《シャワーカバー》は、シャワー入浴時にキャスト固定部位へ直接水がかからないようカバーする製品です。ご使用にあたっては、必ず医師にご相談のうえ正しくお使いください。

また、安全にお使いいただくため用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。

なお、商品についてご不明な点は下記お客様相談室までご連絡ください。

組成・成分表示

カバー：ポリエチレン

ロゴム：天然ゴム

廃棄方法

- 上記組成・成分に関する各自治体の判別方法に従ってください。

保管上のご注意

- 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。

取扱方法

- 繰り返し使用する場合は、カバーについた汚れや石鹸、水、汗などをよく拭き取り、乾燥させてからご使用ください。
- 乾燥は、屋内で陰干しにしてください。
- 高温によりカバーが劣化するおそれがあります。暖房器具やアイロン、ドライヤーなど高温になるものの近くに置かないでください。

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-770-175



袋:PP

ALCARE Co., Ltd.

19F, Arcacentral Bldg., 1-2-1 Kinshi,
Sumida-ku, Tokyo, 130-0013, Japan
MADE IN JAPAN

使用上のご注意

△警告……人身事故につながるおそれのある注意事項
注 意……物損事故につながるおそれのある注意事項

警告

- この製品のロゴムには天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 装着する部位に応じて適切なサイズ(ロングまたはショート)をお選びください。
- 足に使用する際、本品と床面との摩擦で滑りやすくなったり、こすれやすくなります。必ず、手すりや壁などにつかまり、足に体重をかけず、座ってご使用ください。
- 小児や高齢者など介助が必要な方は、必ず付き添いの方のもとでご使用ください。
- 装着する部位に、傷、発疹などの皮膚疾患のある方は、ご使用にならないでください。また、血行障害を起こしたことのある方、皮膚の弱い方は使用前に医師にご相談ください。
- 使用中、または使用後に発疹、かゆみ、痛み、うっ血などの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師にご相談ください。
- シャワー時以外はカバーを外し、長時間に渡る使用は避けてください。(20分以内が目安)長時間の使用は、うっ血を招くおそれがあります。
- 使用中、カバー内に水が入った場合は直ちに使用を中止し、キャストを十分に乾燥させてください。
- 小児が誤ってカバーを頭から被らないよう、ご注意ください。
- 小児の手の届かない場所に保管してください。

注意

- キャストの表面や先端でカバーが破損する可能性がある場合は、キャストをタオルや包帯などで覆ったうえで、ご使用ください。
- カバーが長すぎる場合は、先端部分を折り曲げてご使用ください。
- カバー内に水が入るおそれがありますので、浴槽につかたり、カバー口周辺にシャワーを直接かけないようにしてください。
- キャスト固定部位より上の関節から10cm以上の位置に、カバー口がくるよう装着してください(手や腕に装着する場合は肩から肘、足に装着する場合は股から膝の間のそれぞれ中央を目安にしてください)。
- カバーの内側に汗や結露などの水滴が溜まる場合があります。ご使用の際は十分ご注意ください。
- 万一破損してしまった場合には直ちに使用を中止し、新品と交換してください。