

使用上のご注意

⚠ 警告

- 本品は医療機器ではありません。直接創部に接触させないでください。
- 本品は、必ず医療従事者(医師・看護師など)の指示のもとご使用ください。
- 使用中に発疹・発赤、かゆみなど異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、医療従事者に連絡し、適切な処置を受けてください。

使用上のご注意

●一度使用した本品を、本人以外の方へ使用することはおやめください。●本品には表裏があります。使用手順を参考に、向きに注意して使用してください。●創部を保護するドレッシング材は、本品で完全に被覆してください。●定期的に貼付部を確認し、本品や創部を保護するドレッシング材にずれや剥がれが生じたときは貼り直してください。●すべり性が低下するおそれがあるため、2週間を目途に新品と交換してください。●製品によってシワが入ることがありますが品質に問題はありません。●汚れが気になるときには、中性または弱酸性の洗剤で手洗いし、十分に水分を拭き取り乾燥させてください。

取扱上のご注意

保管方法

●水濡れに注意し、高温多湿、直射日光を避けて、室温にて箱に入れた状態で保管してください。

廃棄方法

●材質、使用状況により、各自治体の廃棄方法に従い適切に廃棄を行ってください。


品質表示

ナイロン、シリコーン


使用手順

(使用前の準備) 本品を固定するために、25mm巾以上の非伸縮性のサージカルテープを用意します。

- ①本品に印刷された「オモテ」の文字が正しく見える(イラスト参照)面を表面にして使用します。

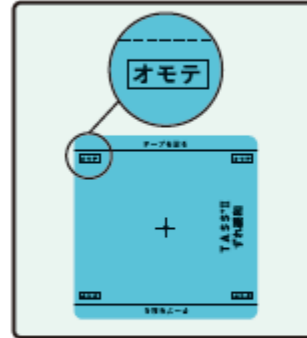

- ②ドレッシング材を完全に被覆したら、「テープを貼る」部の点線をガイドに、2辺を本品の幅(15.0cm)に合わせてカットしたテープで皮膚に固定します。

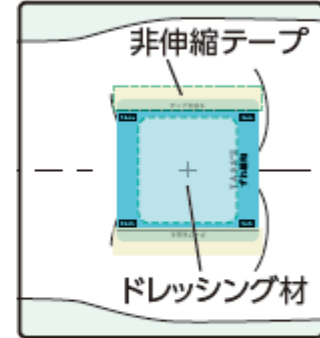

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

ALCARE Co., Ltd.

19F, Arcacentral Bldg., 1-2-1 Kinshi,
Sumida-ku, Tokyo, 130-0013, Japan

MADE IN JAPAN