

# 2ステップテストシート

## Two-step Test Sheet

2ステップテスト用ツール  
Two-step Test Tool

### 取扱説明書

- ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 本書はお手元に保管し、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175  
www.alcare.co.jp

### はじめに

2ステップテストシート(以下「本製品」と言います。)は「2ステップテスト」を実施するために使用するテスト用ツールです。

安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従ってご使用ください。商品の品質についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

また、「2ステップテスト」に関する実施方法や注意事項については、ロコモチャレンジ!推進協議会ホームページ <https://locomo-joa.jp/>を必ず確認して本製品をお取扱ください。

### 使用上のご注意

- \*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。
- △ 警告……人身事故につながるおそれのある注意事項
  - 注 意……物損事故につながるおそれのある注意事項
- ※思わぬ事故やけがにつながるおそれがあるため、以下の警告や注意をお守りください。

#### 警告

- 本製品は「2ステップテスト」を実施するためのテスト用ツールです。その他の用途で使用しないでください。
- 屋内の安定した平らで乾いた硬さのある床面の上で使用してください。
- 使用される床面の素材によっては、シート裏面の跡が残る場合があります。
- テスト内容を理解している補助者が付き添いのもとで使用してください。
- ヒールが高い、ヒールが細い、底面が滑りやすい、スパイクなど底面が鋭利な履物などで使用させないでください。
- シートが濡れたままで使用しないでください。

#### 注意

- 水に濡れる場所での使用はしないでください。
- 火気に近い場所での使用はしないでください。
- 高温・多湿、直射日光のあたる場所での使用はしないでください。

### 使用目的

本製品は、「2ステップテスト」を実施するためのテスト用ツールです。

### 組立・設置方法

『2ステップテスト』を実施する前に本製品を設置します。シワや折れ曲がりがないよう、テストに適した床の上に平らに設置してください。

### 使用後のお手入れ、保管方法

使用した後は、本製品の状態を確認し、保管してください。

#### 使用後の確認

本製品の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、水または中性洗剤をやわらかい布にしみこませ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。汚れを拭き取った後、乾いた布で拭いてください。

#### 保管方法

保管場所、保管中においては次の事項に注意してください。

- 1) 水のかからない場所、結露のない場所。
- 2) 高温(車中など)・多湿にならない場所、低温にならない場所、直射日光の当たらない場所。

### 交換目安

本製品の交換目安は約1年です。但し、使用状況や保管環境によって変形などの消耗が著しい場合には交換目安前での買い替えもおすすめします。

### 製品構成

シート：1枚 添付書類:取扱説明書(本書)：1部

### 仕様

外形寸法・重量	長さ4,000mm×幅500mm×厚み1.5mm、約3.6kg
測定範囲	0～3m50cm
測定最小目盛	1cm
構成材料	シート材質：ポリ塩化ビニル(PVC) シート表面印刷：油性インクプリント

※シート上の目盛は目安です。正確な測定を要する場合は実測にて対応願います。

### 廃棄方法

本製品を廃棄またはリサイクルする場合には、地方自治体の定めた方法に従って処理してください。