


## 取扱上のご注意(その1)

### ご使用前に

- 本品の適応範囲は、下記の表の通りとなっています。装着するサイズを確認の上ご使用ください。サイズは手首周囲を基準とし、図の位置を計測して選定してください。

※2つのサイズにまたがる場合には、大きいサイズをお選びください。

サイズ	適応範囲(手首周囲)
L~LL	16~19cm
S~M	13~16cm

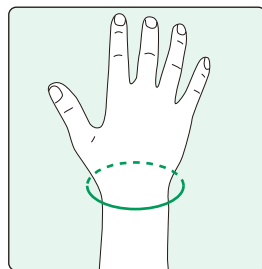

### 採寸の仕方

- 図のように手首の一番細い部分を計測してください。

### ご使用中に

- 長期の使用により本体およびベルト等の各部品が破損する場合があります。破損した場合は使用を中止してください。そのまま使用すると確実な保持性が得られないだけでなく、装着者本人や他の人を傷つける可能性があります。
- 使用中ズレ、ゆるみが発生したら正しく装着し直してください。ズレ、ゆるみがあると確実な保持性が得られません。

## 取扱上のご注意(その2)

### 洗濯方法

- アルミステー使用の場合は、本体ステーカバーからアルミステーを取り出して洗濯してください。
- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 漂白剤、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は陰干してください。

### 廃棄方法

- 本品は布製品です。通常可燃物として廃棄してください。ただしアルミステーは金属ですので、取り出して金属扱いとして廃棄してください。(地域により異なる場合もありますので、詳しくは各自治体へご確認ください。)



### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
www.alcare.co.jp

1506-2

for Best Care **ALCARE**

# リストケア・プロ Wristcare-Pro

手関節サポーター  
Wrist Supporter

## 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175  
www.alcare.co.jp

## はじめに

《リストケア・プロ》は手関節の動揺を低減することを目的に開発された手関節サポーターです。アルミステーおよびマルチストラップを組み合わせてご使用いただくことにより、手関節の動揺をより低減させることができます。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせずこの取扱説明書に従いご使用ください。尚、商品についてご不明な点はお客様相談室までご連絡ください。

## 使用上のご注意

\*【使用上のご注意】では、その危険度に応じて次の区分をしております。

△ 警告……人身事故につながるおそれのある注意事項

注 意……物損事故につながるおそれのある注意事項


### 警告

- 本品の使用に際しては、必ず取扱説明書の使用手順および医師の指示に従ってください。
- 本品は化繊を使用しておりますので、本品の使用によりかぶれなど何らかの異常が生じた場合には、使用を中止してください。
- 長期間の使用や使用状況によっては破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。
- ベルト、マルチストラップで手首を過度に圧迫しないようにしてください。強く締めすぎると血行障害やしびれなどを生じる場合があります。
- 使用中ズレやゆるみが生じた場合は、正しく装着し直してください。
- 装着部に傷、腫れ、湿疹などがある場合には使用しないでください。
- 本品には右用、左用がありますので、必ず対応する側にご使用ください。

### 注意

- 面ファスナーを着衣に引っかけないようご注意ください。
- 保管に際しては、車の中など高温になる場所には置かないでください。
- 使用後は、風通しのよい場所に保管してください。



## 各部の名称

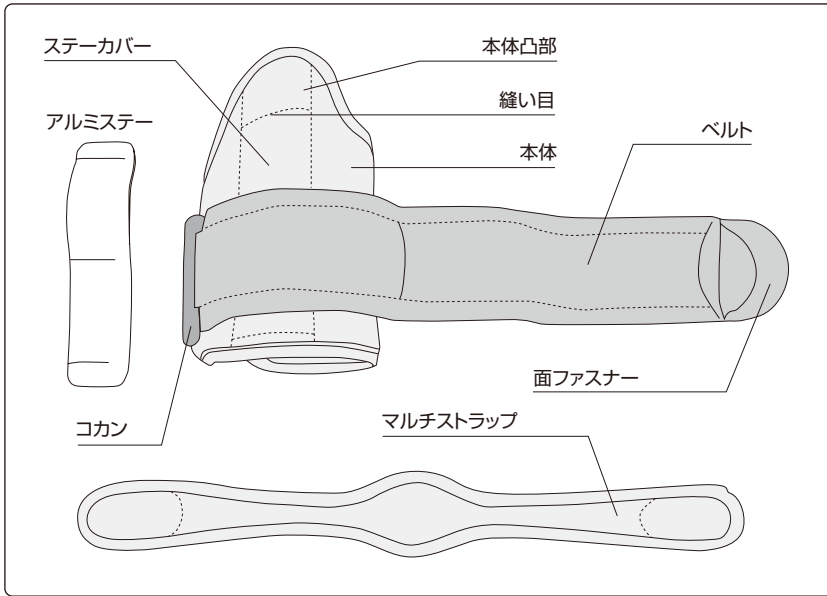

製品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それにより、イラストと実際の製品とで若干の違いが生じる場合がございますことをご了承ください。


## 使用手順

- 1 ステーカー下部からアルミステーを取り出します。ベルトはあらかじめコカンに通しておきます。

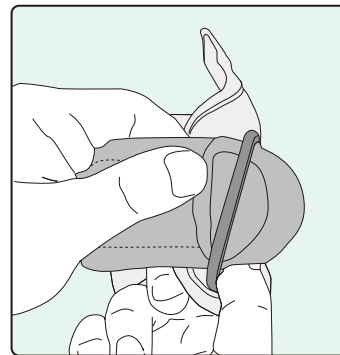
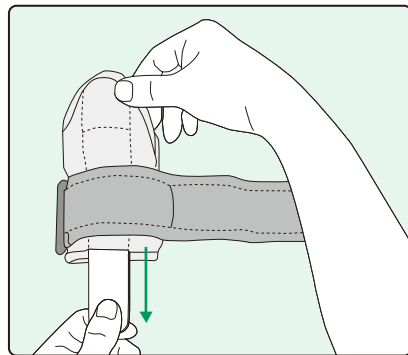


## 使用手順


- 2 本体に手を通します。ステーカーが手のひらの中央に、ベルト幅の中央が尺骨頭を通るように位置を調整します。

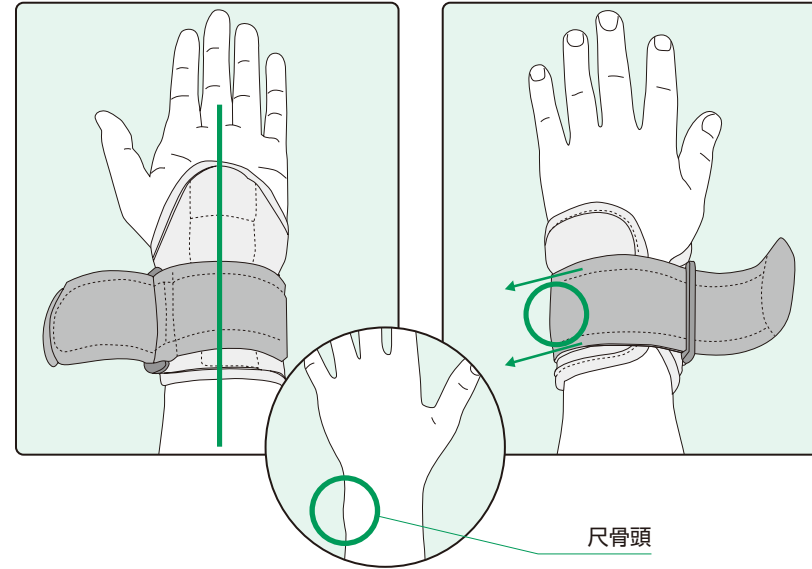


- 3 ベルトを引っ張り、折り返して面ファスナーをとめます。
  - ベルトをきつく締めすぎると血行を妨げる恐れがあります。締め加減は、医師の指示に従ってください。

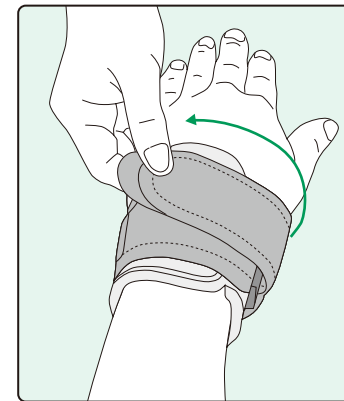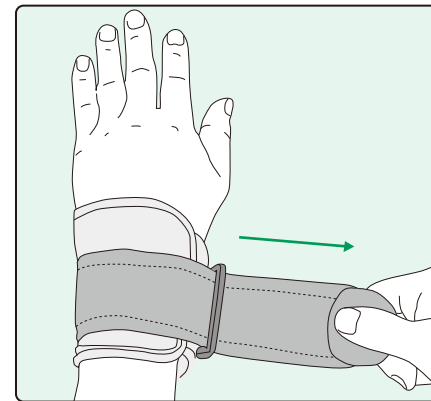


## 装着完了

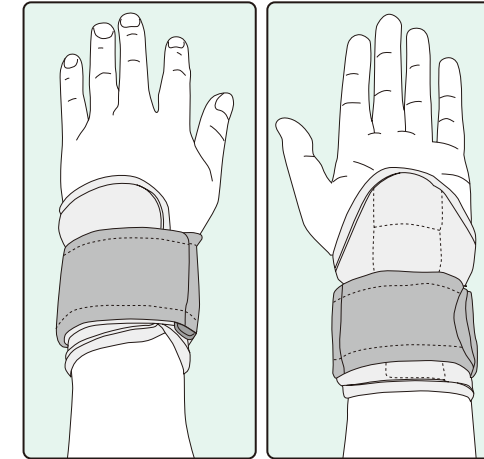

スポーツ時などは、本体凸部を縫い目に沿って内側に折り返します。

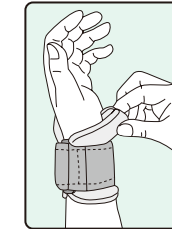

装着完了

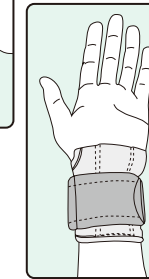

## アルミステーの使用方法

アルミステーを使用することで、より保持力を高めることができます。


### ■使用する上での注意点

- アルミステーは必ず医師の指導のもとに使用し、必要に応じて着脱してください。


### ■使用手順

- ①アルミステーを丸く曲がった部分の方からステーカーの中に入れます。
- ②通常の使用手順で装着します。

- 使用中はアルミステーのとび出しにご注意ください。

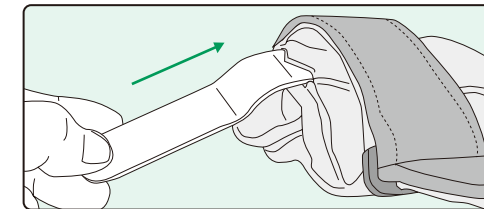

装着完了(手のひら側)

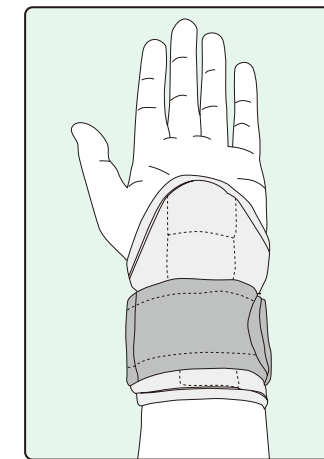

## マルチストラップ使用手順



マルチストラップを使用することで、各部の保持力を高めることができます。

※本体を通常の使用手順で装着後、それぞれ下記の手順で装着します。



### ■拇指に使用する場合

拇指の保持力を高めます。

- ①マルチストラップの片側の面ファスナーを、手の甲側小指寄りのベルト部にとめます。
- ②下から巻き上げるように、マルチストラップを拇指の付け根に巻き付けます。
- ③そのまま引っ張りながら、もう片側の面ファスナーを手のひら側小指寄りのベルト部にとめます。

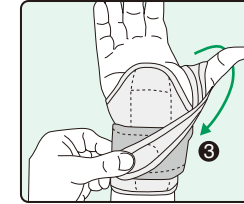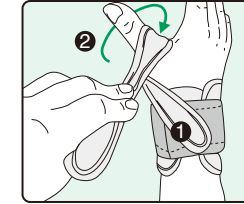



装着完了

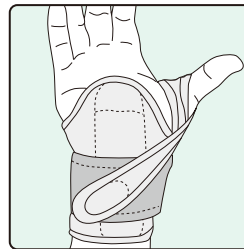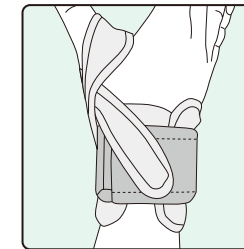



### ■手のひらに使用する場合

手首の保持力を高めます。アルミステーと併せて使用することで、より保持力がアップします。

- ①マルチストラップの片側の面ファスナーを、手のひら側拇指寄りのベルト部にとめます。
- ②マルチストラップを拇指と人差し指の間に通し、手の甲側に回します。
- ③そのまま引っ張りながら、もう片側の面ファスナーを手のひら小指寄りのベルト部にとめます。

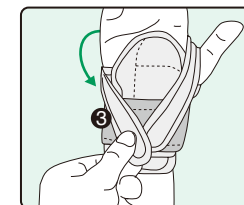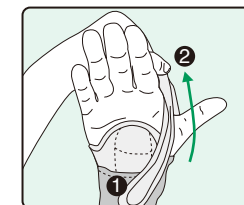

装着完了

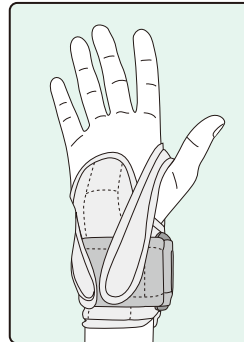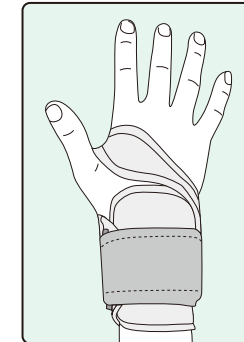

- ベルトをきつく締めすぎると血行を妨げる恐れがあります。マルチストラップの締め加減は、医師の指示に従ってください。