

使用手順 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みください。


「ベーステープ」を貼付します。
ベーステープの剥離紙を剥がし
皮膚に貼付します。
「補助テープ」は後で使用します。



「カテーテル用テープ」でカテーテル
を固定します。


カテーテル位置目安に(くびれ)に
合わせてカテーテルを置き、カテー
テル用テープを折り返し、粘着面同
士を貼り合わせます。

カテーテル周囲に隙間ができない
よう指でよくなぞり密着させてくだ
さい。

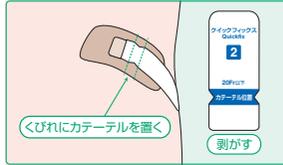

必要に応じて「補助テープ」を貼付
します。

カテーテル用テープのめくれ上がり
や脱落防止のため必要に応じて、
補助テープを貼付してください。

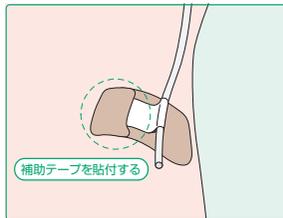

剥がし方

ベーステープを皮膚から剥がす際
は、皮膚を押さえながらゆっくりと
水平に引っ張るように剥がしてくだ
さい。



Quickfix[®] 2号 (15枚入り) Quickfix

| 商品コード No. | 規格 | | | 1函 入数 | メーカー希望 小売価格(本体価格) |
|--------------|-------------|---------------|----------------|----------|----------------------|
| | ベーステープ | カテーテル用 テープ | 適応カテーテル サイズ | | |
| 21372 | 4.5cm×6.5cm | 2.5cm×5.2cm | 20Fr以下 | 15枚 | ¥990(¥900) |



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp

お問い合わせ：お客様相談室

フリーダイヤル **0120-770-175** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：30

- 本カタログの内容は2022年9月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

Quickfix[®] 2号 (15枚入り)
Quickfix



退院後も使い続ける
固定補助テープに、
便利な少量パッケージ。

カテーテル固定補助テープ
Catheter Fixation Assisted Tape

使用手順は、動画をご参照ください。



<https://www.alcare.co.jp/u/QFX>


在宅でのカテーテル補助固定に、簡便・安心を。

退院後のカテーテル補助固定が、自分で上手にできるか心配。
そんな患者さんのカテーテル補助固定の不安を軽減する、クイックフィックス2号の少量パッケージです。

■ 箱から出してすぐに使える カット不要なプレカット設計

プレカットだから、ハサミを使う準備や加工が不要。
固定に必要な機能が1枚になっています。

テープを切って、
用意するのは大変

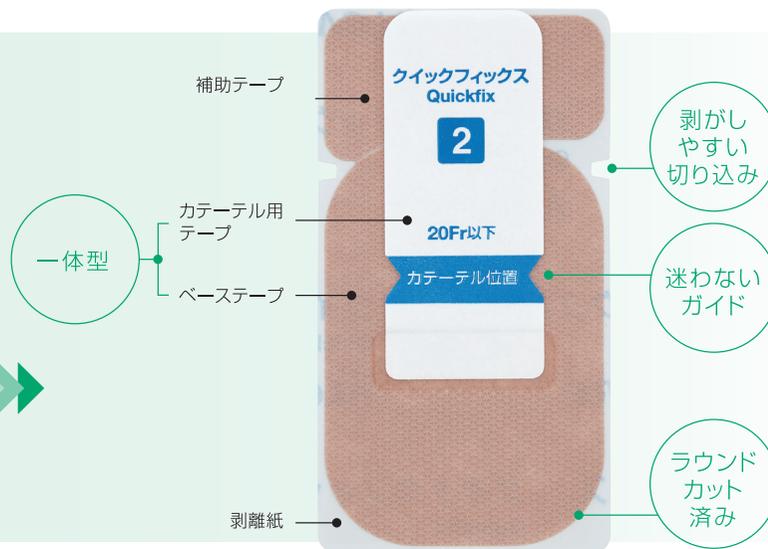

■ ガイドに置いてぐるりと巻くだけ 簡単にΩ(オメガ)固定※を実践

しっかり固定しつつ、皮膚を圧迫しない“Ω固定”が簡単におこなえます。

カテーテルをしっかり固定
する貼り方はむずかしい



- × ベタ貼り
- × Ω風固定
- Ω固定



Point


カテーテル周囲に隙間ができないように、テープ同士を密着させます。



※留めた形の断面が「Ω(オメガ)」に見えることからΩ固定と呼ばれます。

■ 各固定方法の引き抜き強度比較

(当社医工学研究所調べ 2022年6月実施)

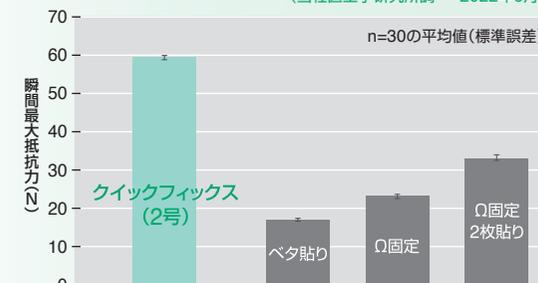

〈測定条件〉 当社規定の試験版に試験片を貼り、5分後に16Frカテーテルを牽引 牽引速度:1000mm/min
 〈貼付条件〉 対象試験片:シルキーテックス 試験片寸法:50mm×100mm (Ω固定2枚貼りの上部貼付部分は50mm×75mm)



クイックフィックス(2号)固定



ベタ貼り



Ω固定



Ω固定2枚貼り

メモ欄
